



Super Relax マッサージチェア

FUJIIRYOKI

JT-FJ140

独自のもみ玉機構と 座面設計で 心地よさの新境地へ

高級本革を贅沢に使用



こだわりの体感を実現したフジ医療器の独自機構

NEW 力強く粘りのあるマッサージが可能
「大玉ほぐしメカ」を搭載


負荷のかけ具合によって形状が変化し、身体の凹凸に合わせて縦横に回転する「360度2層ほぐしもみ玉」を搭載。また、身体のラインに沿うような曲線の「S字フィットフレーム」で、滑らかかつ力強く粘りのあるマッサージを体感することができます。



独自機構 ゆったりとした座り心地を追求
座面設計

座面の角度を深くすることでより体にフィットし、腰周辺のマッサージの体感が良くなります。ゆったりとおくつろぎ頂けます。

前回機種より
-8度深い角度

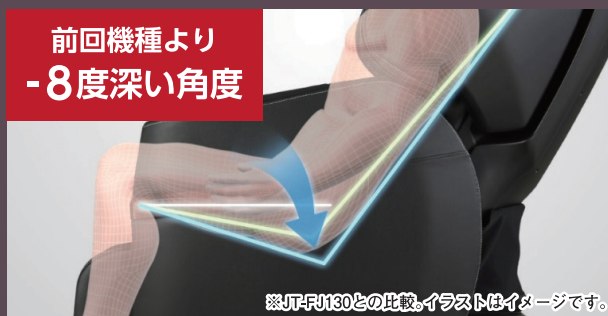

※JT-FJ130との比較。イラストはイメージです。

こだわりのもみ心地とテーマに合わせたコース 「もみ技」と「本格技プレミアム」

疲れを感じやすい部位に特化した「首肩専門」、「腰体幹ほぐし」と、全身をソフトにもみほぐす「癒しほぐし」、「ヒーリング」の4種類の特別コースをご用意しました。

4種	もみ技
もみ	筋肉のコリをじっくりほぐす
たたき	リズムカルのこちよくたたく
さざなみ	“もみ”ながら“たたき”
背すじ伸ばし	背すじを伸ばすようにローリング

4種	本格技プレミアム	
もみ玉	NEW	もみ玉
首肩専門コース	腰体幹ほぐしコース	
もみ玉 エアーバッグ	エアーバッグ	
癒しほぐしコース	ヒーリングコース	

全身を包み込んで、心地よくもみほぐす
エアーマッサージ

エアーバッグ
22個

- 肩部マッサージ
- 腕部マッサージ
- 座部・腰横マッサージ
- 脚部ほぐしマッサージ

肩位置自動検出&プログラムフィードバック

センサーが肩の位置を検出し、背・腰部の適切なポイントを予測しマッサージします。

部位ごとにお好みの強さを選択 部位別強弱調節機能

部位ごとにマッサージの強さをお好みに合わせて調節できます。	肩	強弱調節	5段階
	背	強弱調節	2段階
	腰	強弱調節	5段階

全身の筋肉を伸ばしてほぐす 全身ストレッチ(ストレッチコース)

脚部を下方へ引っ張る フットストレッチ

背中全体を温風でじんわり温める
温浴背ヒーター

壁際にも設置できる
スライドリクライニング機能

コンパクト設計
反転式フットレスト & 脚部収納機能

仕様

スーパーリラックス マッサージチェア EJ58 JT-FJ140

【商品仕様】

- 本体寸法(約): (脚部収納時)幅69×奥行107×高さ109cm (肩・脚部最大使用、リクライニング時)幅80×奥行180×高さ79cm
- リクライニング角度(約): 117度~148度
- 質量(約): 61kg
- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 141W(ヒーターのみ40W)
- 定格時間: 20分(オートタイマー: 約15分)
- 医療機器認証番号: 303AGBZX00041000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

ブラック(BK) レッド×ブラウン(RB)

JANコード: 4951704171304 JANコード: 4951704171311

寸法

最大幅(肩部幅) 約80cm
肩部幅狭 約69cm
最大高さ 約109cm
最小奥行 約107cm
最大高さ 約79cm
奥行(脚部を収納した状態) 約126cm
奥行(脚部を伸ばした状態) 約180cm
幅(脚部を伸ばした状態) 約170cm
最大奥行(脚部を伸ばした状態) 約180cm

リクライニングしていないとき
リクライニングしているとき 脚部を伸ばしたとき

搬入幅 約71cm
搬入幅: 本体搬入幅69cm+2cm(養生のため)以上必要です。

使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓(そく)栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)。 ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内
フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付: 平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp	Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
FAX番号	06-4793-0818	修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ! フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは...