

# 骨盤まわりの トータルケアマッサージ リラプロ M-003

詳しくは製品サイトへ




## エアバッグと独自の背面構造による2つのマッサージ

### 6ヶ所のエアバッグでもみほぐす 「骨盤エアマッサージ」


腰・背面・お尻部分の6ヶ所にエアバッグを搭載。骨盤まわりをしっかりと包み込みマッサージします。

体格やお好みに合わせて3段階の強弱調節が可能です。

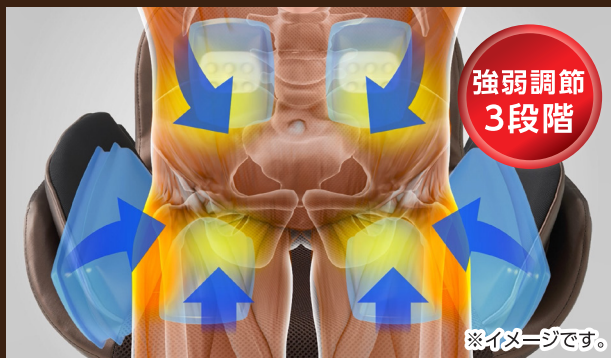


### 仙骨まわりの筋肉を心地よくもみほぐす 「骨盤アジャスト機構」

背面に搭載した振動指圧球によるバイブレーターとエアバッグの組み合わせで、骨盤の中心部分となる仙骨まわりの筋肉を心地よくもみほぐします。

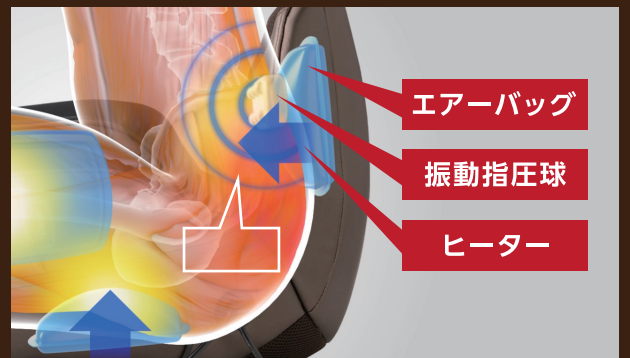

## その日の気分やお好みに合わせて 選べる3つの自動コース

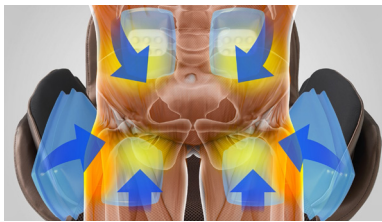


### ①ひきしめ

エアバッグによるゆったりとした給排気動作を中心に、骨盤まわりの筋肉をじっくりマッサージします。



### ②もみほぐし

リズムカルに給排気を繰り返すエアバッグの動作を中心に、筋肉をしっかりマッサージします。

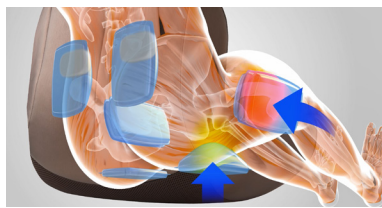

### ③体幹ストレッチ

左右にひねるような動作を中心に、骨盤まわりの筋肉を整えながらマッサージします。

## リモコン

### コースボタン

「ひきしめ」「もみほぐし」「体幹ストレッチ」の3つのコースを選択できます。(約15分)

### 強さボタン

エアマッサージの強さを調節できます。「弱」「中」「強」の3段階

### オプションボタン

動作中にヒーターパイプのON/OFFを選択できます。

### 急停止ボタン

すべての動作が停止します。



お部屋のインテリア  
にも合わせやすい

**上品な質感**

質量 約3.5kgで  
持ち運びもラクラク

**軽量設計**

## 仕様

### リラプロ 骨盤マッサージャー T21 M-003

メーカー希望小売価格 29,800円(税込)

●本体寸法:

幅 約47.5×奥行 約46×高さ 約35.5cm

●質量: 約3.5kg

●適応体重: 約90kg以下

●電源: AC100V (50/60Hz)

●消費電力: 40W (ヒーターのみ9W)

●定格時間: 15分(オートタイマー: 約15分)

●医療機器認証番号: 303AABZX00082000

(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

付属品: ACアダプター (型式: IVP1200-3000P)



ブラウン (BR)

JANコード: 4951704134750



グレー×ブラウン (GB)

JANコード: 4951704134835



レッド×ブラウン (RB)

JANコード: 4951704134842

### 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●低温やけどをしたことがある人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル  0120-027-612

受付: 平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ [www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年1月現在のものです。