

mashua

Daily Routine Item

mashua Hands Free Neck Massager
マシュア 手ぶらネックマッサージャー

M-004



いつでも、どこでも「ながら」リフレッシュ 両手が使えるネックマッサージャー


いつでも簡単マッサージ。家事やデスクワーク中、
移動時間など、様々なシーンで首周りを気軽にリフレッシュ。

両手を自由に使える「ハンズフリー仕様」



家事やデスクワークをしながらマッサージができます。
従来のネックマッサージャー(約2.0kg)と比べ約半分の軽量
設計で、持ち運びもラクラク。

4つのもみ玉で、やさしくほぐす

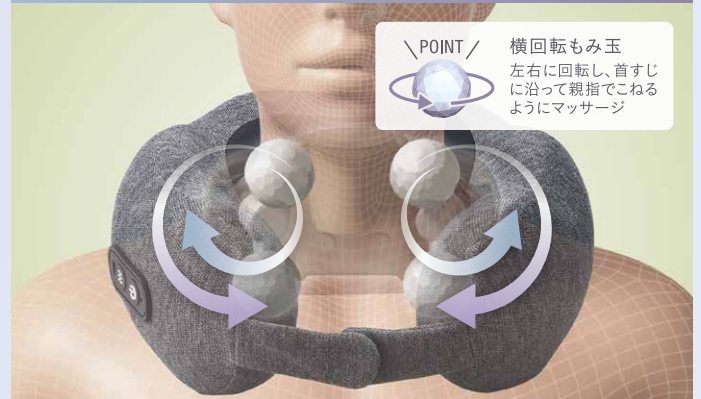


4つのもみ玉が首すじを包み込むように左右からもみほぐします。お好みに合わせてマッサージの速さを2段階(遅/速)から選択できます。


首すじを包み込むように、滑らかにやさしくマッサージ

4つのもみ玉で、やさしくほぐす

横に回転する4つのもみ玉が、親指でこねるような動きで首すじを両側からやさしくもみほぐします。自動でもみ玉の動きが正反転切り替わり、変化のあるもみ心地を体感できます。

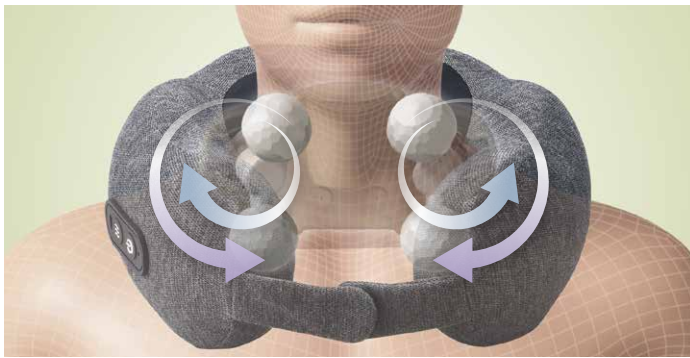

マグネット式留め具

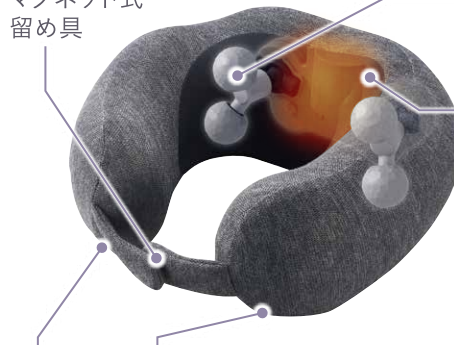

横回転もみ玉

※2分ごとにもみ玉の動きが正反転切り替わります。

ヒーター機能付き

40~47°C
(2段階調節可能)

※室温等により体感温度が異なる場合があります。

ストラップ取付部
(裏側2か所)



ストラップでもみ加減を調節

下に引っ張りお好みのもみ加減に調節できます

※ストラップは片側だけ引っ張らず両側を持ってください。

操作



- 1 ヒーター電源ボタン 低温(約40~44°C)と高温(約44~47°C)の各設定温度で切り替えることができます。
- 2 マッサージ電源ボタン マッサージの速さを2段階から選択できます。
- 3 LEDランプ マッサージやヒーターの使用中に点灯します。電池残量・充電状態に応じて色が変わります。

仕様

マシュア 手ぶらネックマッサージャー T24 M-004 [仕様]

- 本体サイズ: 幅 約25.5×奥行 約26.5×高さ 約13.5cm
- 質量: 約0.9kg (アダプター含まず)
- 電源: AC100V (50/60Hz)
- 消費電力: 10W (ヒーターのみ4.5W)
- 充電所要時間: 約3.5時間
- 電池持続時間: 約3時間 (無負荷時)
- 充電回数: 約500回 ●タイマー: 約10分自動オフ
- 付属品: ACアダプター (型番: EA010-0500-2000UJ)
- 医療機器認証番号: 306AHBZX00042000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)
JANコード: 4951704135139

洗える洗濯カバー

取り外し&装着も簡単。
いつでも清潔にお使いいただけます。



充電式コードレス

電池持続時間: 約3時間 (無負荷時)
※充電中は使用できません。
※実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38°C以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 **フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612** 受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 FAX番号 **06-4793-0818**

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！ **フジ医療器オンラインショップ** www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

●お求めは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本ページの記載内容は、2024年12月現在のものです。