

独自のダブルメカを搭載

広範囲をパワフルにほぐす シートマッサージャー

3種類の
マッサージ
コース

背腰もみ玉
ヒーター

座面
バイブ機能

2つのメカで広範囲を効率的にマッサージ

首肩押しほぐしメカ

粘りとグリップ性のある4つのもみ玉を搭載したメカユニットが首肩のコリを押しほぐすようにマッサージします。



背腰もみたたきメカ

6つのもみ玉で背中～腰まで広範囲のコリをリズムカルにたたきながら、もみほぐします。



効率的に広範囲をほぐす独自のダブルメカ

2つのメカで

首・肩・背・腰を効率的にマッサージ

首・肩と背・腰にそれぞれ独立した専用メカを搭載し最適なマッサージを実現。最大約67cmの施療範囲で、各部位を効率よく広範囲にもみほぐします。

もみ技2種 首肩押しほぐしメカ

もみ上げ

もみ下げ

もみ技3種 背腰もみたたきメカ

もみ伸ばし

たたき

さざなみ(もみ伸ばし+たたき)

mecha massage

首からお尻まで
この1台でトータルケア

6つ玉
背腰もみたたきメカ
(ヒーター機能付き)

4つ玉
首肩押しほぐしメカ

高さ電動調節可能

首肩のもみ玉は
リモコンで高さ調節可能

最大施療範囲
約67cm

座面バイブ
(速度調節2段階)

背中のもみ玉に
ヒーター機能を搭載
もみ玉ヒーター

臀部をやさしく
ほぐします
座面バイブ機能

お好みのコースを
お選びいただけます
3つの自動コース

仕様


フジシートマッサージャー H23 SS-200

【商品仕様】

- 本体寸法(約): 幅 約47×奥行 約48×高さ 約78cm
- 質量(約): 6kg
- 適応体重: 90kg以下
- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 60W(ヒーター6W)
- 定格時間: 15分(オートタイマー: 5分/10分/15分)
- 医療機器認証番号: 306AABZX00026000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



シンプルLEDリモコン

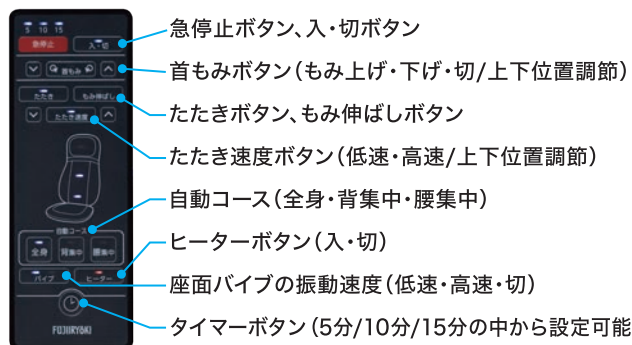

使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)。 ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付: 平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。	Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。
FAX番号	06-4793-0818	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ! [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは...

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年6月現在のものです。