



TR-N1

心地よい もみ&たたきで 温めながらもみほぐす



詳しくは製品サイトへ



肩から肩甲骨の広範囲をもみとたたきで心地よくマッサージ

肩から肩甲骨をもみほぐして、たたいてリフレッシュ! ダブルエフェクト機構

大小の突起が付いた2つの「突起付き回転もみ玉」と、2つの「たたき専用もみ玉」を搭載し、同時に可動することで「もみ+たたき」の複合動作ができる「ダブルエフェクト機構」を搭載しています。



長さの違う2つの持ち手が使いやすい 2段階調節持ち手ベルト


マッサージを身体によりフィットさせるため、長さの違う2種類の持ち手を採用しています。体形やマッサージ部位に合わせて使いやすい2WAYの持ち方ができます。



※画像はイメージです。

あなたの疲れをほぐす、こだわりのもみ心地と使いやすい機能。

肩から肩甲骨をもみほぐして、たたいてリフレッシュ! ダブルエフェクト機構

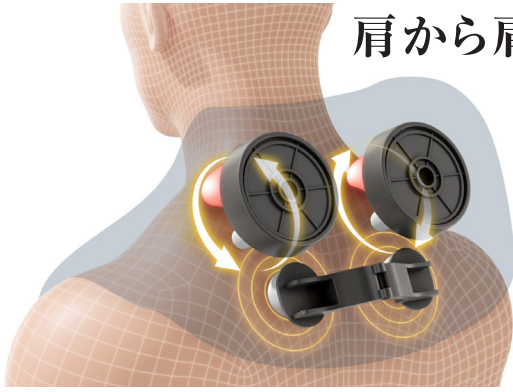

もみほぐし機能

大小2つの「突起付き回転もみ玉」が首すじから肩口にかけての筋肉を深くつかんで、ゆっくり、じっくりともみほぐします。

たたき機能

2つの「たたき専用もみ玉」が最大毎分1,000回のパワフルなたたき動作を行う「たたき専用もみ玉」が疲れを心地よくほぐします。

マッサージの速さ **2段階調節**

2段階調節持ち手ベルト

ヒーター機能

- | | |
|----------|-----------------------|
| ①「たたき」 | たたき動作の「オン/オフ」を行います。 |
| ②「速さ」 | マッサージの速さを2段階から選択できます。 |
| ③「ヒーター」 | ヒーターの「オン/オフ」が選択できます。 |
| ④「電源ボタン」 | マッサージ動作の「オン/オフ」を行います。 |

いろんな部位に使える

背中、肩、腰、足など、部位ごとをお好みでマッサージできます。



仕様

TRADY NECK フジ ネックマッサージャー T21 TR-N1

- 【仕様】
- 本体サイズ: 幅 約38.5×奥行 約18×高さ 約20cm(ベルト部分除く)
 - 質量: 約2.2kg(アダプター含まず)
 - 電源: AC100V (50/60Hz)
 - 消費電力: 24W (ヒーター5W)
 - 充電所要時間: 約3時間
 - 電池持続時間: 約100分
 - 充電回数: 約300回
 - タイマー: 約15分自動オフ
 - 付属品: ACアダプター(型番: IVP1300-3000)
 - 医療機器認証番号: 303AGBZX00096000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラウン (BR)

JANコード: 4951704134767

もみ玉カバー

ファスナーで、簡単に取り外して洗えます。



充電式コードレス

お好きな場所で使えます。



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(僞)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつ(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ●脊椎(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 **フジ医療器フリーダイヤル 0120-027-612** 受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 FAX番号 **06-4793-0818**

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本ページの記載内容は、2023年1月現在のものです。