

ニューアローラー


取扱説明書 家庭用

 形名 **ARH-810**

もくじ




安全上のご注意	1～4
各部のなまえとはたらき	5～8
お願い	6
ご使用の前に	9
エアローラーの使いかた	10～12
電位治療の使いかた	13
ヒーターマットの使いかた	14
あとかたづけ	15
お手入れと保管	15～16
修理サービスと保証	17
効能・効果	18
仕様	18

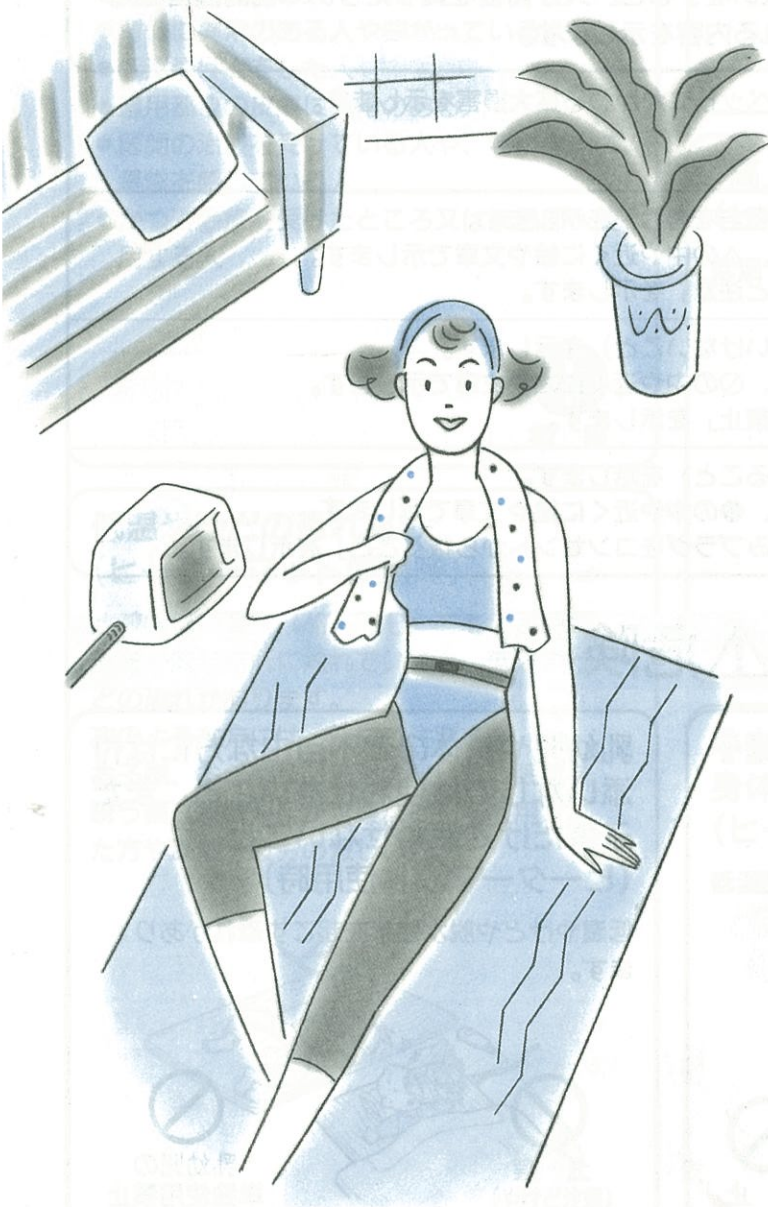- このたびは、ニューエアローラーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。






安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は、次のようになっています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 やけど注意	△は、注意（危険、警告を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「やけど注意」を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

⚠️ 危険

電位治療は、下記のような医用電子機器と併用しないこと

誤動作を招く恐れがあります。

- ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器



禁止

乳幼児や身体のご不自由な方には付添いなしでは使わせないこと また子供だけで使わせないこと (ヒーターマット使用時)

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



乳幼児の
単独使用禁止

⚠️ 警告

次の人は、必ず医師とご相談の上使用すること

体に異常がおこる場合があります。

- 悪性腫瘍のある人
- 妊産婦や生理中の人
- 熱の高い人
- 知覚障害のある人
- 急性疾患のある人
- 心臓に障害のある人
- 安静を必要とする人
- 骨粗しょう症の人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人
- 低温やけどをした人
- 適用部位の皮膚に異常のある人
- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人



相談

低温やけどの恐れあり (ヒーターマット使用時)

比較的低い温度 (40~60℃) でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。


次のような方には、特にご注意を！
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。



禁止
(やけど注意)

修理技術者以外の方は、絶対に分解や修理・改造を行わないこと

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

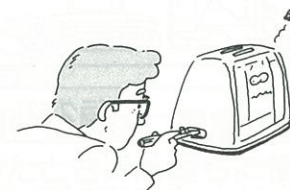

分解・修理禁止

「高」目盛で長時間使用しないこと (ヒーターマット使用時)

低温やけどの恐れがあります。



禁止
(やけど注意)

ふとんを折りたたんだり、丸めたり、身体に巻き付けて使用しないこと (ヒーターマット使用時)

低温やけどの恐れがあります。



巻き付け使用禁止

⚠️ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと

感電やショートして発火することがあります。



停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

復帰したときに危険です。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと また、濡れた手で抜き差ししないこと

感電やけがをすることがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと

感電・ショート・発火の原因になります。



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



交流100V以外では使用しないこと

火災・感電の原因となります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



治療目的以外には使用しないこと

故障や事故の原因になります。



他の治療器と同時に使用しないこと



⚠️ 注意

ストーブなどの火気の近くで使ったり、たばこをすいながら使用しないこと

火災・故障の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しないこと

故障・感電・火災・カビの原因になります。



エアバックが膨らんだ状態のときに、その上に飛び乗らないこと また立った状態では使用しないこと

転倒してけがなどをすることがあります。



使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときには直ちに使用を中止し、医師に相談すること



犬や猫などのペットの暖房用には使用しないこと
(ヒーターマット使用時)

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。



治療時間について使い始めのうちは15分以内にする こと またポイントモードでの同一箇所へのご使用は5分以内にする こと

長時間の使用は筋肉や神経を痛めることがあります。



針や刃物でふとんや接続ホース、発熱体に傷を付けないこと

火災・感電・故障の原因となります。



動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼すること

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。




コントローラーに水やお茶をこぼさないこと

万一こぼしたときは、加熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



各部のなまえとはたらき

本体パネル、リモコンについて、詳しくはP7~8をご覧ください。

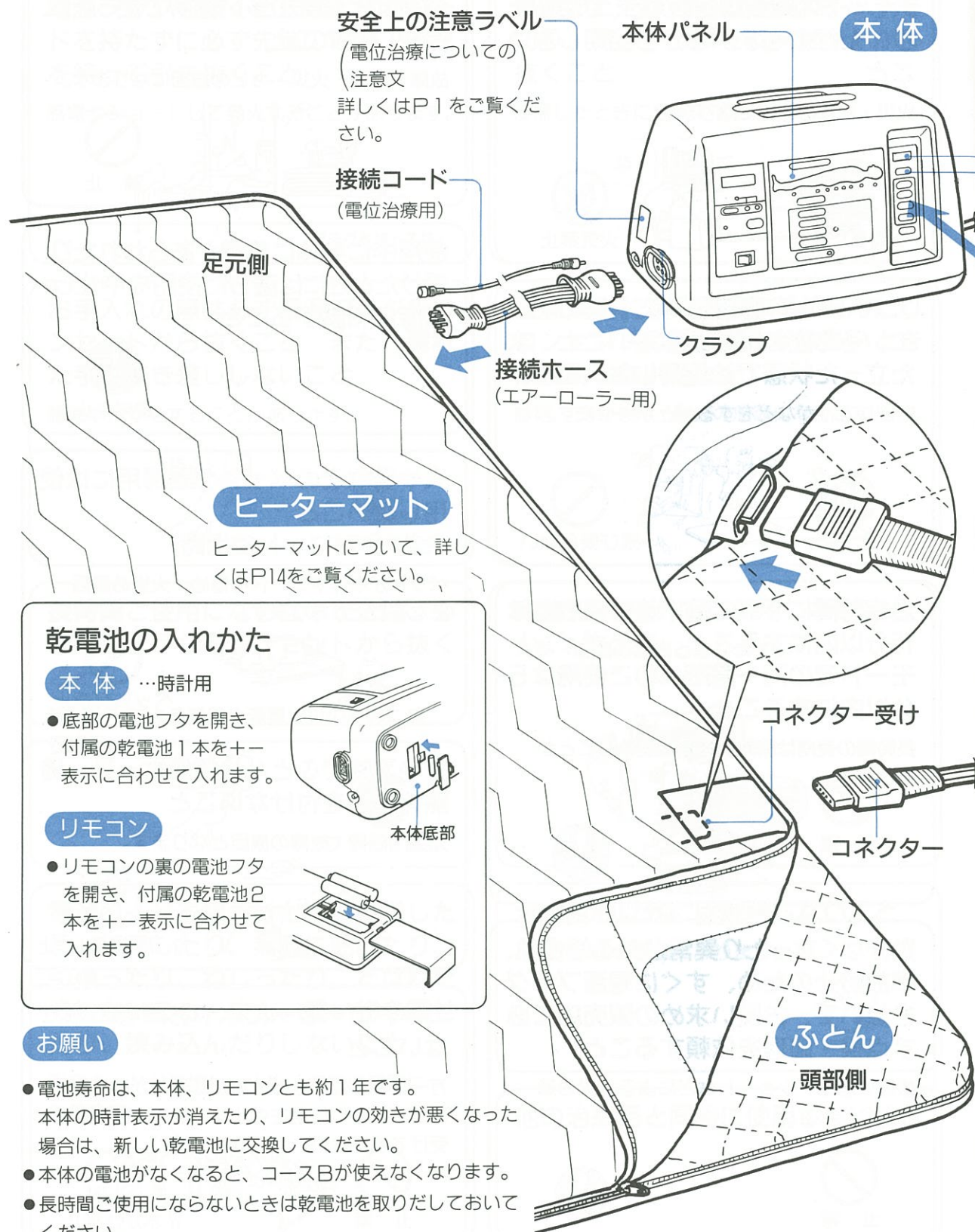

乾電池の入れかた


本体 ...時計用

- 底部の電池フタを開き、付属の乾電池1本を+表示に合わせて入れます。



リモコン

- リモコンの裏の電池フタを開き、付属の乾電池2本を+表示に合わせて入れます。

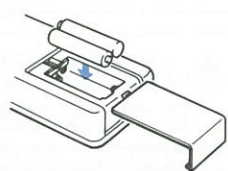


お願い

- 電池寿命は、本体、リモコンとも約1年です。本体の時計表示が消えたり、リモコンの効きが悪くなった場合は、新しい乾電池に交換してください。
- 本体の電池がなくなると、コース目が使えなくなります。
- 長時間ご使用にならないときは乾電池を取りだしておいてください。

お願い

■ 本体を傾けたり、横だおして使わないこと

- 騒音・変形、故障などの原因になります。

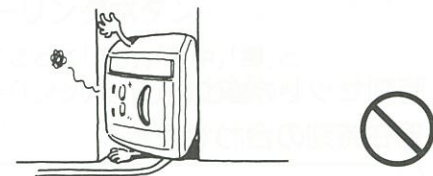

■ 本体を落としたり、本体やふとんに飛び乗るなどの、強い衝撃を与えないこと

- 故障の原因になります。




■ コードや接続ホースの扱いはていねいにすること

- 引っ張ったり、無理に折り曲げたり、本体に巻きつけたりしないでください。
- 断線、破損、本体の傷つきの原因になります。



■ 他の暖房器具と併用しないこと

- 変形、変色、故障の原因になります。

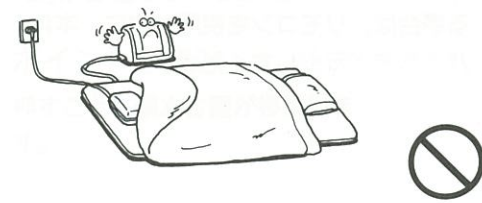

リモコン受光部

本体操作部 (リモコン収納部)

電源コード
電源プラグ

リモコン

本体に収めたままで又は離れたところから手元で操作できます。

コントローラー

ハンガー掛け

ダイヤル

「低」から「高」まで温度調節ができます。ダイヤル位置「4」の凹部は手さぐりで温度調節されるときを目安


電源プラグ

電源コード

ヒーターマット側コード


付属品

- シーツ (1枚)
- 指圧パット (一式)

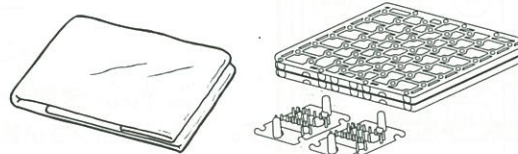

- 乾電池 (単4形3個)
- ヒーターマット



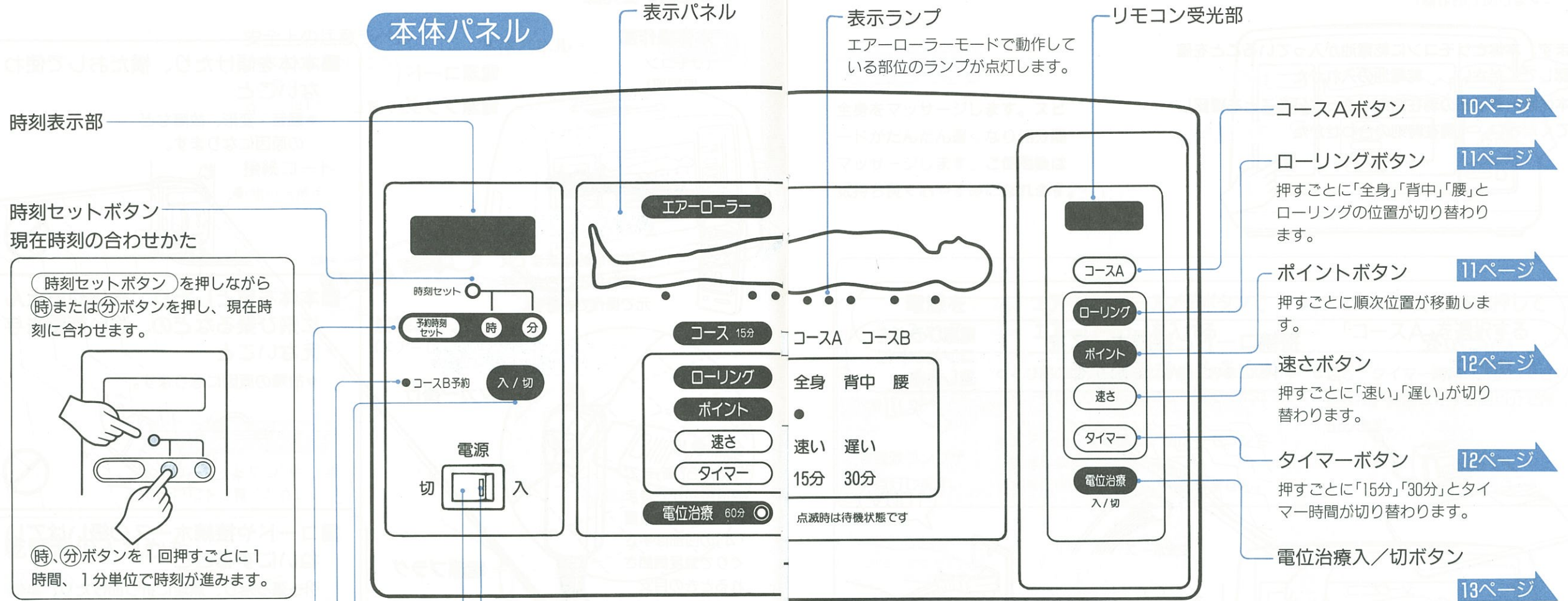


お願い

リモコンの使用について

本機を同じ部屋、または近くで2台以上同時に使用しますと、1台のリモコンで全てのエアーローラーが動作するときがあります。別々な動作モードで使用される場合は、リモコンを使用せずに、本体パネル部で操作してください。

リモコン


落とすなどの強い衝撃は与えない

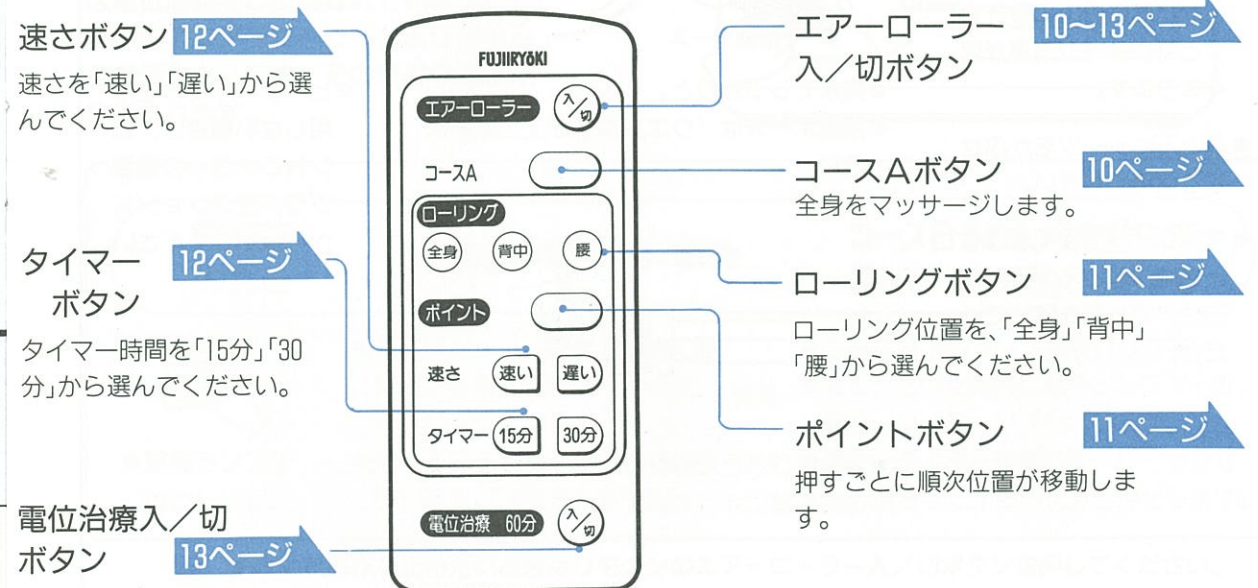

ご使用前に


- まず、本体とリモコンに乾電池が入っていることを確認してください。乾電池の入れかた **5ページ**
- 本体時刻表示部の現在時刻が合っていることを確認してください。現在時刻の合わせかた **7ページ**

1 ふとんを広げる

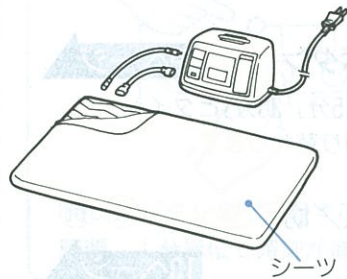


- ふとんはキルト模様を表にしてベッドや畳の上に直接敷いてください。柔らかいものの上に敷きますとマッサージ効果が弱くなります。
- ふとんにシーツをかぶせてご使用ください。
- マッサージが強く感じる時は、ふとんの上に毛布やタオル等を敷いてください。

2 接続コードと接続ホースを本体とふとんに接続する

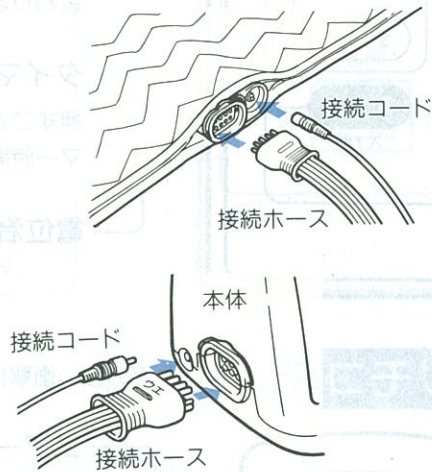

- 奥までしっかりと。
- 接続ホースは「ウエ」表示が上になるように。

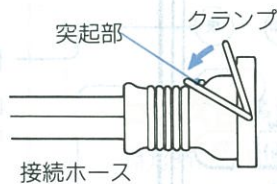

- 本体及びふとんのクランプを接続ホースの突起部にかけて固定します。

3 電源プラグをコンセントに差し込む




- ヒーターマットを使用しない場合は、コントローラーの電源プラグをコンセントから抜いてください。

エアローラーの使いかた

リモコンを収めた状態
(リモコンの後に本体
操作部があります。)

コースA

全身をマッサージします。スピードがだんだん遅くなり15分間マッサージします。ご使用後は気持ち良くおやすみになれます。

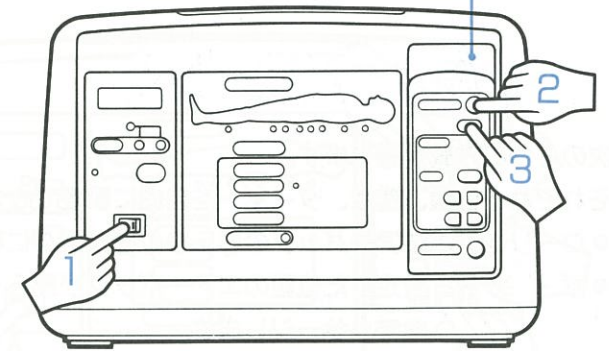

1 電源を入れる



- 電源ランプが点灯します。

2 エアローラー入/切ボタンでエアローラーを入れる


- くび部のエアバックが膨らみますので、くびの位置を合わせて寝てください。
- エアローラーの入/切はリモコンで操作します。本体には、このボタンはありません。

3 コースAボタンを押して「コースA」を選択する

- 速さ、タイマー時間の選択はできません。開始してから約15分で停止します。

コースB

タイマーで予約した時刻からコースBが開始し、15分間マッサージします。予約された時刻にエアローラーまたは電位治療をご使用されていますとご使用中のエアローラーおよび電位治療が優先されます。その日の予約は取り消されます。

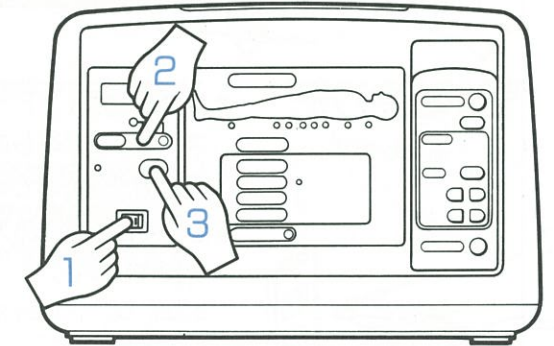

1 電源を入れる



- 電源ランプが点灯します。

2 予約時刻をセットする

- 予約時刻セットボタンを強く押しながら(時/分)のボタンを押して時刻を合わせてください。
- 軽く押しすと▶マークが表示され予約時刻が確認できます。

3 コースB予約入/切ボタンを押して「コースB」を予約する

- コースB予約ランプが点灯します。
- セットされた時刻になると、ブザーが鳴り、マッサージが始まります。
- 速さ、タイマー時間の選択はできません。開始してから約15分で停止します。

お願い

- 途中で動作を止めたいときはリモコンのエアローラー入/切ボタンを押してください。
- コースBは電源を切らない場合は毎日予約されています。

お好みのマッサージ

次の2つの方式が選べます。

それぞれ、位置、速さ、タイマーを自由に設定できます。

- ローリング：エアバックの膨らむ位置が順々に移動してマッサージします。
- ポイント：設定した位置のエアバックが膨らんだりしぼんだりして、一か所をマッサージします。

ローリングコース

ポイントコース

1 電源を入れる



- 電源ランプが点灯します。

2 リモコンのエアローラー入/切ボタンを押す



- くび部のポイントモードになり、エアバックが膨らみますので、くびの位置を合わせて寝てください。
- エアローラーの入/切はリモコンで操作します。
本体には、このボタンはありません。

途中で止めたいとき

- 途中で動作を止めたいときは、リモコンのエアローラー入/切ボタンを押してください。
- エアローラー使用中に本体の電源スイッチを切ると、エアバックが膨らんだままになります。このときは、ふとんから接続ホースをはずしてください。

3 ローリングボタンを押して位置を選ぶ



- 本体表示パネルの選択された位置が点灯します。
- 本体のローリングボタンを押すと、上のように、順に位置が切り替わります。


3 ポイントボタンで位置を選択します

- 本体表示パネルの選択されたポイントが点灯します。
- 押すごとに足部からくび部まで移動します。

⚠ 注意



使い始めのうちは15分以内にする
こと
また同一箇所への
使用は5分以内にする
こと

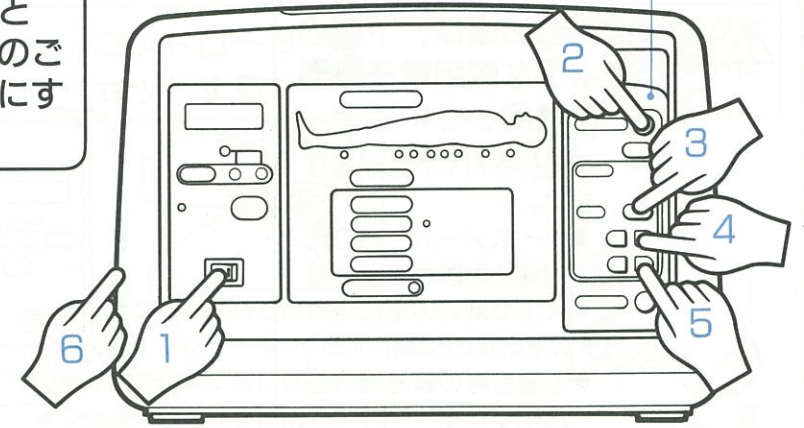

リモコンを収めた状態
(リモコンの後に本体)
操作部があります。

4 速さボタンを押して速さを選ぶ



- 本体表示パネルの選択された速さが点灯します。
- 初めは「速い」に設定されています。
- 本体の速さボタンを押すと、交互に速さが切り替わります。

5 タイマーボタンを押して時間を選択する




- 本体表示パネルの選択された時間が点灯します。
- 初めは「15分」に設定されています。
- 本体のタイマーボタンを押すと、交互にタイマー時間が切り替わります。

6 電源を切る



- 電源ランプが消えます。

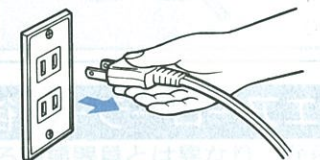

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。

電位治療の使いかた

エアローラーと同時に使用できません。


⚠危険 電位治療は、下記のような医用電子機器と併用しないこと

誤動作を招く恐れがあります。

- ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器



禁止

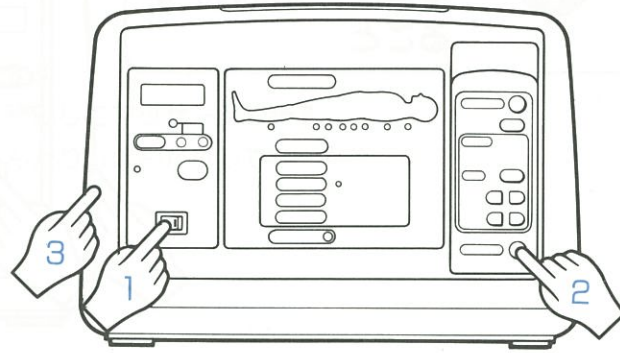

1 電源を入れる



- 電源ランプが点灯します。


2 電位治療入/切ボタンを押す

- 本体表示パネルのランプが緑に点灯します。
- 開始してから約60分で停止します。
- 途中で止めたい場合は再度電位治療入/切ボタンを押します。
- 電位治療中にエアローラー入/切・コース・ローリング・ポイントボタンを押すと、電位治療は停止し、エアローラーに切り替わります。

3 電源を切る



- 電源ランプが消えます。

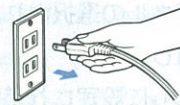

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。

エアローラーの後に電位治療をしたいとき

- エアローラー動作中に電位治療入/切ボタンを押すと、本体表示パネルのランプが緑色に点滅し待機状態になります。
- 電位治療が待機状態のとき、エアローラー入/切ボタンを押すと、エアローラーが停止し、電位治療が開始します。
- エアローラーの動作が終了すると、電位治療が自動的に始まり、ランプは点灯します。

待機状態

電位治療 60分



点滅

治療開始

電位治療 60分



点灯


ヒーターマットの使いかた

1 ヒーターマットをふとんにセットする




- キルト模様を表にしてふとんを広げます。
- ヒーターマットをふとんにコネクタ受けが見えるように途中までファスナーで取りつめます。
- ヒーターマットの上からシーツをかぶせてご使用ください。

2 コントローラーをセットする

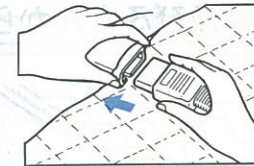


- コネクタを接続します。コネクタの凸部をコネクタ受けの凹みに合わせ、根元まで確実に差し込みます。
- ファスナーを完全に閉めます。
- コントローラーはふとんや他の熱源から離しておきます。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

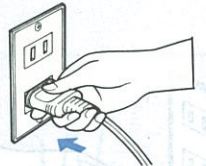


4 ダイヤルを「高」に合わせ予熱する

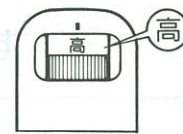



- おやすみになる30分以上前（寒冷地やからだの冷えている時は1時間以上前）にふとんを暖めてください。

5 ダイヤル目盛「2」～「4」で使う

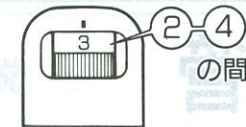

- 寝汗をかいたり、のどがかわいたり、起きたあとだるいときはダイヤル目盛が高すぎます。おやすみのときは、ダイヤル目盛を「4」以下にさげます。(体温より低い温度が睡眠には適しています。)

6 使用後ダイヤルを「切」にし電源プラグを抜く

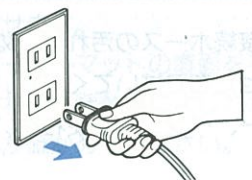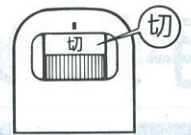

メモ

ヒーターマットはカーッと熱くはなりません

- ヒーターマットは、あんかやこたつなど部分的に暖める暖房器具とは異なり、からだ全体をほんのりした暖かさでつつみ、快適に安眠していただく保温器具です。



室温センサーの働き


- 室温の変化を感知し、ヒーターマット温度をお好みの温度に保つように自動調整します。たとえば明けがた室温がさがっても発熱体の温度が自動的に高まり、寝床の中をお好みの温度に保つので、高目の目盛にセットする必要がありません。
- コントローラーをふとんの中などに入れると、温度調節が働かないことがあります。ふとんなどがかからないようにしてください。

お願い


- ヒーターマットはニューエアローラー専用ですのでニューエアローラー以外には使用しないでください。

あとかたづけ


1 電源プラグをコンセントから抜く

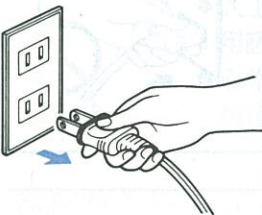


2 クランプを外し、接続ホースおよび接続コードを本体及びふとんから抜く

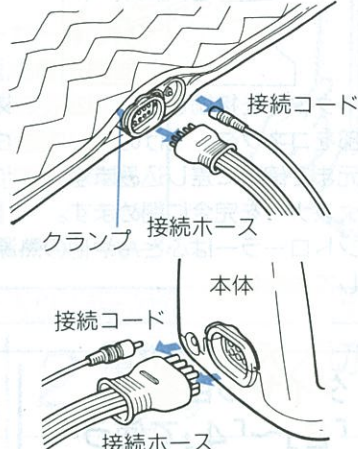

3 ふとんを折りたたんで収納する



● 折りたたむ時は、図のように裏を外側にして3つ折りにしてください。



● S字には折りたたまないでください。折りぐせが強くなります。


お手入れと保管

本体・リモコン・ふとんのお手入れ


本体や接続ホースの汚れは、ぬるま湯かせっけん液を含ませた布で拭いてください。シンナー、ベンジンは使わないでください。




ふとんカバーの汚れはお湯をしめらせた布で拭き取った後、乾拭きをしてください。汚れがひどい場合はふとんカバーをはずし、ドライクリーニングをしてください。

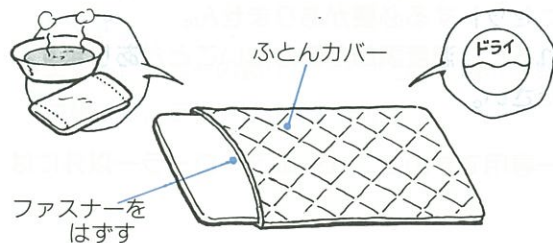

保管するときは、各部の汚れをとった後直射日光の当たる場所や湿気の高い場所はお避けください。

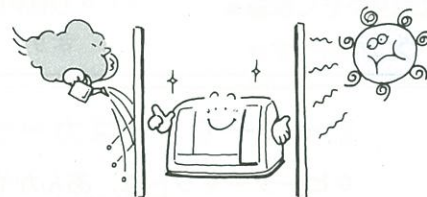



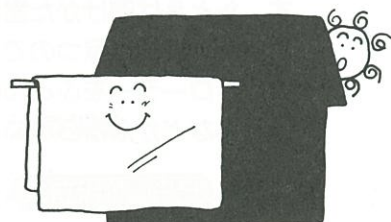



ふとんは衛生上ときどき乾燥(陰干し)してください。直射日光にはあてないでください。ふとん乾燥機は使用しないでください。




ヒーターマットの洗たく

発熱体をいためたり、温度調節機能が異常をおこさないために次の手順や注意事項を守ってください。

 弱い手洗いでおこなってください。	 漂白剤は使えません。	 アイロンはかけないでください。	 ドライクリーニングはしないでください。	 ねじりしぼりはしないでください。	 自然乾燥をしてください。
---	---	--	--	---	---

1 準備


- 30°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤をとします。入浴剤の入ったお湯は使わないでください。



幅2つ折り 縦4つ折り

- 図のようにたたみます。

2 洗い

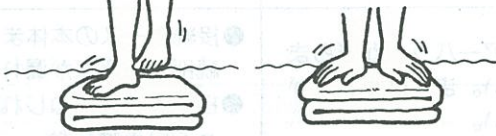


踏み洗い 押し洗い

- 汚れがひどいときは、もう一度洗剤液をつくり2度洗います。

3 すすぎ

- 洗剤が残らないように十分すすぎます。
- 静電気防止のために、柔軟仕上げ剤を使います。
- コネクター受け部のみ、再び清水ですすぎます。

4 脱水

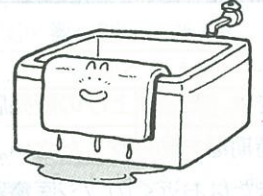


- 浴槽のふちなどにかけて水をきります。

5 乾燥・確認

- 日当たりのよい場所で自然乾燥させます。
- ヒーターマットの裏面を手でさわって、発熱体によじれがないか確かめてください。

ヒーターマットの保管のしかた

- 乾燥させてください。
- 使用中に水分を吸収していることがあるので、日なたで十分乾燥させ、表面のほこりを取りのぞいてください。
- お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところにおしまいください。(ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください)

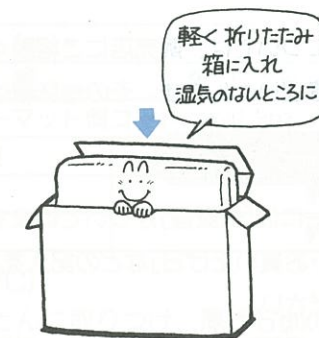

修理サービスと保証

修理サービスを依頼する前に

使用中に異常が生じたときは次の点をお調べください。

このようなとき	次の点をお調べください。	
電源ランプが点灯しない。	●電源プラグが抜けていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
リモコンが動作しない。 (ボタン操作時ブザー音がしない。)	●リモコンに乾電池が入っていますか。 ●電池がなくなっていないですか。 ●本体リモコン受光部が操作方向に直面していますか。	●乾電池を入れてください。 ●新しい乾電池と交換してください。 ●受光部を対面させてください。
エアバックが膨らまない。または膨らみが悪い。	●接続ホースの本体または布団との接続部から空気が漏れていませんか。 ●接続ホースがねじれたり、折れ曲がっていませんか。	●接続ホースをしっかり接続してください。 ●ねじれや折れ曲りを直してください。
コースBが作動しない。	●希望する予約時刻にセットされていますか。 ●コースB予約ランプが消えていますか。	●希望する予約時刻をセットしてください。 ●コースB予約入/切ボタンを押してください。
時計が作動しない。	●本体底面の電池収納部に乾電池が入っていますか。 ●電池がなくなっていないですか。	●乾電池を入れてください。 ●新しい乾電池と交換してください。
ヒーターマットが暖かにならない。	●コネクターがコネクター受け部に確実に差し込まれていますか。	●コネクターを奥まで確実に差し込んでください。

修理サービスについて

上の表でお調べいただいても異常があるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

このとき、形名ARH-810と、お買い上げ時期をお知らせください。

その他ご不明の点は、お買い上げの販売店またはお近くのフジ医療器サービス網にご相談ください。

- ニューエアローラーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証(保証書)について

このニューエアローラーには「保証書」がついています。

- 保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。
- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。
- 保証期間…お買い上げの日から1年間です。

警告 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理は行わないこと
発火したり、異常動作して分解・修理禁止 けがをすることがあります。

効能・効果

マッサージ効果

按摩、マッサージの代用

疲労回復
血行をよくする
筋肉の疲れをとる
筋肉のこりをほぐす
神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



電位治療効果

肩こり、頭痛、不眠症、慢性便秘



仕様

品名	ニューエアローラー	形名	ARH-810
定電	AC100V 50-60Hz	定格時間	30分
格消費電力	エアマッサージ器：40W/37W (50Hz/60Hz) 電位治療器：3W		
タイマー	エアマッサージ器：約15分、約30分 選択可能「コース」は15分のみ 電位治療器：約60分		
エアローラー	「コース」：コースA、コースB 「ローリング」：全身、背中、腰 「ポイント」：8箇所		
速さ	速い、遅い 2段階(コースは除く)		
ふとん素材	ポリエステル(麻混10%) 充填物：ウレタンフォーム		
寸法	本体：約 幅364×奥行230×高さ232 (mm) ふとん：約 幅1000×奥行2000×厚み56 (mm)		
重量	本体：約6.5kg ふとん：約5.9kg		
電源コード	約2.3m	電位出力電圧	約-600V
接続ホース	約1.6m	接続コード	約1.6m
付属品	シーツ(1枚) 指圧パット(一式) 乾電池(単4形 3個) ヒーターマット		
医療用具承認番号	(07B)1119		

ヒーターマット

定格	AC100V 55W (50-60Hz 共用)		
生地(カバー部)	ポリエステル100%		
寸法	約 幅1000×奥行2000×厚み10 (mm)		
発熱体	ビニル被覆式ヒーター	重量	約2.3kg
コード	電源コード：約3.8m ヒーターマット側コード：約0.8m		
ダイヤル目盛	ヒーターマット表面温度	標準消費電力量(1時間あたり)	
高	約50°C	約35Wh	
4	約37°C	約25Wh	

- 温度はJIS C9210に基づく測定値です。(室温20°C)
- 標準消費電力量は室温10°Cでヒーターマットをふとんに取りつけ、厚さ5cmのかけふとんを用い8時間通電したときの平均値です。