

# FUJIIRYŌKI

家庭用

## PeaceSleepDX

エアーマッサージ器

形名：DF-513

取扱説明書


添付文書

医療機器認証番号：222AGBZX00297A01

類別：機械器具 78 家庭用電気治療器

管理医療機器

一般的名称：電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器  
(コード 71003000)

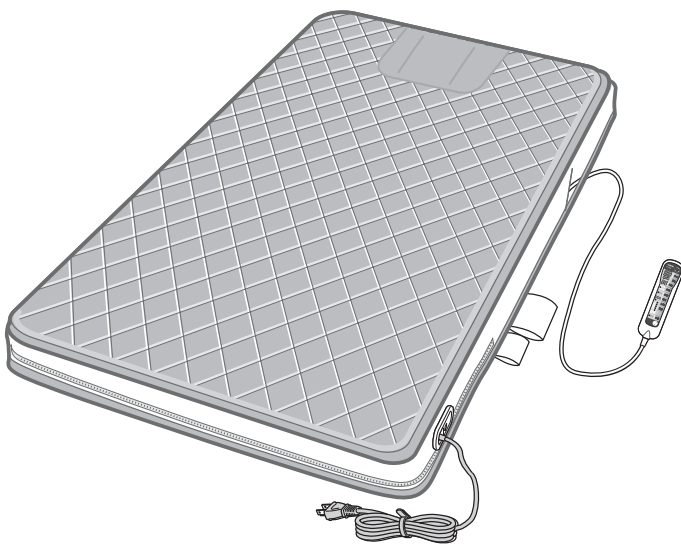

### もくじ

|               |       |
|---------------|-------|
| 安全上のご注意       | 1~4   |
| 特長            | 5~6   |
| 各部のなまえとはたらき   | 7~8   |
| マッサージの種類と内容   | 9~10  |
| ご使用の前に        | 11~12 |
| マッサージを使うとき    | 13~18 |
| 除湿機能を使うとき     | 19    |
| ヒーターを使うとき     | 20    |
| 電位治療器を使うとき    | 21    |
| あとかたづけ        | 23    |
| お手入れ          | 24    |
| 保管            | 25    |
| 仕様            | 25    |
| 修理サービスを依頼する前に | 26    |
| 愛情点検          | 26    |
| 保証とアフターサービス   | 裏表紙   |

### 使用目的・効能または、効果



電位治療器  
頭痛、肩こり、不眠症および  
慢性便秘の緩解  
電気マッサージ  
あんま、マッサージの代用  
一般家庭で使用すること

- このたびは、エアーマッサージ器をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(1~4ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・ご購入先名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。

# 安全上のご注意



必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。                      |
|  <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるかまたは、<br>*物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。 |

\* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

## ＜絵表示の例＞

|  |  |
|--|--|
|   | ⊘ 記号は、 <b>禁止</b> の行為であることを告げるものです。<br>図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。                            |
|  | ● 記号は、行為を <b>強制</b> したり <b>指示</b> したりする内容を告げるものです。<br>図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。 |

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

## お願い

- 機器本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせ下さい。

## 警告



禁止

次のような人は付添いの人がいない場合、使用しない

- お子様
  - ご自分で意思表示のできない人
  - ご自分で操作できない人
- 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

### 低温やけどについて

- 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一赤い斑点や水ぶくれができたときには直ちに専門医の診察を受けてください。



禁止

電位治療は、次のような医用電気機器と併用しない

- 誤作動を招くおそれがあります。
- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電波障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
  - 心電計などの装着型の医用電気機器



禁止

心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない



禁止

ヒーターは設定温度「4」以上で長時間使用しない

また、同一箇所に長時間触れさせない  
 比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間、皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります  
 次の人がお使いのときは、まわりの人が特に気をつけてください

- お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節ができない人
- 皮膚や皮膚感覚の弱い人
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された人
- 深酒・疲労の激しい人
- 血行障害(糖尿病など)の人
- 医師より注意を受けている人

## 警告



禁止

### 次の人は、使用しない

身体に異常が起こる場合があります。

- 医師からマッサージを禁じられている人  
(例：血栓症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)



分解禁止

### 分解・改造・修理をしない また、内部カバーのファスナーを開けない

火災や感電・けがの原因になります。



禁止

### 浴室など湿気の多い場所で使用したり、 保管しない

感電や火災・故障・カビの原因になります。



禁止

### 子供だけで使わせたり、自分で意思表示 出来ない人には使用させない また、幼児を近づけない

感電やけがの原因になります



禁止

### 交流100V以外は使用しない

火災や感電の原因になります。



禁止

### 不安定なベッド、台、布団などの上では 使用しない

事故や故障の原因になります。  
凹凸のない水平な場所で使用してください。



禁止

### 本体を折りたたんだり、丸めたり、身体 に巻き付けて使用しない

低温やけどや事故・故障の原因になります。



禁止

### 電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない

電源コードや電源プラグが破損した場合、ご購入先または「お客様相談窓口」に修理を依頼する

そのまま使い続けると感電やショート・火災の原因になります。



禁止

### 電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

### 除湿機能は人やものが乗った状態では 使用しない

ヒーターの温度設定が「5 (高)」の固定になり、長時間の使用で低温やけどのおそれがあります。



確認する

### ご使用前に布団のカバーに破れがないか確認する (小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源 プラグを抜き、修理を依頼して下さい)

カバーが破れた上体で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



医師に相談

### 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用する 身体に異常が起こる場合があります。

- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 妊娠中の人または、出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、急性疾患(疼痛性)のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 体温38℃以上(有熱期)の人  
(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 心臓に障害のある人
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 背骨(脊椎)に異常のある人や曲がっている人
- 知覚障害の人
- 貧血症の人
- かつて治療を受けたところまたは、疾患部へ使用する人
- 安静を必要とする人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 高血圧の人
- 不整脈のある人
- 喘息の人
- 睡眠時無呼吸症の人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人



プラグを  
抜く

### 動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼する

感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。



プラグを  
抜く

### おねしょ等で本体が濡れた場合は、すぐに電源プラグを抜く

漏電やショートなどによる火災・感電の原因になります。ご購入先に点検・修理を依頼してください。

## ⚠ 注意



禁止

**駆動部や制御部に頭を載せて使用しない**  
気分が悪くなったり、けがの原因になります。  
頭部側と足元側を逆にして使用しないでください。



禁止

**電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやごみを付着させない**  
感電やショート・発火の原因になります。



禁止

**本体を干す場合は、もの干し竿などに干さない**  
落下によるけがや故障の原因になります。



禁止

**湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか、その他の暖房器具と併用し、高温になる状態での使用はしない**  
火災や変形、変色、故障の原因になります。  
本体内部の保護装置が動作し、通電を停止することがあります。  
この場合、約2時間後に復帰します。



禁止

**首・肩マッサージ部に手や指を入れない**  
挟まれ、けがの原因になります。



禁止

**本体やリモコンに水やお茶をこぼさない**  
感電や故障の原因になります。  
万一、こぼしたときは使用を中止し、ご購入先に点検・修理を依頼してください。



禁止

**ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない**  
火災や故障の原因になります。



禁止

**本体の上に飛び乗ったり、遊んだりしない  
また、人が立った状態では使用しない**  
転倒してけがの原因になります。



禁止

**本体を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突きさしたりしない**  
けがや故障の原因になります。



禁止

**リモコンコード、電源コードに足を引っ掛けないように気をつける**  
けがのおそれがあります。



禁止

**駆動部、制御部、バイブレータ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない**  
けがや破損・故障の原因になります。



禁止

**リモコンや本体に重い物を置いたり、落としたり、強い衝撃を与えない**  
感電や火災・故障の原因になります。



禁止

**本体内部の駆動部、制御部につまつかない**  
けがの原因になります。



禁止

**頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない**  
けがのおそれがあります。



禁止

**ヒーターは犬や猫などのペットの暖房用には使用しない**  
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。



禁止

**本機をご使用になりながら他の治療器を同時に使用しない**



禁止

**ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない**  
感電や引火の原因になります。



禁止

**2人以上で使用しない**  
故障やけがのおそれがあります。



禁止

**マッサージの目的以外には使用しない**  
故障や事故の原因になります。

## ⚠ 注意



禁止

**マッサージ中にうつぶせで使用しない**  
内臓を圧迫する使用法はしないでください。  
事故や体調不良の原因になります。



ぬれ手禁止

**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**  
感電の原因になります。



禁止

**飲酒後の使用はしない**  
事故やけがのおそれがあります。



禁止

**食後すぐに使用しない**  
気分が悪くなることがあります。



禁止

**本体に人や物を乗せて移動させない**  
けがや故障の原因になります。



禁止

**子供に本体の上で遊ばせない**  
けがや故障の原因になります。



禁止

**付属品以外は使用しない**  
故障の原因になります。



禁止

**本体は、洗わない**  
故障や感電・火災の原因になります。



禁止

**マッサージの使用中は眠らない**  
無意識での使用は、体調不良の原因になります。



医師に相談

**使用しても効果が現れない場合、医師または、専門家に相談する**



確認する

**操作スイッチ、タイマーなどが正常に動作することを確認する**  
事故や故障の原因になります。



医師に相談

**使用中に身体に異常が現れたり、感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談する**



確認する

**しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する**  
事故やけがのおそれがあります。



気をつける

**首・肩のマッサージをするときは、マッサージ部と首の位置関係に気をつける**  
首の前部などに力が加わると、事故やけがの原因になります。



8時間以内

**電位治療は、1日8時間以内にする**  
守らないと体調不良のおそれがあります。



15分以内

**マッサージは1回15分以内にする**  
長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。  
1日の使用は30分以内にしてください。



刺激を弱める

**マッサージが強すぎると感じたときは刺激を弱めるか、使用を中止する**  
強すぎるマッサージは筋肉や神経を傷める場合があります。



プラグを抜く

**異常な臭いがしたり、異常音がしたり、発煙したときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜く**  
そのまま使用すると、火災の原因になります。  
ご購入先に点検・修理を依頼してください。



プラグを抜く

**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く**  
また、濡れた手で抜き差ししない  
感電やけがのおそれがあります。



プラグを抜く

**使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く**  
ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く**  
感電やショートして発火することがあります。




プラグを抜く

**停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く**  
再通電されたとき事故の原因になります。

# 特長


エアーマッサージと振動マッサージをコンパクトに内蔵し、さらに電位治療もできる寝具タイプのマッサージ器です。

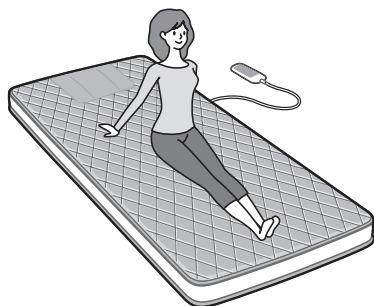


エアーマッサージには3種類の「自動コース」と、2種類の「部位コース」さらに「パイプコース」があります。

- 自動コース
- おやすみ前
  - おめざめ後
  - ゆったり
- 部位コース
- 首・肩
  - 背・腰
- パイプコース
- パイプ

全身対応マッサージ!

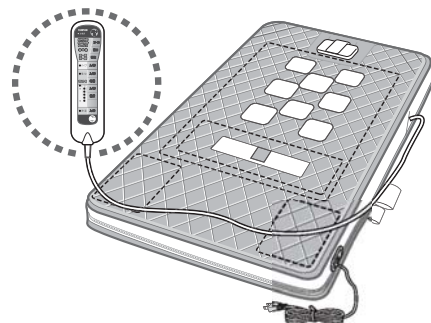


「ふくらはぎ」から「首・肩」まで全身対応のマッサージ器です。

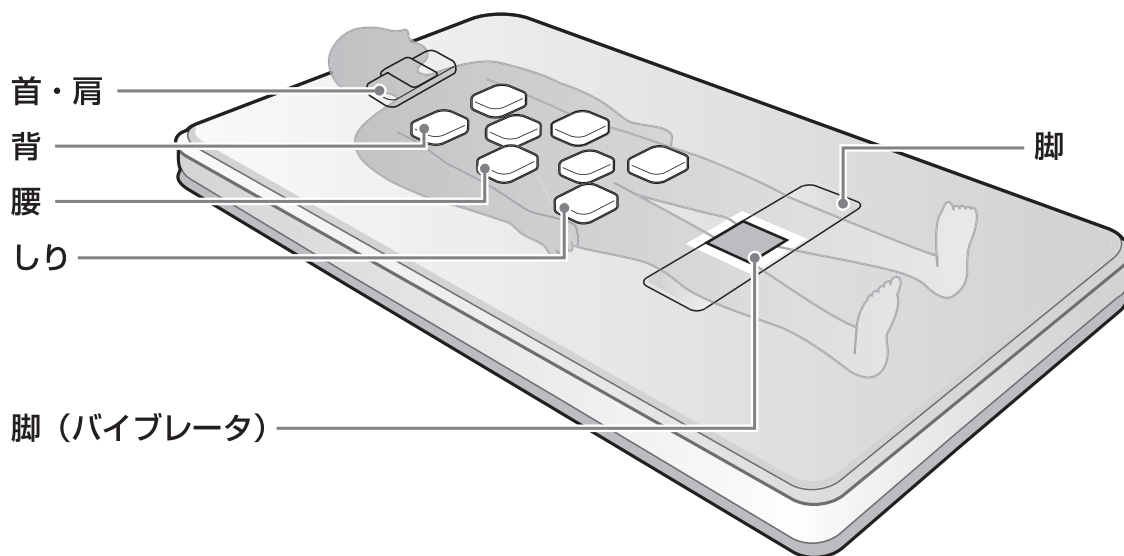


多彩な「ひねり」と「ストレッチ」で全身をマッサージします。

背ストレッチ

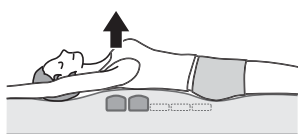


上側3箇所ストレッチ

腰ストレッチ

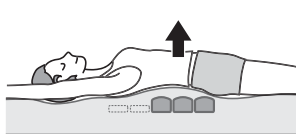


下側5箇所ストレッチ

背筋ひねり

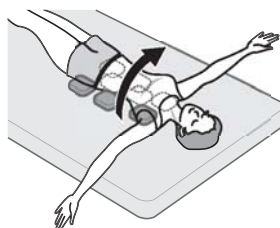


片側全体がひねられます

背腰対角ひねり

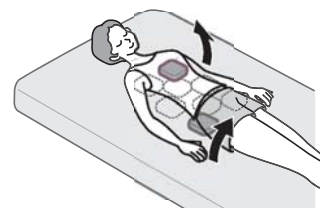


背中と腰が対角にひねります

表示が見やすく、使いやすいリモコンです。

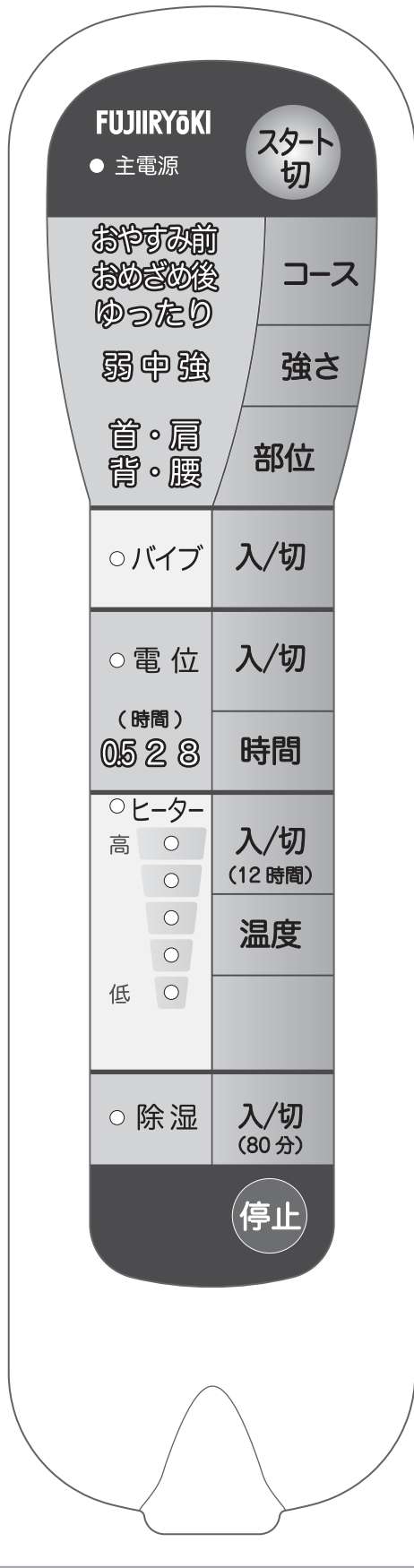

温度調整ができるヒーター付きです。

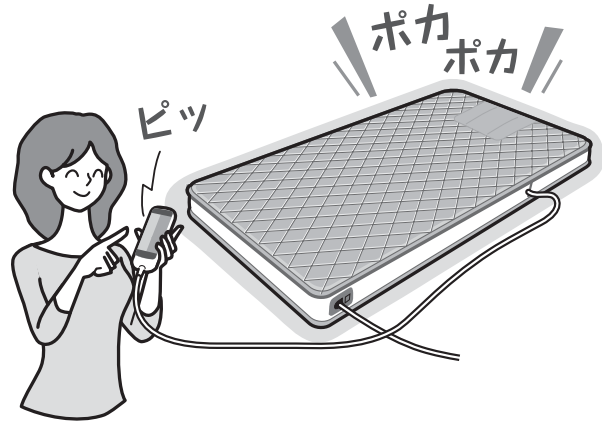

## 使用目的、効能又は効果

### マッサージ機能

- あんま、マッサージの代用
- 一般家庭で使用すること


### 電位治療機能

- 頭痛、肩こり、不眠症および慢性便秘の緩解
- 一般家庭で使用すること


# 各部のなまえとはたらき

## 本体

### 使用状態

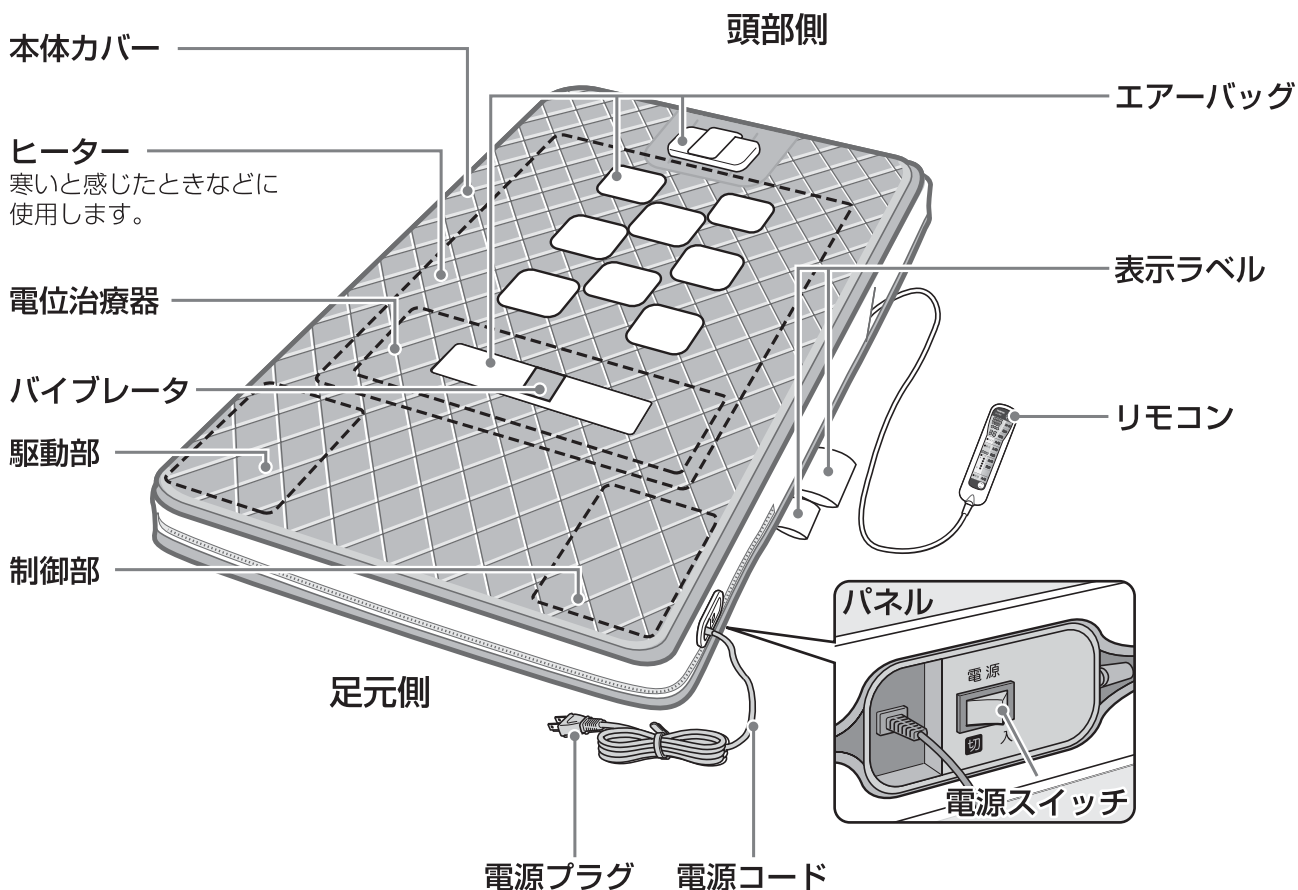

### 折りたたみ状態

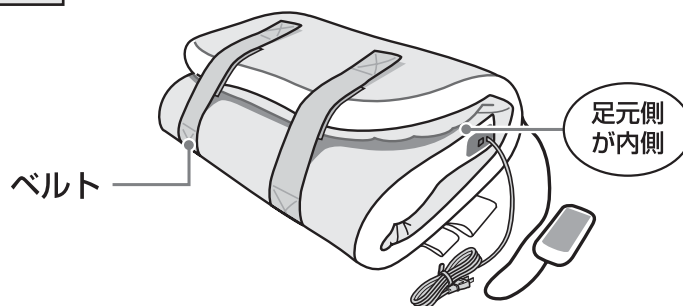

## 付属品

### 専用シート (CF-12MG)

この専用シートはご家庭で洗濯できます。  
※消耗性部品



# リモコン

## 主電源ランプ

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入ると点灯します。

12

## 自動コース表示ランプ

選択されたコースが点灯します。

9 14

## 強さ表示ランプ

選択された強さが点灯します。

14 16

## 部位コース表示ランプ

選択されたコースが点灯します。

10 16

## バイブレータ

### 入/切ボタン

バイブレータの「入/切」を切り替えます。

### 表示ランプ

バイブレータが動作すると点灯します。

10 17

## 除湿

### 入/切ボタン

除湿の「入/切」を切り替えます。

### 表示ランプ

除湿が動作すると点灯します。

19

※他の機能と同時に使用できません。  
人やものが乗った状態では使用できません。

## 停止ボタン

ただちにすべての動作を止めます。

13 15 18

## スタート/切ボタン

エアーマッサージの「入/切」を切り替えます。

13 15

## 自動コース選択ボタン

「おやすみ前」「おめざめ後」「ゆったり」の3種類のコースが選べます。

9 14

## 強さ選択ボタン

「弱」「中」「強」のマッサージ強さが選べます。

14 16

## 部位コース選択ボタン

「首・肩」「背・腰」の2種類のコースが選べます。

10 16

## 電位治療

### 入/切ボタン

電位治療の「入/切」を切り替えます。

### 設定時間ランプ

選択された電位治療の設定時間を表示します。

### 時間設定ボタン

押すごとに設定時間が「0.5時間(0.5)」「2時間(2)」「8時間(8)」と設定できます。

21 22

## ヒーター

### 入/切ボタン

ヒーターの「入/切」を切り替えます。


### 設定温度ランプ

選択されたヒーターの設定温度を表示します。

### 温度設定ボタン

押すごとに5段階の設定温度が選べます。

20

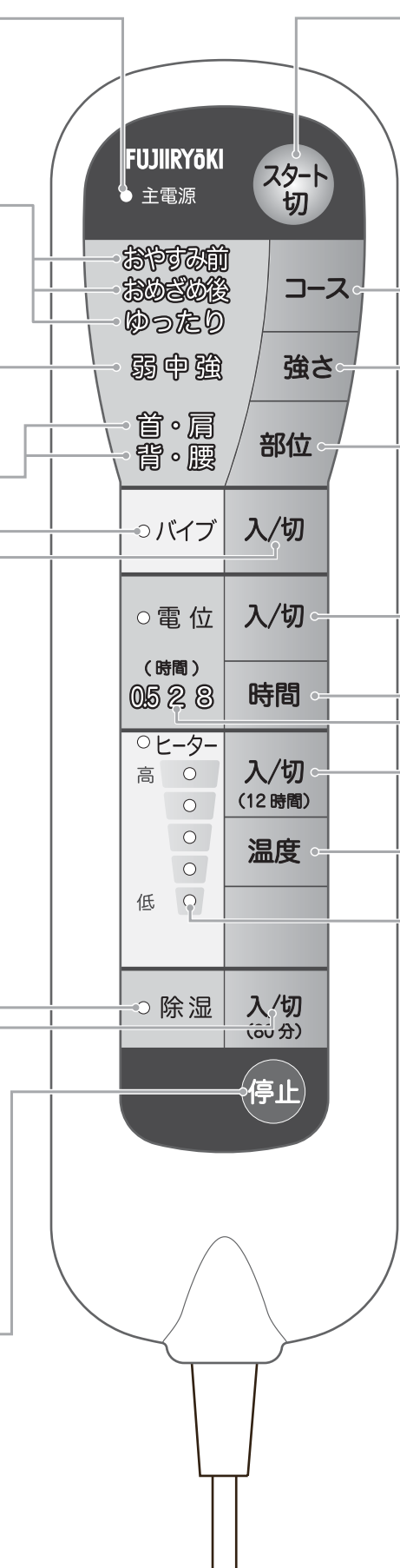

# マッサージの種類と内容

「自動コースマッサージ」「部位コースマッサージ」「バイブマッサージ」があります。

## 自動コースマッサージ

コース選択ボタン

おやすみ前  
おめざめ後  
ゆったり

コース

ボタンを押すたびに、「おやすみ前」「おめざめ後」「ゆったり」が切り替わります。

### ●おやすみ前

睡眠の前に

足元から上半身へのストレッチマッサージにより下半身の血行を促進して疲れを癒すコースです。

### ●おめざめ後

睡眠から目覚めたあとに

上半身から足元へのストレッチマッサージによりお目覚め後の使用に適したコースです。


### ●ゆったり

ゆっくり、リラックスしたい時

筋肉のコリを解きほぐすストレッチマッサージとひねりを組み合わせたコースです。

## マッサージ使用時のお願い

マッサージは、30分を超えて使用しないでください。この製品には加熱保護装置があり、30分以上の連続使用や高温の場所での使用の場合、マッサージの動作が停止する場合があります（このときリモコンの表示はそのままです）が故障ではありません。このようなときは電源コードを抜き、冷えるまで約2時間お待ちください。加熱保護装置が解除され、再び使用できます。

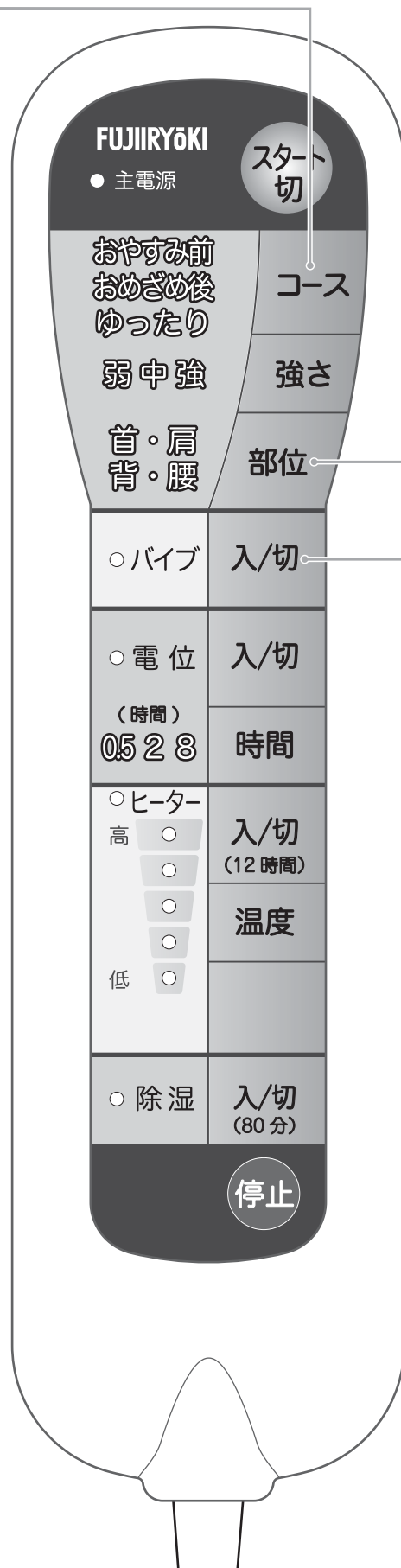

## 部位コースマッサージ

### 部位選択ボタン

首・肩  
背・腰

部位

ボタンを押すたびに、  
部位コースマッサージの「首・肩」「背・腰」が切り替わります。

### ●首・肩

首・肩のこりが気になるかたに


エアーにより、特に「首・肩」を重点的にマッサージします。

### ●背・腰

背・腰のこりが気になるかたに

エアーにより、特に「背・腰」を重点的にマッサージします。

### 背・腰コースのマッサージ位置

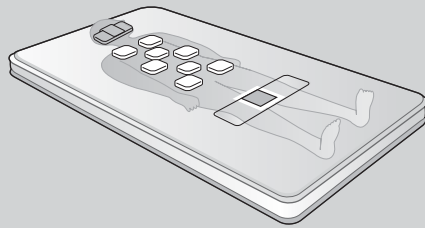

背・腰コースは、腰をより高く持ち上げるために横たわる位置を 20cm ほど足側に設定しています。  
他のコースのときより 20cm ほど足側に横たわってください。

## バイブマッサージ

### バイブボタン

入/切

ボタンを押すたびに、  
バイブレータの「入」「切」が切り替わります。

強さがゆるやかに増加する振動マッサージをします。

# ご使用の前に

- 折り曲げたまま使用しないでください。
- しばらく使用しなかった後使用するときは、正常に作動することを確認してから使用してください。

## 警告



不安定なベッド、台、布団などの上では使用しない

禁止

事故や故障の原因になります。  
凹凸のない水平な場所で使用してください。




浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない

禁止


感電や火災・故障・カビの原因になります。

## 1 本体を広げる

上向きに寝たときに、電源コードのある方を足元にする

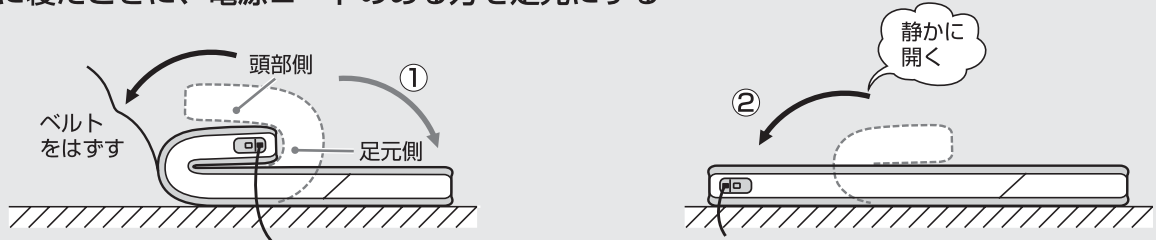

- 折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。


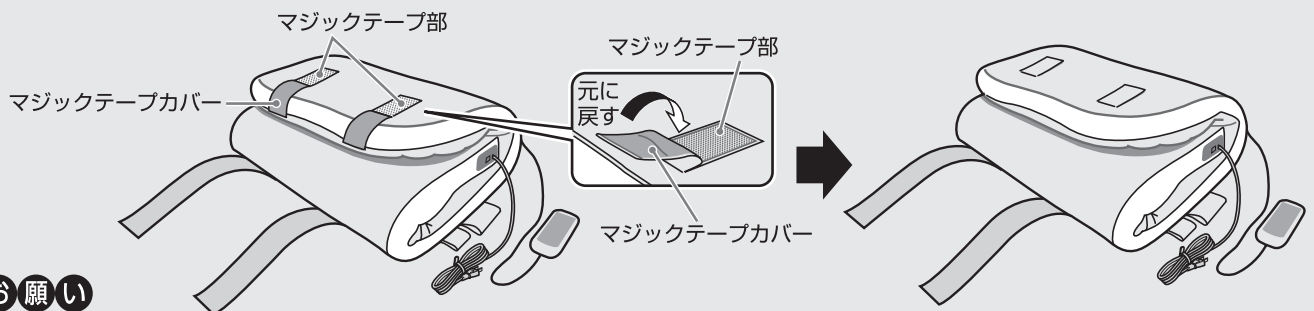


### お願い

- ベルトをはずした後は、本体を広げる前にマジックテープを必ず元に戻してください。また、ベルトを掛けるときはマジックテープカバーをはずしてください。

## 設置場所について

- 本体は凹凸のない平らな床や畳の上に直接、水平に置いてください。  
マッサージの動作に支障をきたして故障の原因となります。

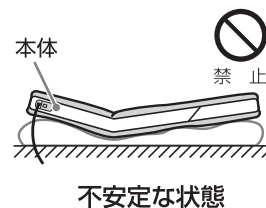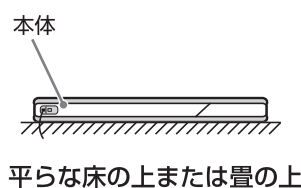

- 無理に折り曲げた状態では使用しないでください。

## ⚠ 注意



確認する

ご使用前に布団のカバーに破れがないか確認する  
(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)

カバーが破れた上体で使用すると、感電やけがのおそれがあります。




禁止

ストーブなど火気の近くで使用したり、  
たばこを吸いながら使用しない

火災や故障の原因になります。

## 2 電源を入れる

### ①電源プラグをコンセントに差し込む

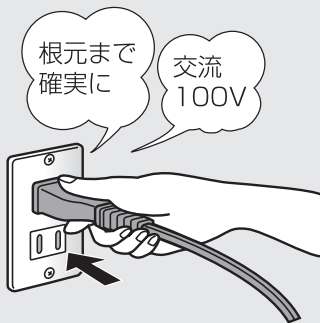

### ②電源スイッチを入れる



- リモコンの主電源ランプが点灯します。




## 3 本体に横たわる

### ①本体の頭側を確認して本体に横たわる



### ②肩位置を合わせる

- 首・肩マッサージ部を肩の位置に合わせます。

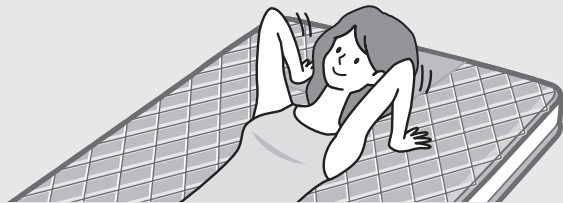

- 首・肩のマッサージをするとき、体の位置を動かして強さを調整してください。
- この本体を就寝具として使用するとき、まくらをご使用ください。
- 背・腰のマッサージをするときは、「背・腰コースのマッサージ位置」をご確認ください。(10 ページ参照)

# マッサージを使うとき（自動コース）

マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。  
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。  
電位治療や除湿機能と同時に使用できません。

## ⚠ 注意



15分以内

**マッサージは1回15分以内にする**

長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。1日の使用は30分以内にしてください。



医師に相談

**使用中に身体に異常が現れたり、感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談する**



プラグを抜く

**使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く**

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

## メモリー機能について

- 「スタート/切」で途中で終了した場合、前回使用したエアーマッサージの「コース選択」が記憶されます。再度「スタート/切」でマッサージを始めると、前回使用した「コース選択」でマッサージが開始します。

## メモリー機能がはたらかない場合

- 「停止」で終了した場合。
- 電源スイッチを「切」にした場合。
- 電源プラグをコンセントから抜いた場合。

## エアーマッサージを使うとき

### 1 エアーマッサージの電源を入れる



**「スタート/切」ボタンを押す**

- ブザーがピッと鳴り、コース「おやすみ前」強さ「弱」のランプが点灯します。
- 何も押されずに約3秒経過すると自動的にコース「おやすみ前」、強さ「弱」でマッサージが始まります。

### 途中で終了したいとき



**「スタート/切」ボタンを押す**

### ただちにすべての動作を止めたいとき



**「停止」ボタンを押す**

- 「停止」ボタンを押すと、ヒーターも切れますのでご注意ください。

### お知らせ


- 使用途中で電源スイッチを切るとエアバッグが膨らんだままになることがあります。電源スイッチをもう一度入れ、エアバッグが縮んだのを確認してから電源スイッチを切ってください。
- 「停止」ボタンを押した後、約2秒間、すべてのボタンを受付けません。約2秒経過後、「スタート/切」を押すとエアーマッサージ動作に戻ります。

## マッサージの動作時間

- 自動コースの動作時間は約15分です。

## オートタイマー機能について

- マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。

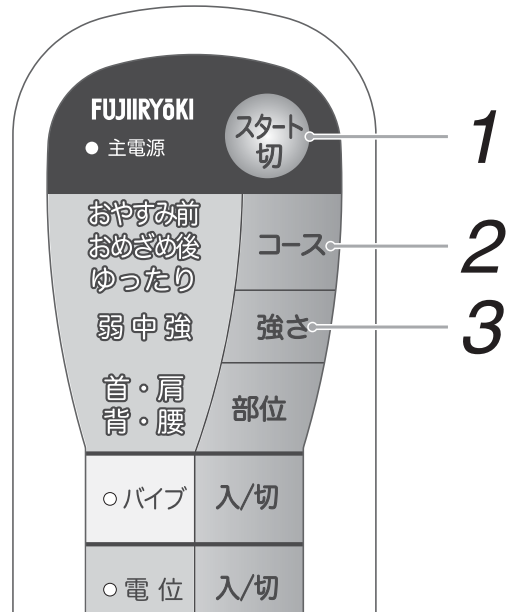


## 2 お好みのエアーマッサージモードを選ぶ

### 自動コースマッサージを使うとき

**コース** 「コース選択」ボタンを押し、お好みのコースを選ぶ


- 「コース選択」ボタンを押すたびに「おやすみ前」→「おめざめ後」→「ゆったり」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択したコースの表示ランプが点灯します。
- 「コース選択」はあらかじめ「おやすみ前」に設定されています。

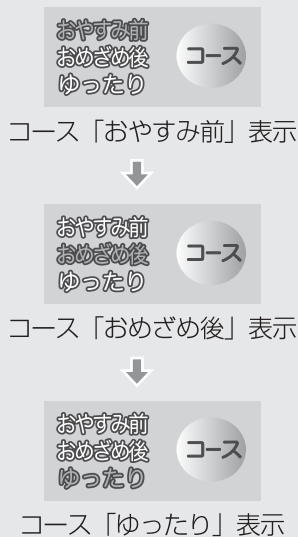

## 3 エアーマッサージの強さを選ぶ

**強さ** 「強さ」ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ

- 「強さ」ボタンを押すたびに「弱」→「中」→「強」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択した「強さ」の表示ランプが点灯します。
- 「強さ」はあらかじめ「弱」に設定されています。

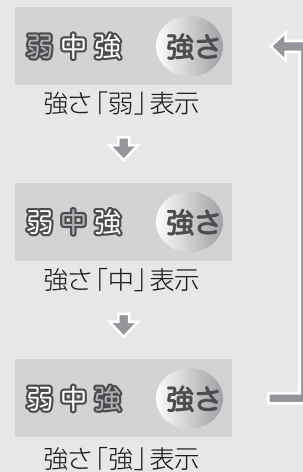

# マッサージを使うとき（部位コース）

マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。  
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。  
電位治療や除湿機能と同時には使用できません。

## ⚠ 注意



15分以内

**マッサージは1回15分以内にする**

長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。1日の使用は30分以内にしてください。



医師に相談

**使用中に身体に異常が現れたり、感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談する**



プラグを抜く

**使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く**

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

## エアーマッサージを使うとき

### 1 エアーマッサージの電源を入れる



**「スタート/切」ボタンを押す**

- ブザーがピッと鳴り、コース「おやすみ前」強さ「弱」のランプが点灯します。
- 何も押されずに約3秒経過すると自動的にコース「おやすみ前」、強さ「弱」でマッサージが始まります。

### 途中で終了したいとき



**「スタート/切」ボタンを押す**

### ただちにすべての動作を止めたいとき



**「停止」ボタンを押す**

- 「停止」ボタンを押すと、ヒーターも切れますのでご注意ください。

### お知らせ

- 使用途中で電源スイッチを切るとエアバッグが膨らんだままになることがあります。  
電源スイッチをもう一度入れ、エアバッグが縮んだのを確認してから電源スイッチを切ってください。
- 「停止」ボタンを押した後、約2秒間、すべてのボタンを受付けません。  
約2秒経過後、「スタート/切」を押すとエアーマッサージ動作に戻ります。




## マッサージの動作時間

- お好みコースの動作時間は約15分です。

## オートタイマー機能について

- マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。

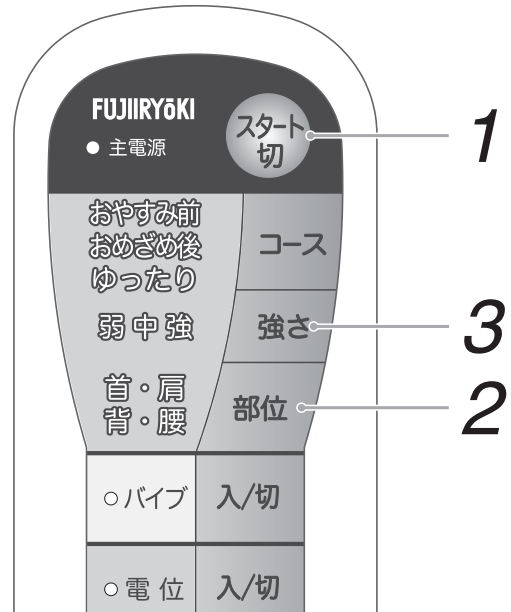

## 2 お好みのエアーマッサージモードを選ぶ

### 部位コースマッサージを使うとき

**部位** 「部位選択」ボタンを押し、お好みのコースを選ぶ


- 「部位選択」ボタンを押すたびに「首・肩」→「背・腰」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択したコースの表示ランプが点灯します。
- 「部位選択」はあらかじめ「首・肩」に設定されています。



## 3 エアーマッサージの強さを選ぶ

**強さ** 「強さ」ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ

- 「強さ」ボタンを押すたびに「弱」→「中」→「強」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択した「強さ」の表示ランプが点灯します。
- 「強さ」はあらかじめ「弱」に設定されています。

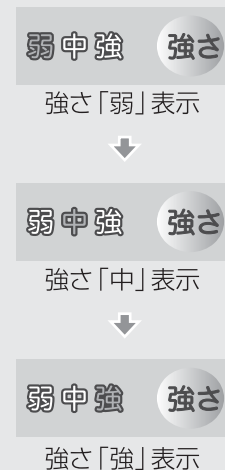


# マッサージを使うとき（バイブレータ）

バイブレータのみでも、またはマッサージ中でも使用できます。  
電位治療や除湿機能と同時に使用できません。

## お願い

- 畳や床の状態により振動や音が気になる場合は、マットなどのクッションを下に敷いてください。

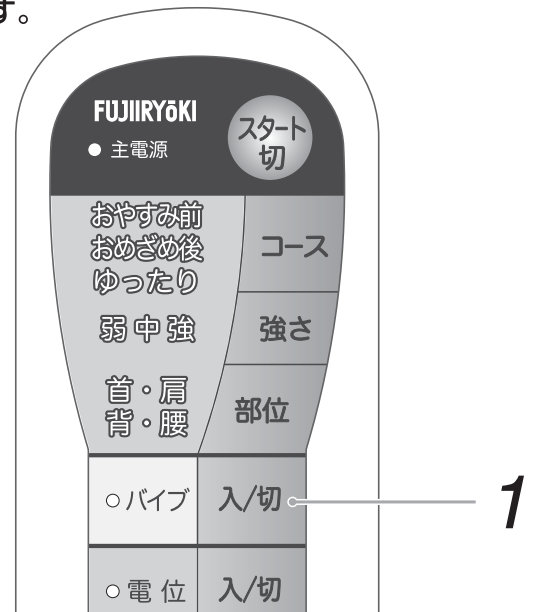


## バイブレータを使うとき

### 1 バイブレータの電源を入れる

#### 入/切 バイブ 「入/切」 ボタンを押す

- バイブ「入/切」ボタンを押すたびに「入/切」が切り替わります。
- バイブレータ動作中は「入/切」表示ランプが点灯します。
- バイブレータ単独動作の場合「入」にしてから約15分で自動的に停止します。
- バイブレータ動作途中で下記の操作をしたとき、バイブレータは自動的に停止します。
  - バイブレータ単独動作中に「スタート/切」ボタンを押す
  - エアーマッサージコースとバイブレータを併用中に他のエアーマッサージコースへの変更
- バイブレータの強さを変更することはできません。

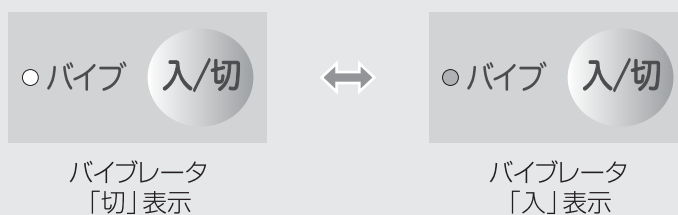

## お知らせ

### 停止ボタンについて

- 「停止」ボタンを押すと、バイブレータが切れます。
- バイブレータにはメモリー機能はありません。

# マッサージを使うとき（使い終わったら）

## ⚠ 注意



プラグを  
抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く


ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。



プラグを  
抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。

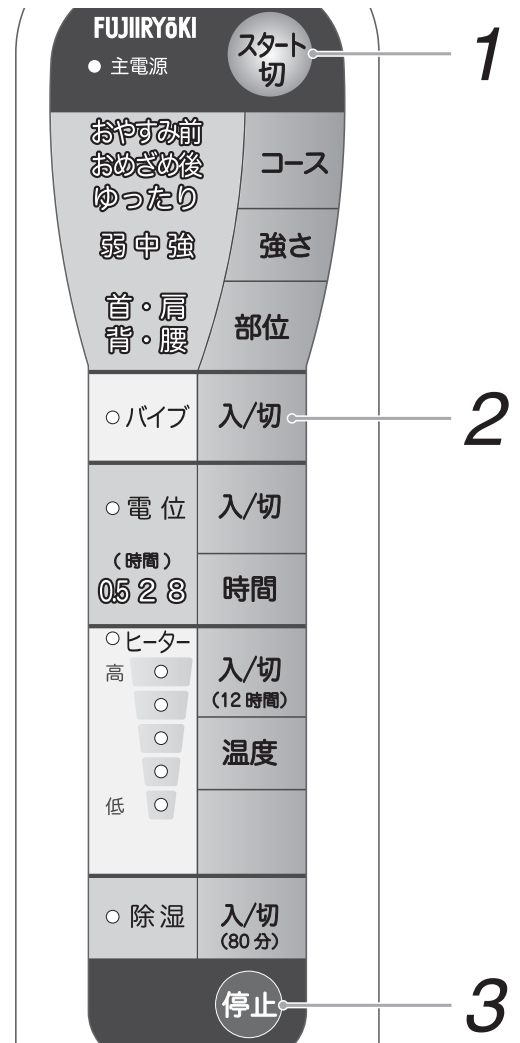

## 1 エアーマッサージを止める



「スタート/切」ボタンを押す

- エアーマッサージの全てのランプが消えます。

## 2 バイブレータを止める



バイブ「入/切」ボタンを押す

- バイブレータのランプが消えます。

## 3 ただちにすべての動作を止める



「停止」ボタンを押す

### お知らせ

#### 停止ボタンについて

- 「停止」ボタンを押すと、ヒーター、電位治療、除湿機能も切れます。


## 4 電源を切る

### 電源スイッチを切る

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。
- リモコンの主電源ランプが消えます。



### 電源プラグをコンセントから抜く

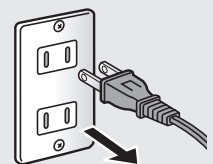

# 除湿機能を使うとき

他の機能と同時に使用できません。

## 警告



禁止

除湿機能は人やものが乗った状態では使用しない


ヒーターの温度設定が「5（高）」の固定になり、長時間の使用で低温やけどのおそれがあります。

## 除湿機能について

- ヒーターの熱とエアーの排気により、マット内の湿度を下げる機能です。動作中は、ヒーターの温度が「5（高）」の設定になります。
- 除湿の動作時間は約 80 分です。除湿開始後、約 80 分で自動的に停止します。

## お願い

- 湿気の多い時期は、床に接する裏面の湿気がとれにくく、結露が起きることもあります。除湿機能に加え、時々裏返して、日の当たらない風通しの良い場所に広げて干してください。（除湿機能は、エアーの排気によりマットの内部の湿気を外に押し出す構造で、床に接する裏面から風はだまません。）
- 裏返ししたり折り曲げたまま除湿機能を使用しないでください。

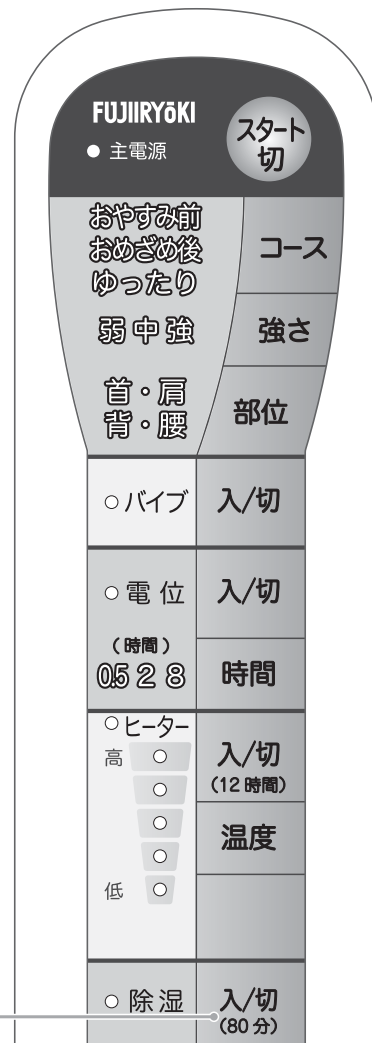

## 1.2

### 1 除湿の電源を入れる

入/切 除湿「入/切」ボタンを押す

- 除湿「入/切」ボタンを押すたびに「入/切」が切り替わります。
- 入にしてから約 80 分で自動的に停止します。
- 他の機能が動作している状態では使用できません。
- 除湿動作中は、15 分間隔でエアーが排気されます。

○除湿 入/切 (80分)



○除湿 入/切 (80分)

除湿「切」表示

除湿「入」表示

### 2 使い終わったら除湿を切る

入/切 除湿「入/切」ボタンを押す

- 「スタート/切」ボタンを押して、マッサージを始めても除湿が切れます。

#### 電源スイッチを切る


- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。
- リモコンの主電源ランプが消えます。



#### 電源プラグをコンセントから抜く

#### お知らせ 停止ボタンについて

- 「停止」ボタンを押すと、除湿が切れます。

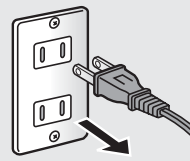

# ヒーターを使うとき

ヒーターのみでも、電位治療またはマッサージ中でも使用できます。

## 警告



禁止

ヒーターは設定温度「4」以上で長時間使用しない  
また、同一箇所に長時間触れさせない

比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間、皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります  
次の人がお使いのときは、まわりの人が特に気をつけてください

- お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節ができない人
- 皮膚や皮膚感覚の弱い人
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された人
- 深酒・疲労の激しい人
- 血行障害(糖尿病など)の人
- 医師より注意を受けている人


## メモリー機能について

- ヒーター「入/切」で切った場合、前回使用したヒーターの「設定温度」が記憶されます。再度「入/切」でヒーターを入れると、前回使用した「設定温度」でヒーターが入ります。

## メモリー機能がはたらかない場合

- 「停止」で終了した場合。
- 電源スイッチを「切」にした場合。
- 電源プラグをコンセントから抜いた場合。

1.3  
2

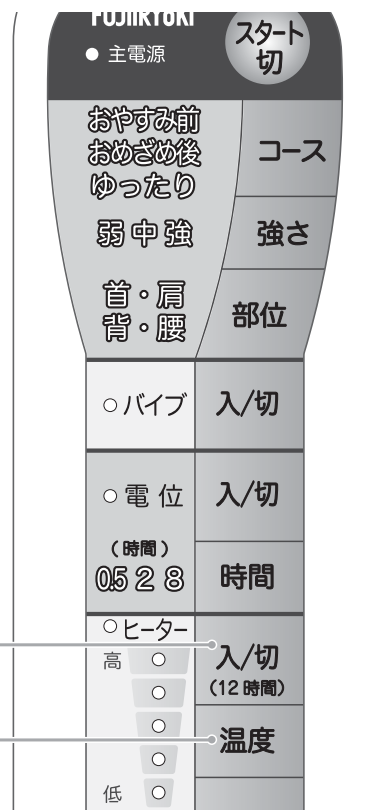

## 1 ヒーターの電源を入れる

入/切 ヒーター「入/切」ボタンを押す

- ヒーター「入/切」ボタンを押すたびに「入/切」が切り替わります。
- 入にしてから約12時間で自動的に停止します。

## 3 使い終わったらヒーターを切る


入/切 ヒーター「入/切」ボタンを押す

### 電源スイッチを切る

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。
- リモコンの主電源ランプが消えます。



### 電源プラグをコンセントから抜く

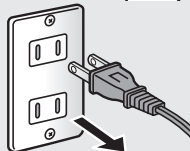


### お知らせ 停止ボタンについて

- 「停止」ボタンを押すと、ヒーターが切れます。

## 2 温度ボタンで設定温度を選ぶ

温度 「温度」ボタンを押す

- 「温度」ボタンを押すたびに設定温度が5段階の順で切り替わります。
- 選択した設定温度のランプが点灯します。

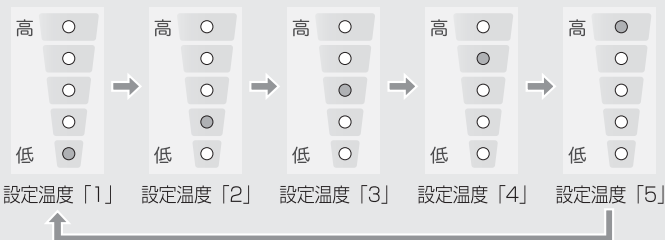

### お知らせ

- 最初に設定温度「5(高)」を設定して1時間ほど本体を温めた後にお好みの温度目盛にすることをお勧めします。
- 寝汗をかいたり、のどがかわいたり、起きたあととだるいときは、設定温度「2」以下に下げてください。(体温より低い温度が睡眠には適しています。)

## ヒーター温度について

ご購入直後や毎年使い始めには、ぬるく感じる場合があります。これは保管中に本体が湿気を含むためにおこります。このようなときは、使用前に本体を温める時間を長くしたり、設定温度を高めにしてご使用ください。

| ご使用例          | 使用前に本体を温める時間   | 就寝時の温度設定  |
|---------------|----------------|-----------|
| 通常            | 設定温度「5」で約1時間   | 設定温度「2~3」 |
| 使い始めにぬるく感じるとき | 設定温度「5」で約2~3時間 |           |

# 電位治療を使うとき

エアーマッサージおよびバイブレータと同時に使用できません。

## 警告



**電位治療は、次のような医用電気機器と併用しない**

禁止

誤作動を招くおそれがあります。

- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電波障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 心電計などの装着型の医用電気機器



**心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない**

禁止

## 注意



**電位治療は、1日8時間以内にする**

守らないと体調不良のおそれがあります。

8時間以内

### 1 電位治療の電源を入れる



**電位「入/切」ボタンを押す**

- 電位「入/切」ボタンを押すたびに「入/切」が切り替わります。

### 2 時間ボタンで設定時間を選ぶ



**「時間」ボタンを押す**

- 「時間」ボタンを押すたびに「0.5時間(0.5)」→「2時間(2)」→「8時間(8)」の順で切り替わります。
- 選択した設定時間のランプが点灯します。



#### お知らせ

- 電位治療中にエアーマッサージ「スタート/切」を押すと、電位治療は停止し、エアーマッサージに切り替わります。
- 電位治療中にバイブレータ「入/切」を押すと、電位治療は停止し、バイブレータに切り替わります。

### メモリー機能について


- 電位「入／切」・エアーマッサージ「スタート／切」およびパイプ「入／切」で切った場合、前回使用した電位治療の「設定時間」が記憶されます。再度「入／切」で電位治療を入れると、前回使用した「設定時間」で電位治療が入ります。

### メモリー機能がはたらかない場合

- 「停止」で終了した場合。
- 電源スイッチを「切」にした場合。
- 電源プラグをコンセントから抜いた場合。

### 電位治療による反応について

- 電位治療を始めますと、人によっては最初のうち一時的に湯あたり（温泉につかり過ぎて疲れたような状態）に似た症状になることがあります。この症状が強すぎて不快な場合には、1日か2日治療を中止してください。症状がなくなりましたら徐々に治療を再開してください。

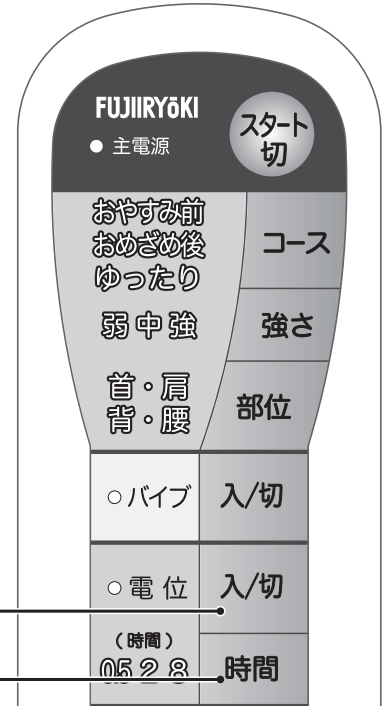

## 3 使い終わったら電位治療を切る


### 入/切 電位「入／切」ボタンを押す

#### 電源スイッチを切る

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。
- リモコンの主電源ランプが消えます。



#### 電源プラグをコンセントから抜く

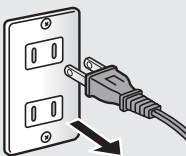

### お知らせ


#### 停止ボタンについて

- 「停止」ボタンを押すと、電位治療が切れます。

### マッサージの後に電位治療をしたいとき

- エアーマッサージおよびパイプレータ動作中に電位「入／切」ボタンを押すと、リモコンの設定時間ランプが点滅し、待機状態になります。（設定時間は前回の時間が記憶されています。設定時間を変更したい場合は、「時間」ボタンで設定しなおしてください）
- エアーマッサージおよびパイプレータの動作が終了すると、電位治療が自動的に始まり、設定時間ランプが点灯します。

※電位治療が待機状態のとき、エアーマッサージ「スタート／切」およびパイプレータ「入／切」ボタンを押して、エアーマッサージおよびパイプレータを停止すると、電位治療が開始します。

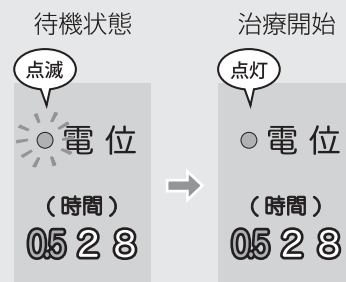


# あとかたづけ


## 本体

### 1 本体を3つ折りにする

- 折り曲げるときは、マッサージ面を内側にして、足元側、頭部側の順に3つ折りにしてください。
- ゆっくりと折り曲げてください。
- 電源コードは必ず束ねてください。

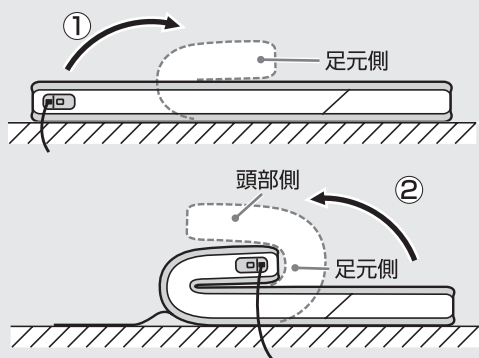

### 2 ベルトをかける

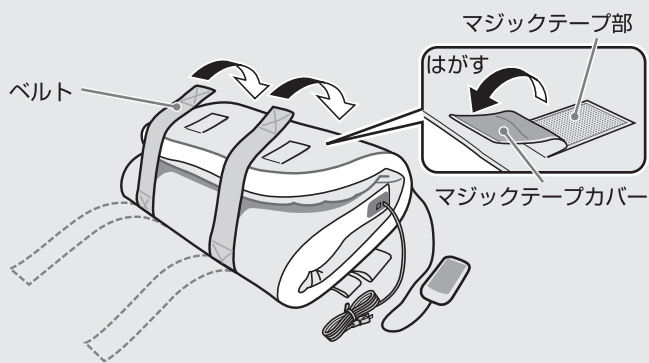

#### お願い

- 電源プラグやリモコンを本体の間に入れたまま折り曲げないでください。故障の原因になります。
- 足の上に落としたりしないように注意してください。

## 本体の移動のしかた

### ⚠ 注意



リモコンコード、電源コードに足を引っ掛けないように気をつけ  
けがおそれがあります。

禁止

- 必ず本体は折りたたみ、ベルトを掛けた状態で移動してください。
- 本体の下側を2人で持って移動させてください。

#### お願い






- 移動中に運転しないでください。
- 電源コードは必ず束ねてください。
- 本体移動後は静かに設置してください。





# お手入れ

## 本体カバーのお手入れ

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>!</b><br><b>注意</b> |  <b>禁止</b> 駆動部、制御部、バイブレータ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない<br>けがや破損・故障の原因になります。 |  <b>禁止</b> 本体を干す場合は、もの干し竿などに干さない<br>落下によるけがや故障の原因になります。                       |
|                       |  <b>禁止</b> ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない<br>感電や引火の原因になります。        |  <b>プラグを抜く</b> お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く<br>また、濡れた手で抜き差ししない<br>感電やけがのおそれがあります。 |
|                       |  <b>禁止</b> 本体は、洗わない<br>故障や感電・火災の原因になります。                            |  |


●開梱時や長期間の収納後使用するとき、本体カバー表面の折り曲げ部に深いシワが発生する場合があります。広げた状態で使用することにより軽減されます。








●折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。

●本体カバーの汚れは、中性洗剤または衣料専用のシミ抜き程度のものでブラシ洗浄したあと、水を含ませた布でふきとり、自然乾燥させてください。但し、使いすぎると布地を傷めることがあります。

- お願い**
- お手入れで汚れがとれない場合、本体カバーをはずし、ドライクリーニングをしてください。
  - 干す場合は、日の当たらない風通しの良い場所に広げて干してください。
  - ふとん乾燥機は、使用しないでください。

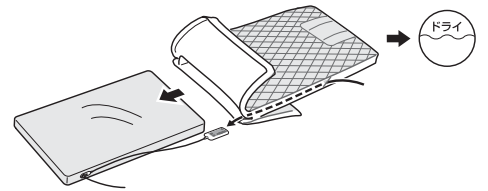

## 本体カバーのクリーニング ●本体カバーの汚れは、本体カバーをはずし、ドライクリーニングをしてください。
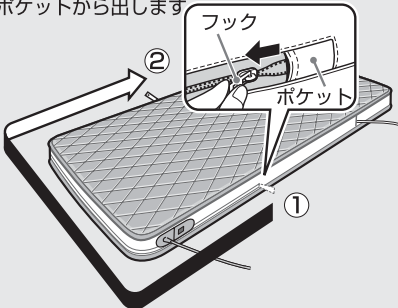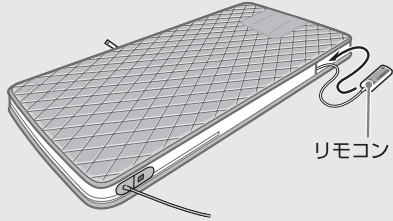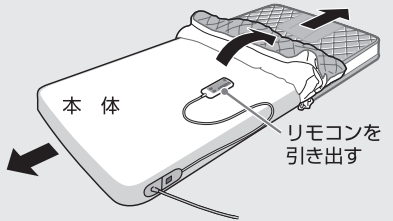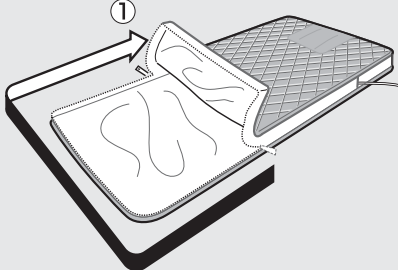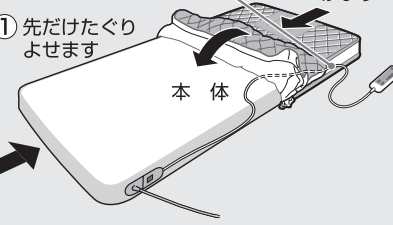
|                    |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
| <b>本体カバーのはずしかた</b> | <b>1</b> ファスナー①を②まで移動する<br>ファスナーのフックをポケットから出します<br> | <b>2</b> リモコンを本体カバーの中に入れます<br> | <b>3</b> 本体カバーを開き本体を引き抜く<br>   |
|                    | <b>本体カバーのつけかた</b>  | <b>1</b> ファスナー①を下図の位置にしておく<br> | <b>2</b> 本体に本体カバーをかぶせる<br>② リモコンを本体カバーの中から出します<br>③ 本体カバーをつけます<br>① 先だけたぐりよせます<br> |

# 保管


## ⚠ 注意




駆動部、制御部、バイブレータ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない  
けがや破損・故障の原因になります。

禁止

3つ折りにしてベルトを掛けて保管してください。

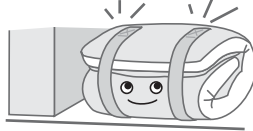

直射日光が当たる所、ストーブなどの近くで直接高温になる所はさけてください。

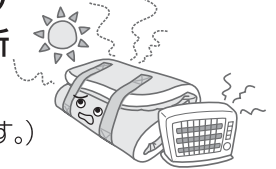

(布地の変色・変質のおそれがあります。)


3つ折りにした本体に人や物を乗せたり、腰掛けたりしないでください。

汚れやほこりをとった後、湿気の少ない所に水平に置いて保管してください。



(カビやシミ、故障の原因になります。)

本体をひいたままで、長時間そのままにしないでください。

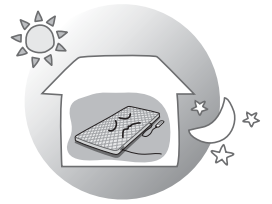

(カビ発生の原因になります。)

# 仕様

|                  |  |                        |                  |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 品名               | エアーマッサージ器  | 形名                     | DF-513           |
| 類別               | 機械器具 78 家庭用電気治療器   |                        |                  |
| 一般的名称            | 電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器 (コード71003000)   |                        |                  |
| 医療機器認証番号         | 222AGBZX00297A01   |                        |                  |
| 定格               | 電源   | AC100V 50/60Hz         |                  |
|                  | 時間   | 30分 (エアーマッサージ・バイブレータ)  |                  |
|                  | 消費電力   | 電気マッサージ器と電気布団の同時動作時    | 電位治療器と電気布団の同時動作時 |
|                  |  | 125W                   | 78W              |
|                  | 電気マッサージ器   | 電位治療器                  | 電気布団             |
|                  | 64W  | 5W                     | 75W              |
| 機能               | 「自動コース」：おやすみ前、おめざめ後、ゆったり   |                        |                  |
|                  | 「部位コース」：首・肩、背・腰  |                        |                  |
|                  | バイブレータ (強さ一定)  |                        |                  |
| オートタイマー          | マッサージ：約15分   | 電位治療：0.5・2・8時間         |                  |
|                  | ヒーター：約12時間   | 除湿：80分                 |                  |
| エアーマッサージ強さ       | 「弱」「中」「強」の3種類  |                        |                  |
|                  | エアー圧力：約65kPa   | 首肩もみ圧：約98N(「強」の場合)     |                  |
| 電位治療器の導子耐水保護     | IPX1   |                        |                  |
| 電位出力電圧           | 約-600V (実効値)、約-660V (ピーク値)   |                        |                  |
| ヒーター温度調整         | 5段階調整  |                        |                  |
| ヒーターマット表面温度      | 約30℃ (ヒーター設定温度「2」の場合)  | 約50℃ (ヒーター設定温度「5」の場合)  |                  |
| 標準消費電力量 (1時間当たり) | 約30Wh (ヒーター設定温度「2」の場合)   | 約60Wh (ヒーター設定温度「5」の場合) |                  |
| 発熱体              | ビニール被覆式ヒーター  |                        |                  |
| 素材               | 本体カバー  |                        | 充填物              |
|                  | 生地：ポリエステル100%  |                        | ウレタンフォーム         |
| 寸法               | 約幅950mm×長さ2000mm×厚さ80mm  |                        |                  |
| 質量 (重さ)          | 約14kg  |                        |                  |
| 電源コード            | 約2.3m  | リモコンコード                | 約1.0m            |
| 付属品              | 専用シート (CF-12MG) ※消耗性部品   |                        |                  |
| 製造販売元            | 株式会社 フジ医療器   |                        |                  |
|                  | 住所：大阪府南河内郡太子町太子2372-95   | 電話：0721-98-6870 (代表)   |                  |
| 製造元              | 安徽久工科技实业有限责任公司 (中国)<br>ANHUI JIUGONG SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD (CHINA) |                        |                  |

# 修理サービスを依頼する前に

## ⚠ 警告



分解・改造・修理をしない  
また、内部カバーのファスナーを開けない

分解禁止 火災や感電・けがの原因になります。

使用中に異常が生じたときは次の点をお調べください。

| こんなとき                       | 次の点をお調べください。  |  |
|-----------------------------|---|--|
| 動作しない                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>●マッサージを30分を超えて使用していませんか。</li> <li>●タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか。</li> </ul> | →電源プラグをコンセントに入れてください。<br>→本体内部の保護装置がはたらいています。2時間程待ってから使用してください。<br>→もう一度リモコン操作をしてください。 |
| リモコンが正常に動作しない               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源の状態等により誤動作している可能性があります。</li> </ul>  | →電源プラグを一旦コンセントから抜いてもう一度コンセントへ差込んでください。   |
| ヒーターが暖かくならない<br>(ヒーターが入らない) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒーター  ボタンがオフになっていませんか。(リモコンの  ボタンを押すと、ヒーターがオフになります。)</li> </ul>                                   | →ヒーター  ボタンを押してください。  |
| 動作時の音が気になる                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●マッサージ部位の切り替えのカチ音、エアーを排気するときのプシュー音、ポンプが動くときのブーン音です。</li> </ul>                                     | →構造上発生するもので、機能などに影響ありません。  |
| 足元の制御部が温くなる                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用中または、使用後であっても電源スイッチが入っていると制御部は温かくなります。(待機電力が消費されるため)</li> </ul>                                | →使用後は電源スイッチを切ってください。<br>制御部は温かくなりず、節電になります。  |

## 愛情点検



愛情点検

長年ご使用の場合は点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。

## ⚠ 注意



しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する

確認する 事故やけがのおそれがあります。

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

## ●保証書（別に添付してあります。）

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**保証期間** 添付の保証書に記載

## ●補修用性能部品の保有期間

当社はこのエアーマッサーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

26ページに従ってしらべていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

## ●保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。

（なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。）

## ●その他ご不明な場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。

## ●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

## ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

**0120** フリーダイヤル  
**0120-027612**

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

**FAX番号** 06-6644-9103

**E-mail** フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受け付けております。

フジ医療器ホームページ <http://www.fujiiryoki.co.jp>

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

地球の環境保護の為、破棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**  
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

|        |       |
|--------|-------|
| ご購入年月日 | 年 月 日 |
| ご購入店名  | TEL   |

2010年12月1日（新様式第1版）