

# FUJIIRYŌKI

## ウェルナイトブレスバランス

温熱・電位治療器  
HE-7000S

### 取扱説明書

類別：機械器具78家庭用電気治療器  
一般的名称：電位・温熱組合せ家庭用医療機器（JMDNコード71001000）  
管理医療機器

安全上のご注意	1
特長	6
本体の名称	7
ご使用の前に	8
コントローラーの名称と機能	9
ご使用方法	11
温熱を使用される場合	11
低温やけどについて	12
温熱／電位を使用される場合	13
コースを使用される場合	14
電位を使用される場合	15
ご使用後は	16
本体の折りたたみ方	16
愛情点検	17
お手入れ方法	17
アフターサービスについて	18
仕様	18



### 効果・効能

#### 温熱効果

●温熱効果

- ・疲労回復
- ・血行をよくする
- ・筋肉の疲れをとる
- ・筋肉のこりをほぐす
- ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- ・胃腸の動きを活発にする




#### 電位効果

- 肩こり
- 慢性便秘
- 不眠症
- 頭痛

- このたびは当社のウェルナイトブレスバランスをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。




# （安全上のご注意）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示	表示の意味
 <b>危険</b>	人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容が記載されています。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 絵表示の例

記号	記号の意味と例
	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。



## ⚠ 危険

### 電位治療器において

下記のような医用電気機器との併用は、それらの機器に影響を与える恐れがあるので使用しないでください。



禁止

- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 心電計などの装着型の医用電気機器

### 電位治療器において



禁止

心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない

乳幼児や自分で意志表示できない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。



禁止

低温やけどや脱水症状などを起こす恐れがあります。

## ⚠ 警告

次の人は、必ず医師とご相談の上で使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 体温38℃以上(有熱期)の人(急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)
- 治療部位に創傷のある人
- 急性疾患(疼痛性)のある人
- 知覚障害の人
- 心臓に障害のある人
- 貧血症の人
- かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人



相談

- 安静を必要とする人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 高血圧の人
- 不整脈のある人
- 睡眠時無呼吸症の人
- 喘息の人
- 上記以外に特に身体に異常を感じている人

### 温熱治療器において

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



禁止

(次のような方は特にご注意ください)  
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい人、糖尿病などの疾患のある方

分解や修理・改造を行なわないでください。



分解禁止

発火したり、事故や故障の原因になります。

### 温熱治療器において

温度調節「高」目盛りで長時間使用しないでください。

低温やけどの恐れがあります。



禁止

# （安全上のご注意）

## ⚠ 注意

電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。



禁止



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。



禁止



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く




電源コードを傷つけたり破損したり加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

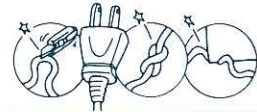

使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。



プラグ抜く



交流100V以外では使用しないでください。

火災や感電の原因になります。



禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やケガをすることがあります。



プラグ抜く



作動しなくなったり、異常がある場合（こげ臭いなど）は、電源プラグを抜いてください。

異常のまま使用を続けると、感電や火災の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。



プラグ抜く



## ⚠ 注意

使用中に身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。



症状が悪くなることがあります。

使用中止

コントローラーに水やお茶などをこぼさないでください。本体がぬれている場合には使用しないでください。



万一こぼした時は過熱の恐れがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

禁止

治療目的以外には使用しないでください。



事故や故障の原因になります。

禁止

他の暖房器具との併用はしないでください。



湯たんぽ、あなか、こたつ、電気毛布などと併用しますと、本体の一部だけ温度が高くなり故障や、やけどの原因となります。

禁止

しばらく使用しても効果が現れない場合、医師にご相談ください。



相談

浴室等の湿気の多い場所では使用しないでください。



感電及び故障の原因になります。

禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。



禁止

折りたたんだまま使用しないでください。コントローラーの上に掛ぶとんなどをかけて使用しないでください。



異常発熱や故障の原因となります。

禁止

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。



禁止

感電・引火の原因になります。

しばらく使用しなかった場合、機器が正常に動作することを確認してから使用する



事故の原因になります。

確認する

# （安全上のご注意）

## ⚠ 注意

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。



禁止

ペットが本体やコードをいため、火災の原因になることがあります。

寝たばこはおやめください。

火災の原因となります。



禁止

針やピンで治療器本体を突き刺したり、刃物で傷を付けないでください。



禁止

発熱体をいため発火の原因となります。

重いもの・局部的に大きな圧力がかかるものを置かないでください。



禁止

事故や故障の原因になります。

電源プラグ及び接続コードのコネクターは確実に最後まで差し込んでください。



確実に

ショートや発火の恐れがあります。

停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く

再通电されたときに事故の原因になります。

# (特長)

## 1 温熱・電位効果が全身に

温熱効果で体を温め、血行をよくし、筋肉の疲れをとり、胃腸の働きを活発にします。又、電位効果によって体へマイナス電位がひろがり、不眠症・肩こり・頭痛・慢性便秘に効果があります。

## 2 新構造「ブレスバランス」による快適な寝心地

高反発ウレタン、高通気ウレタン、高密度ウレタンの三層構造が寝姿勢の保持と体圧分散の機能を両立させ、快適に身体を支えます。

## 3 コントローラーはリモコンスイッチになってらくらく操作

スイッチ機能とタイマーをハンディなりモコンスイッチにドッキング。お気軽にお使いいただけます。

## 4 温熱・電位の切替えはワンタッチ

スイッチを温熱又は、電位に合わせるだけの簡単操作で切替えOK。2つの治療器機能を体調に合わせてお選びいただけます。

## 5 「全面→周囲」で、爽やかな目覚め

「温熱」・「温熱／電位」時に「全面→周囲」を選択すると約3時間後には、中央部のヒーターのみ通電が切れ、周囲部のヒーターだけが働くため気持ちよくお眠りいただけます。「温熱／電位」時の最後の1時間は「電位モード」になり、ヒーターの通電は全て切れます。

## 6 快適温度をキープ

スライド式温度調節スイッチで約25～45℃まで、お好みの温度をキープ。又、オレンジのバックライトで暗がりでも、簡単に調節できます。

## 7 たためてコンパクト収納

折りたたむことで場所を取らずに押し入れにも収納できます。


## 8 4重安全装置付

- 自動温度調節回路
- ヒーター線短絡検知回路
- 感熱線断線検知回路
- 電流ヒューズ



# (本体の名称)

## 各部の名称

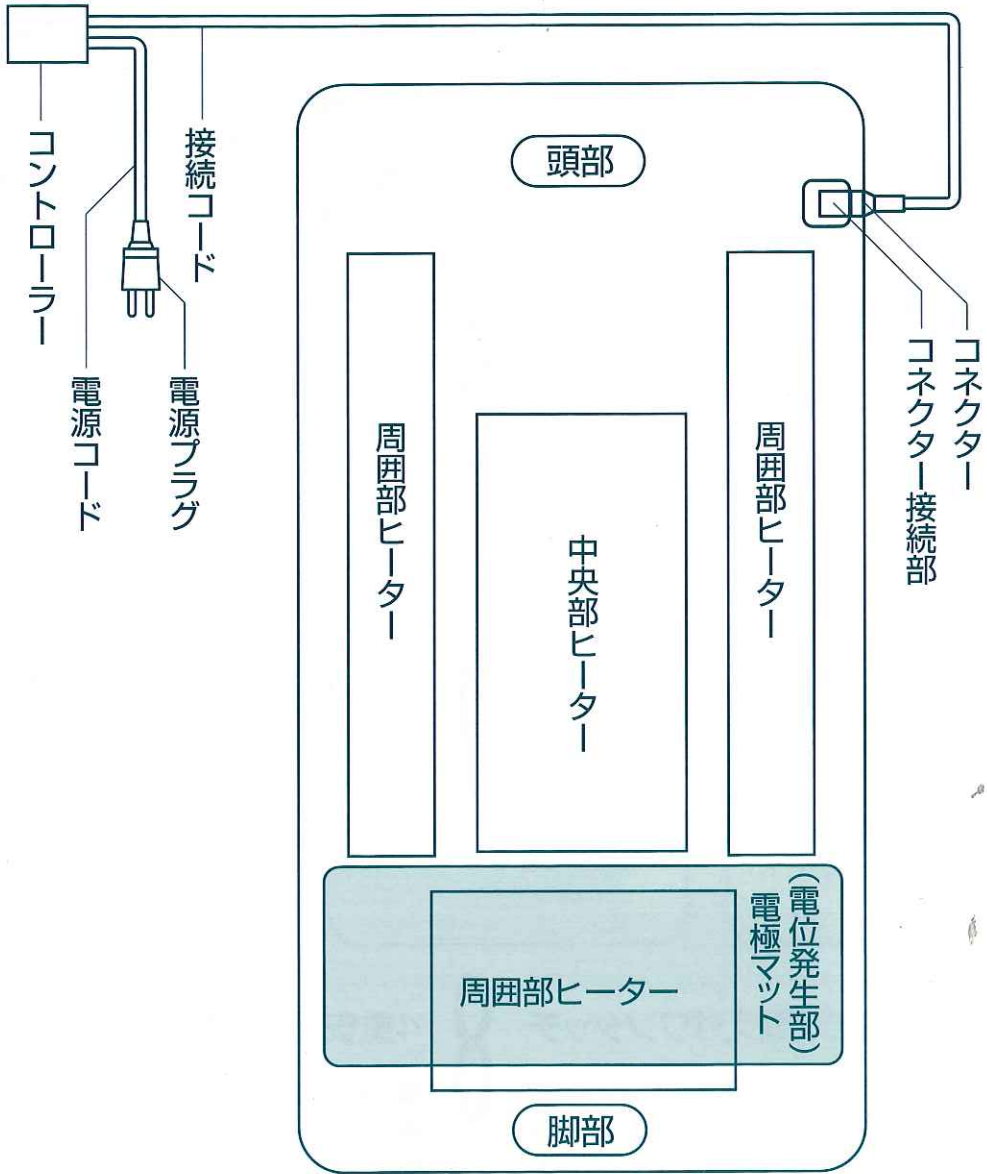




# （ご使用の前に）

# 1

## コネクターの接続

本体を広げ接続コードのコネクタを図のように、突起部が合うように本体のコネクタ接続部に、キッチリと最後まで差し込んでください。

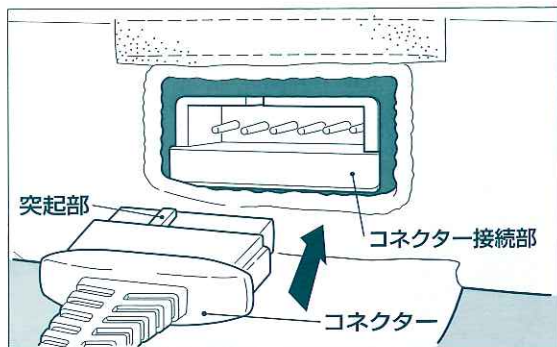

⚠ 注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電、ショート、  
発火の原因になります。

禁止



⚠ 注意

電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。




禁止



# 2

電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントに差し込んでください。

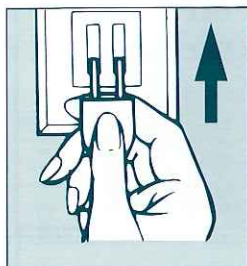

⚠ 注意

電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。

ショートや発火の恐れがあります。



確実に

# 3


頭部左側にコネクタ接続部がくるように敷いてご使用ください。



- 始めて使用される方の中には、違和感を感じることがありますが、その様な場合には、使用時間を短くする等、徐々に慣らしてください。
- 製品を袋から取り出したとき臭いがする場合には、風通しの良いところにしばらくおいていただき、臭いを発散させてください。
- 長時間、敷き続けると布団の裏側に湿気がこもり、ふとん及び畳や床などにカビがはえることがありますので、敷きっぱなしにはしないでください。使用後は、風通しを良くしてください。日干しする場合はカバーをかけたまま干してください。

# （コントローラーの名称と機

## 各部の名称

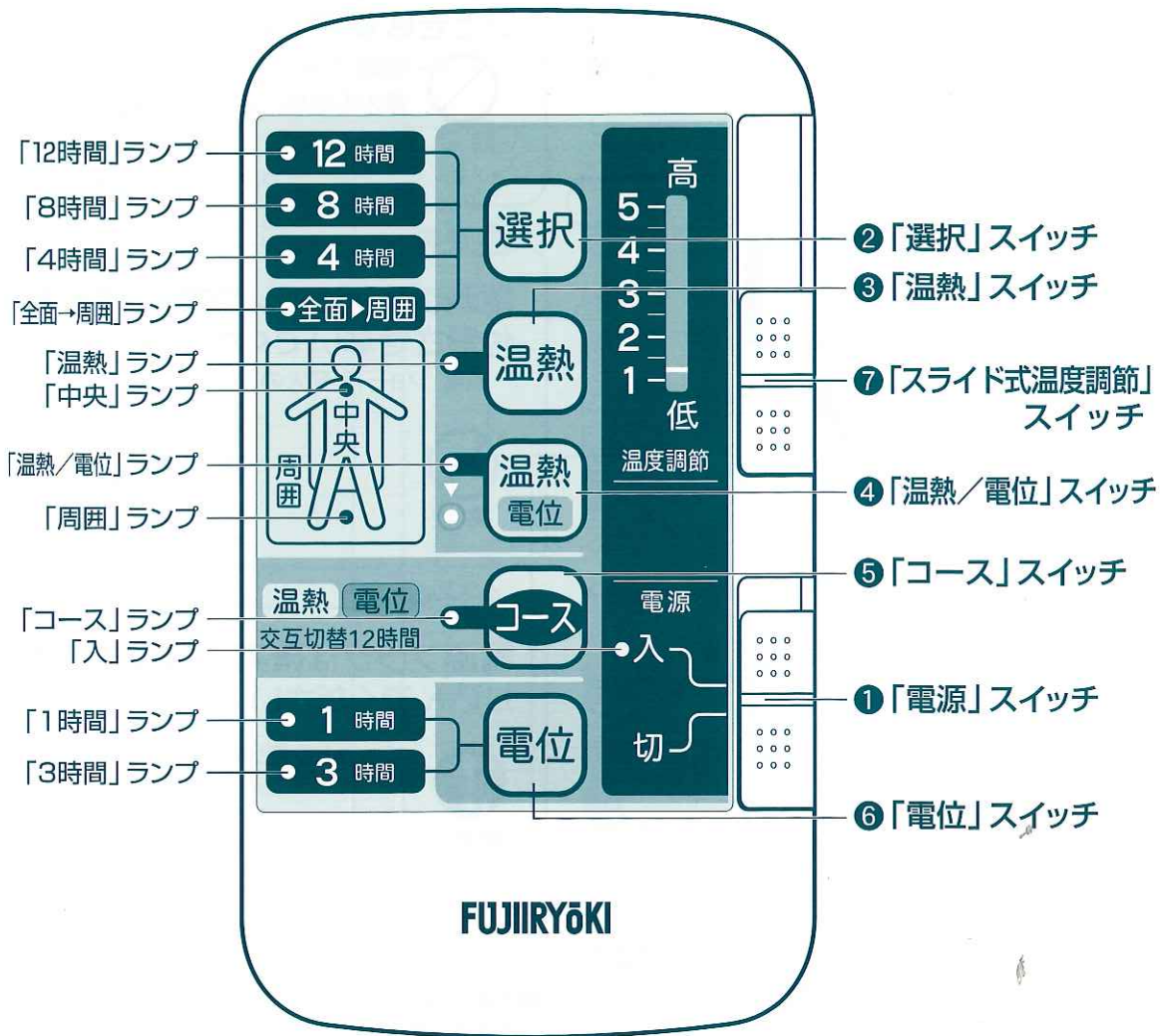

### 動作記憶

「電源」スイッチを切ってもそれ以前の動作状態を記憶していますので、次に「電源」スイッチを入れた時、自動的に前回と同じ動作状態となります。記憶時間は3日間で、記憶がない時には、「電源」スイッチを入れると、タイマーは「12時間」、モードは「温熱」となります。



## 機能

## ①「電源」スイッチ


電源「入」「切」を行う。

電源を「入」にした場合「入」ランプ以外に、「温熱」ランプ・「12時間」ランプが点灯します。

## ②「選択」スイッチ

タイマー時間を選択する。

4種類の時間設定をお選びいただけます。

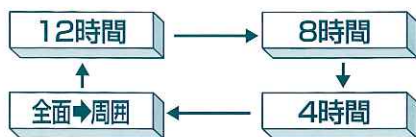


## ③「温熱」スイッチ

温熱モードとなる。

ヒーターのみ動作を行い電位発生は、停止しています。


## ④「温熱／電位」スイッチ

温熱動作後、最後の1時間自動的に電位に切替わる。

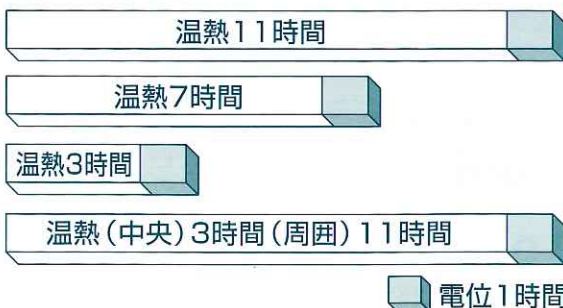

## ⑤「コース」スイッチ

温熱と電位を自動的に交互に切替え作動する。

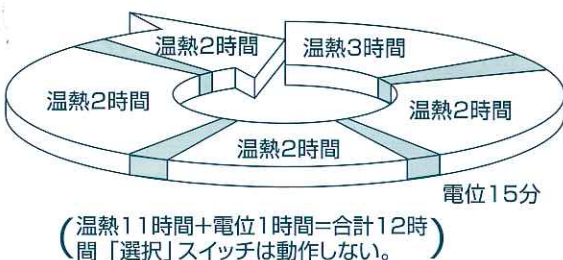

## ⑥「電位」スイッチ

電位モードとなる。

一回押すと1時間、もう一回押すと3時間に切替わります。



(「選択」スイッチは動作しない。)

## ⑦「スライド式温度調節」スイッチ

スライドスイッチを動かして温度を調節する。

- ご使用される前にスイッチを「高」にセットして、布団をあらかじめ温めておいてください。(ご使用になる約30～60分前) その際、布団の温まりを早くするため、掛布団を掛けておいてください。
- 本体が湿度を含んでいる時や室温が低い時は温まるのに時間がかかる場合があります。


お願い

「低」の位置では、温度がなかなか上がらない場合がありますのでご注意ください。  
「1」で約25℃、「5」で約45℃が目安の温度です。

# （ご使用方法）

（ご使用の前に）8ページを必ずお読みください。

## 温熱を使用される場合

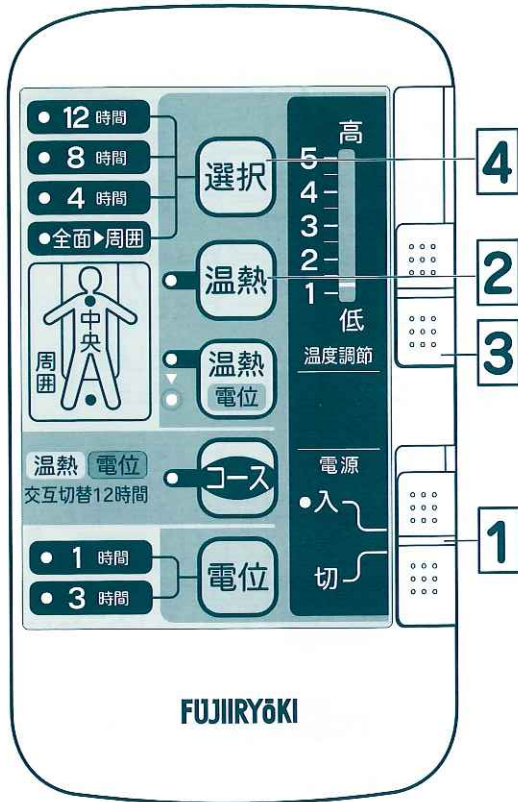

**1** 電源スイッチを「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

**2** 温熱スイッチを押してください。

- 「温熱」ランプが点灯したことをご確認ください。

**3** スライド式温度調節スイッチで温度をセットしてください。

10ページ 7参照

- 「1」で約25℃、「5」で約45℃が目安の温度です。


**4** 選択スイッチでお好みの時間にセットしてください。

- 「選択スイッチ」を押すごとに右図の順でタイマー時間を選択できます。



### 動作説明

「全面→周囲」：最初はヒーターの全面（中央・周囲）が動作しますが、3時間後中央が動作を停止し、12時間後周囲も動作を停止します。

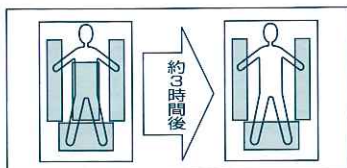

（3時間後、中央部のヒーターのみが切れます。）



### ⚠危険

乳幼児や自分で意志表示できない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけでの使用はお避けください。



低温やけどや脱水症状などを起こす恐れがあります。

禁止

### ⚠警告

温度調節「高」目盛りで長時間使用しないでください。



低温やけどの恐れがあります。

禁止

### ⚠注意

他の暖房器具との併用はしないでください。



湯たんぽ、あなか、こたつ、電気毛布などと併用しますと、本体の一部だけ温度が高くなり故障や、やけどの原因となります。

禁止

### ⚠警告

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



禁止

(次のような方は特にご注意を)  
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい人、糖尿病などの疾患のある方。

### ⚠警告

次の人は、必ず医師とご相談の上で使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
  - 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
  - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - 体温38℃以上(有熱期)の人(急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)
  - 施療部位に創傷のある人
  - 急性疾患(疼痛性)のある人
  - 知覚障害の人
  - 心臓に障害のある人
  - 貧血症の人
  - かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人
- 安静を必要とする人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 高血圧の人
- 不整脈のある人

●睡眠時無呼吸症の人

●喘息の人

●上記以外に特に身体に異常を感じている人



相談

## 低温やけどについて


- 一般にやけどといえは火・熱湯・油などの高温のものが皮膚にふれておこるものですが、比較的低い温度(40℃~60℃)のものでも長時間皮膚の同じ場所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)「低温やけど」をおこすことがあります。
- 一般のやけどは、皮膚の表層のみですが「低温やけど」は、皮膚の深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一赤くはれたり、水ぶくれができたり、やけどをした場合には直ちに専門医の診断を受けてください。
- 次のようなかたが使用するときには、周囲のかたがあらかじめ低めの温度に調節したり、使用状態に異常がないか常に注意してください。  
\*疲労の激しいときや、酒、睡眠薬、ねむ気を誘うかぜ薬を使用されたとき。  
\*お年寄り、ご病人、からだの不自由なかた。  
\*皮膚感覚の弱っているかた。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがありますので低めの温度にするなどして、使用温度に注意してください。

# （ご使用方法）

（ご使用の前に）8ページを必ずお読みください。

## 温熱／電位を使用される場合

温熱動作後、自動的に電位の治療モードへ切替わる機能です。

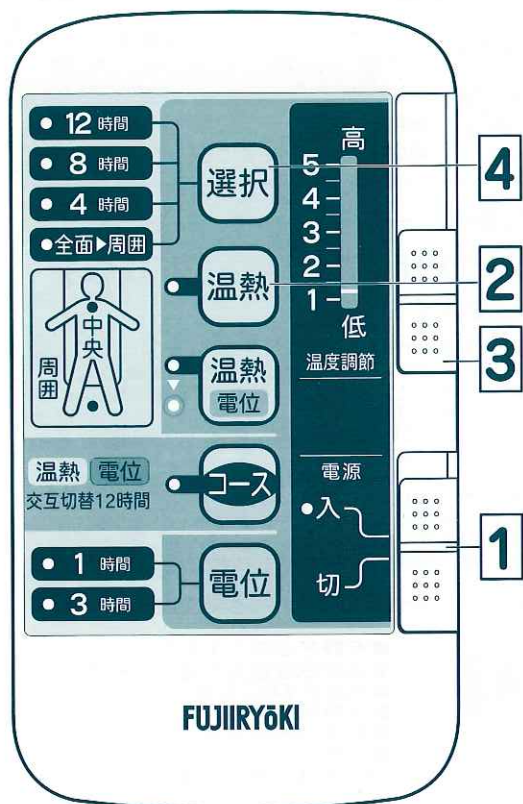

**1** 電源スイッチ を「入」にしてください。

●「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

**2** 温熱/電位スイッチ を押してください。

●「温熱／電位」の温熱側のランプが点灯したことをご確認ください。



温熱モード終了後、温熱側のランプが消え、自動的に電位側ランプが点灯し、電位モードに切替わります。

**3** スライド式温度調節スイッチ で温度をセットしてください。

10ページ 7参照



●「1」で約25℃、「5」で約45℃が目安の温度です。

### 動作説明

温熱／電位時の「選択」スイッチ  
温熱動作後、最後の1時間自動的に電位に切替わります。

12時間 温熱11時間

8時間 温熱7時間

4時間 温熱3時間

全面→周囲 温熱(中央)3時間(周囲)11時間

電位1時間

**4** 選択スイッチ でお好みの時間にセットしてください。



●「選択スイッチ」を押すごとに右図の順でタイマー時間を選択できます。






# （ご使用方法）

（ご使用の前に）8ページを必ずお読みください。

## コースを使用される場合

温熱と電位が自動的に交互に切替わる機能です。

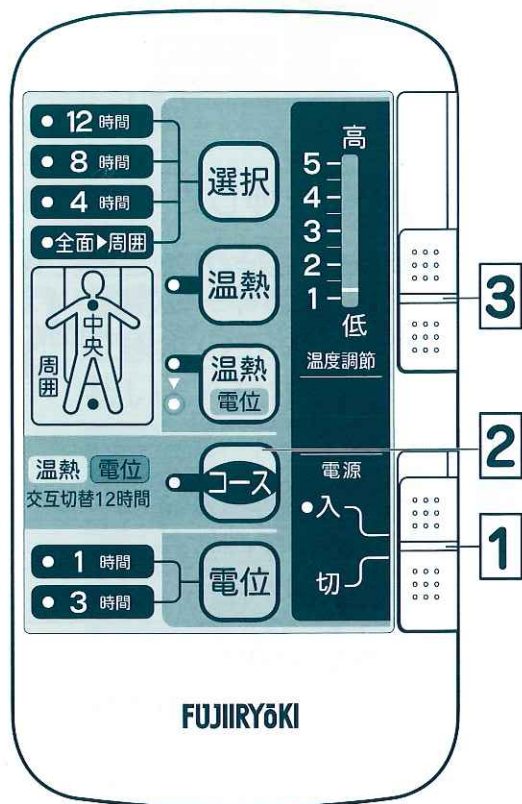

**1** 電源スイッチ を「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

**2** コーススイッチ を押してください。

- 「コース」ランプが点灯したことをご確認ください。



- 「温熱」と「電位」が自動的に、交互に切替わります。
- 選択スイッチは動作しません。


**3** スライド式温度調節スイッチ で 温度をセットしてください。

10ページ ⑦参照

### 動作説明

#### 「コース」スイッチ

温熱と電位を自動的に交互に切替え作動します。

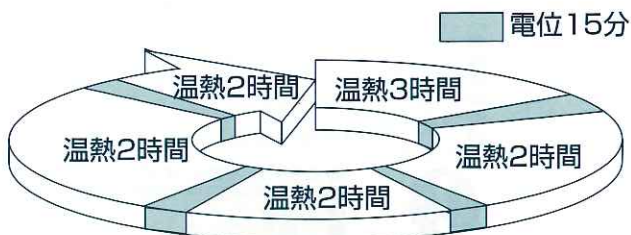

（温熱11時間+電位1時間=合計12時間）




- 「1」で約25℃、「5」で約45℃が目安の温度です。

# （ご使用方法）

（ご使用前に）8ページを必ずお読みください。

## 電位を使用される場合

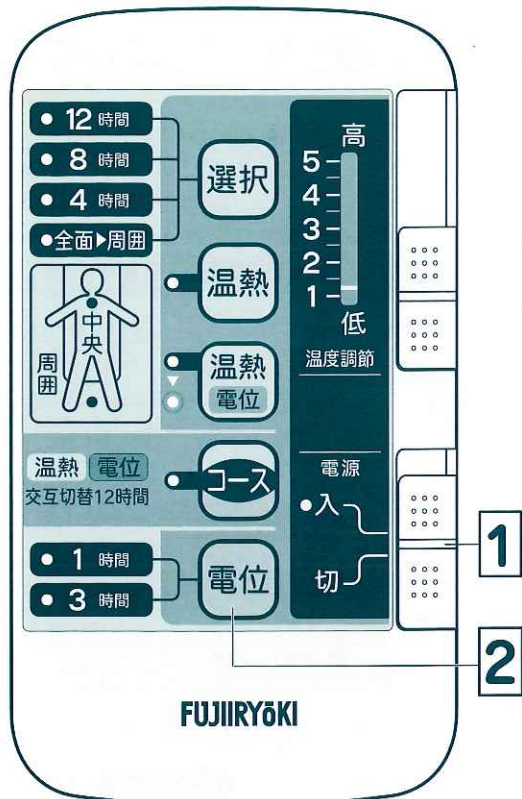

1 電源スイッチを「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

2 電位スイッチを押してください。

- 電位の「1時間」ランプが点灯したことをご確認ください。もう一回押すと「3時間」ランプが点灯しますので、お好みのタイマー時間にセットしてください。



- 選択スイッチは動作しません。
- 「温熱」は働きませんので布団は温まりません。

### ⚠ 危険

下記のような医用電気機器との併用は、それらの機器に影響を与える恐れがあるので使用しないでください。



禁止

- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 心電計などの装着型の医用電気機器

### 電位治療器において



禁止

心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しない

### ⚠ 警告

次の人は、必ず医師とご相談の上でご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 体温38℃以上（有熱期）の人（急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき）
- 治療部位に創傷のある人
- 急性疾患（疼痛性）のある人
- 知覚障害の人
- 心臓に障害のある人
- 貧血症の人
- かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人
- 安静を必要とする人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 高血圧の人
- 不整脈のある人
- 睡眠時無呼吸症の人
- 喘息の人



相談

- 上記以外に特に身体に異常を感じている人




# （ご使用後は）

1 電源スイッチを「切」にしてください。



2 電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントより引き抜いてください。

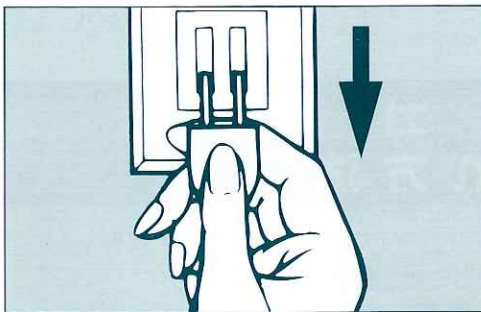

⚠ 注意

使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

● 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。




プラグ抜く



## 本体の折りたたみ方

接続コードのコネクターがコネクター接続部から抜けていることを確認し、本体脚部の方から図のように折りたたんで、ください。

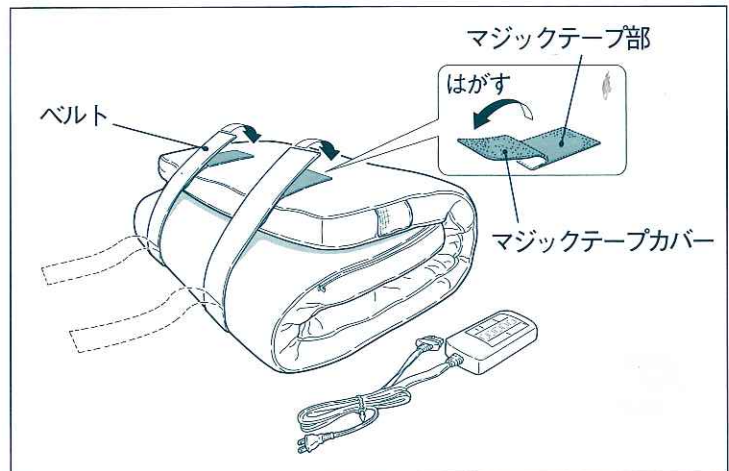

## 愛情点検



### 愛情点検

長年ご使用の場合は  
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 温度調節がきかず、異常に熱い
- その他の異常がある。

ご使用中

故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげのご購入先又はフジ医療器サービス網に点検・修理をご相談ください。

お願い しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

#### 警告



分解禁止

分解、修理は行なわないでください。

発火したり、事故や故障の原因になります。

## お手入れ方法

- 本体側布地：ポリエステル100%
- 表面布地部分のお手入れは、中性洗剤または衣服専用のシミ抜き程度のものお使いください。（使いすぎると布地をいためることがあります。）
- お手入れで汚れが取れない場合は本体側布地をはずし、ドライクリーニングをしてください。干す場合は、日の当たらない風通しの良い場所に広げて干してください。
- コントローラーは乾いた布でふいてください。
- 機器は清潔にし、温度・湿気・ほこりなどの悪影響が少ない所に保管してください。
- 長時間保管するときは「電源」スイッチを入れ、スライド式温度調節スイッチを「高」にし、よく乾燥させた後保管してください。
- 本体は絶対に洗濯しないでください。故障や事故の原因となります。
- 時々日陰干しにしてください。



#### 注意

お手入れの際は必ず電気プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やケガをすることがあります。



プラグ抜く



#### 注意

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

感電・引火の原因になります。



禁止





## アフターサービスについて

異常がある時は、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてから、お買い上げのご購入先にご連絡下さい。

### ① 保証書 (別に添付してあります)

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり、「お買い上げ日」「ご購入先」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ② 保証期間中に修理を依頼される場合

この商品の保証期間は、お買い上げの日から1年間です。お買い上げのご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

### ③ 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずお買い上げのご購入先にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

### ④ その他ご不明な場合

保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明な点は、お買い上げのご購入先、又はフジ医療器サービス網迄お問い合わせください。

### ● 補修用性能部品の保存期間

当社はこの製品の補修用性能部品の、製造打切り後、最低6年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


## 仕 様

品 名	温熱・電位治療器	型 式	HE-7000S
医療機器承認番号	20700BZZ00789000		
類 別	機械器具78家庭用電気治療器		
一 般 的 名 称	電位・温熱組合せ家庭用医療機器		
電 源	AC100V(50/60Hz)		
消 費 電 力	130W(温熱治療)、5W(電位治療)		
電 気 代	約3円60銭(温熱「高」の時の1時間当たり) ※1kWh28円での計算		
タイマー時間	4・8・12時間(温熱治療)、1・3時間(電位治療)		
温 熱 温 度	約25℃～約45℃		
電 位 出 力	-300V		
素 材	<表地> ポリエステル100% <芯材> ウレタン(プレスバランス構造)		
サ イ ズ ( 約 )	幅 97cm×長さ200cm×厚さ8.5cm		
質 量 ( 重 さ )	約8.6kg		
コード有効長	電源コード: 約2m		
製造販売業者	名称: 株式会社フジ医療器 住所: 大阪府堺市中区深井沢町284 電話: 072-279-1906(代表)		

---

## お客様相談窓口

---

 フリーダイヤル

**0120-027612**

受付：月曜～金曜 午前10時～12時  
午後 1時～ 5時

\*但し、祝祭日、年末年始、夏期休暇は  
休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号：06-6644-9103

E-mail：fj\_soudansitu@fujiiryo.co.jp

\*FAX・E-mailでの受付は24時間行っており  
ますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤル  
の受付時間となります。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**  
大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号



# ウェルナイトブレスバランス HE-7000S

## 温熱を使用される場合について

本器の温熱回路は、速熱方式を採用してる為、運転直後は設定温度までヒーターがフルパワーで動作します。  
緩やかな温度上昇がお好みの場合には、解除もできます。

### 「緩やかな温度上昇」に設定する場合（速熱方式を解除する場合）


電源が切れた状態から温熱スイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にしてください。

- \* 「温熱ランプ」が5秒間点滅し、その後点灯に切替わります。
- \* 動作記憶により、以後電源を入れる毎に「温熱ランプ」が5秒間点滅し、点灯に切替わります。（「緩やかな温度上昇」の設定になっています）
- \* 動作記憶の記憶時間は3日間です、3日間本器を使用しなかった場合は通常運転に戻ります。

### 「緩やかな温度上昇」の設定を解除する場合（通常の運転状態に戻す場合）

設定時と同じ操作で、温熱スイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にしてください。

- \* 「温熱ランプ」がすぐに点灯します。（通常の運転状態になります）

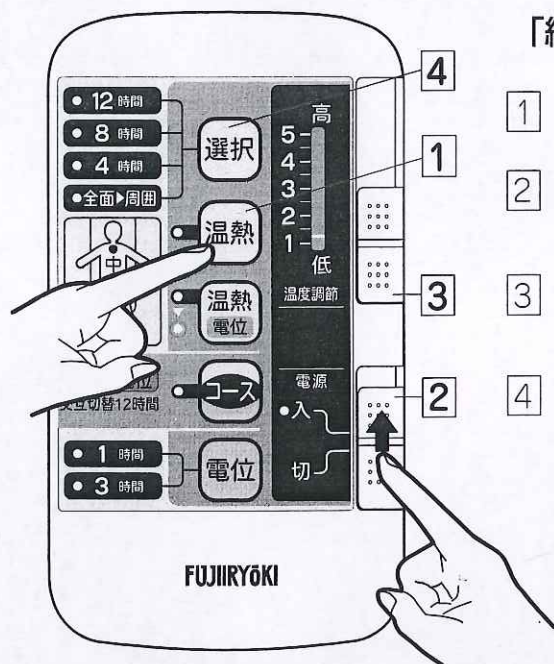

### 「緩やかな温度上昇」設定及び運転手順

- 1 温熱スイッチを押しながら
- 2 電源スイッチを「入」にする  
「温熱ランプ」が5秒間点滅し点灯に切替わる
- 3 スライド式温度調節スイッチで温度をセットする
- 4 選択スイッチでお好みの時間をセットする