


マイリラ フットマッサージャー

品番：MRL-F1

取扱説明書

添付文書

保証書付
裏表紙にあります。

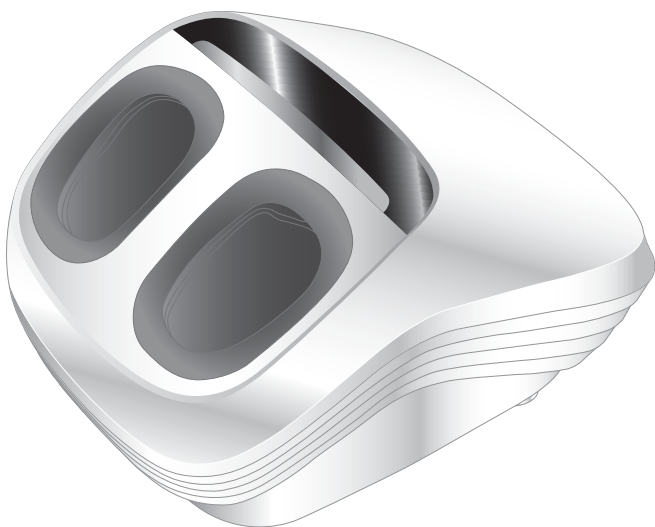

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる
筋肉のコリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用すること



もくじ

■ 安全上のご注意	1～3
■ 使用目的または効果	3
■ 各部のなまえとはたらき	4
■ ご使用の前に	5
■ 使い方	5～7
■ 着脱カバーの取り付け・取り外し	8
■ お手入れ	9
■ 保管について	9
■ 故障かなと思ったら	10
■ 愛情点検について	11
■ 仕様	12
■ 保証とアフターサービス	13
■ 保証書	裏表紙

- このたびは当社のフットマッサージャーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見ることできる場所に必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえりサイクルにご協力お願いします。




安全上のご注意



- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 警告	 注意
誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。	誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性および※物的損害の発生が想定される内容を示しています。








※物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例

		
上図の記号は 警告・注意 を示します。 具体的な注意内容は△の中の絵や記号近くに文章で示します。	上図の記号は 禁止 を示します。 具体的な禁止内容は⊘の中の絵や記号近くに文章で示します。	上図の記号は 強制・指示 を示します。 具体的な指示内容は●の中の絵や記号近くに文章で示します。

 警告	
万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。またお客様による分解・修理は絶対にお止めください。	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●煙が出ている、変なおいや音がする(異常状態)●本製品の内部に水や異物などが入った●電源コードが損傷または断線した●落としたり、本製品を破損した <p style="text-align: center;">↓</p> <ol style="list-style-type: none">①使用中の場合はすぐに操作部の「停止」ボタンを押して使用をやめる②操作部の「電源」ボタンを押して電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く③お買い上げ販売店に修理を依頼する

⚠ 警告

 禁止	<p>次の人は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医師からマッサージを禁じられている人 例: 血栓(塞)栓症・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など症状を悪化させるおそれがあります。 	<p>足挿入部に異物などがいないか、またはペットがいないか確認する。 確認しないと、事故やけがの原因になります。</p>
	<p>自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p>	<p>ヒーターを使用するときは、同じ部位に長時間触れないようにする。</p> <p>低温やけどのおそれがあります。</p>
	<p>幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。</p> <p>けがや故障のおそれがあります。</p>	<p>足のマッサージ以外の目的で使用しない。 足を入れたまま立ったり、本体の上に座ったりしない。 事故やけが、故障の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 ● 悪性腫瘍のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● 妊娠中の人、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人 ● 治療部位に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人【例: 急性炎症症状(けん急感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき】 ● 骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど急性疼(とう)痛性疾患の人 ● 低温やけどをしたことのある人 ● 上記以外に身体に特に異常を感じている人 <p>事故や体調不良をおこすおそれがあります。</p>	<p> 禁止</p> <p>他製品に付属の AC アダプターを使用しない。 AC アダプターの故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。</p> <p>そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。</p>	<p>AC アダプターや DC プラグは正しく確実に接続する。また、たこ足配線はしない。</p> <p>AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>動かない場合や、異常を感じたときはすぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてお買い上げ販売店に修理を依頼する。</p> <p>そのまま使用すると火災や感電の原因になります。</p>	<p>AC アダプターの取り扱いについては下記の項目に注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 傷つけたり、破損させたりしない ● 加工しない ● 無理に曲げたり、引っ張らない ● ねじらない ● 使用時には束ねない ● 重いものを載せない ● 挟みこんだりしない ● 本体に巻きつけない ● 足を引っ掛けない <p>電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p>
	<p>ご使用の前に、必ず本体布カバーと着脱カバーが破れていないか確認する。 (どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼する)</p> <p>事故やけが、低温やけどの原因になります。</p>	<p>製品を布団やこたつの中に入れて使用しない。 また可燃物やストーブなど火気の近く、ホットカーペットなど暖房器具の上では使用しない。 内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。</p>
	<p>電源は交流 (AC) 100V を使用する。</p> <p>守らないと、火災やショートの原因になります。</p>	<p>着脱カバーを外した状態で使用しない。</p> <p>事故やけが、低温やけどの原因になります。</p>
		<p> 分解禁止</p> <p>絶対に分解・改造・修理をしない。</p> <p>感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。</p>
	<p> ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。</p> <p>感電のおそれがあります。</p>	
	<p> 水濡れ禁止</p> <p>本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p>	
	<p> 水場禁止</p> <p>お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p>	

⚠ 注意

 必ず守る	<p>使用時間は1回15分以内にする。また同一箇所への連続使用はしない。 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。また低温やけどのおそれがあります。</p>	 禁止	<p>電源プラグを抜く 使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>ご使用の前に必ず、操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する。 確認しないと、事故やけがの原因になります。</p>		<p>他の治療器との併用はしない。また一人用機器のため複数の人が同時に使用しない。 事故や体調不良をおこすおそれがあります。</p>
	<p>本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する。 不安定な場所で使用すると、事故やけが、故障の原因になります。</p>		<p>本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。</p>
	<p>ACアダプターをコンセントから抜くときは、コード部を持たずに、必ず先端のACアダプター本体を持って引き抜く。 守らないとコード部が破損・断線し、火災や感電の原因になります。</p>		<p>睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない。 けがや低温やけどをおこすおそれがあります。</p>
	<p>ACアダプターのホコリなどは定期的にとる。 ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。定期的にACアダプターをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。</p>		<p>本体や操作部に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。</p>
	<p>しばらく使用しなかったときは、本製品が正常に作動することを確認してから使用する。 確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。</p>		<p>ローラー部に、故意に力を加えて無理やり止めない。またローラー部や本体のすき間などに手や足を入れない。 事故やけが、故障の原因になります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>停電のときは直ちにACアダプターをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>	<p>直射日光の当たるところでの使用・保管はしない。 変形・変色・変質のおそれがあります。</p>	
	<p>お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 守らないと、感電やけがのおそれがあります。</p>	<p>操作ボタンを2つ以上同時に押さない。 故障の原因になります。</p>	
		<p>足に装飾品をつけて使用しない。 けがや故障の原因になります。</p>	
		<p>移動するときは、引きずらない。 床や畳を傷つけるおそれがあります。</p>	

使用目的または効果


あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解


ご注意 効能や効果は個人により差があります。

各部のなまえとはたらき

本体

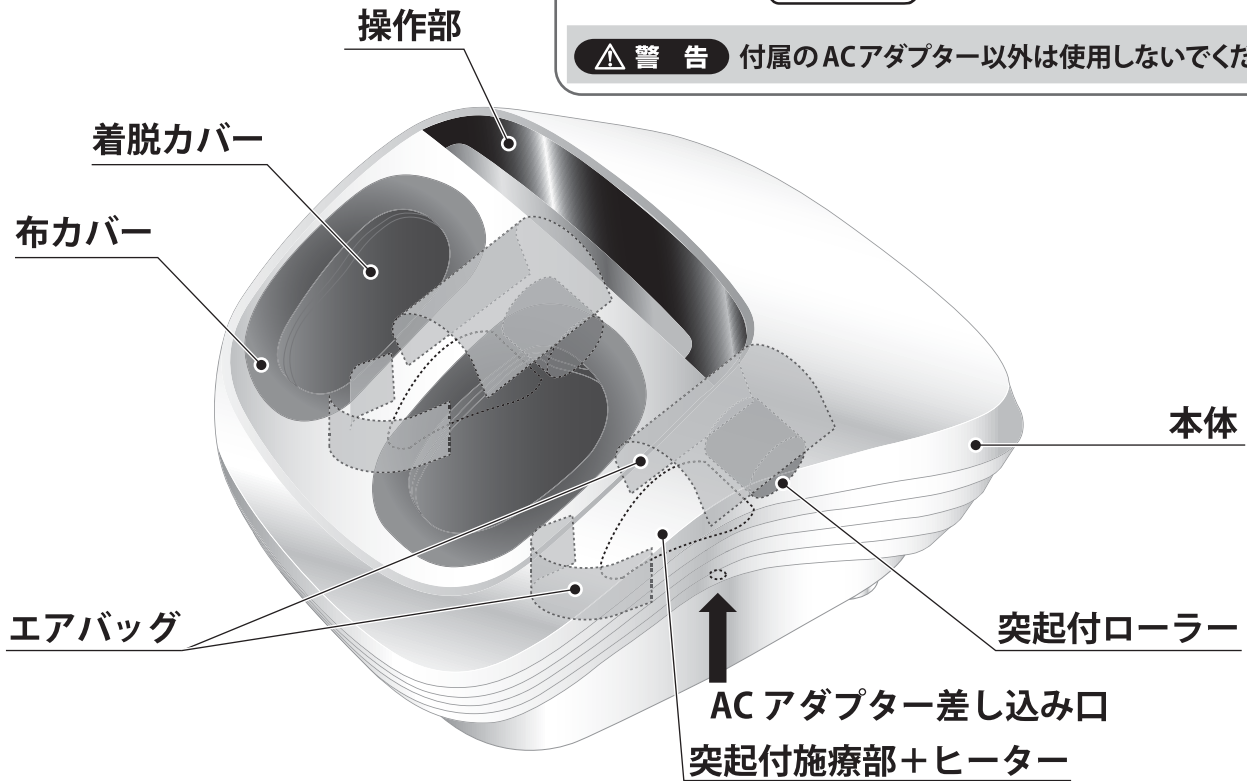

付属品 (ACアダプター 型式: IVP1200-3000P)

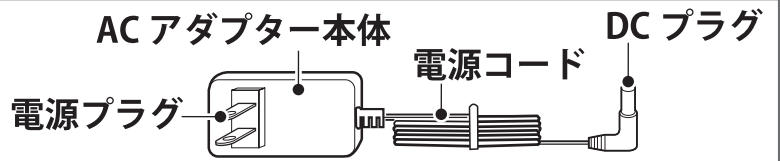

警告 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

マッサージ部の特徴

エアバッグで足の甲とかかとをつかむように圧迫・開放させてマッサージします。
また突起付ローラーが回転しながらつま先を刺激し、突起付施療部が前後・上下に動くことで足裏をもみマッサージします。

操作部

警告

手袋などを着用した状態で使用しない。
誤作動の原因となります。

電源ボタン

電源が入ります。

ヒーターボタン

自動コースを動作中の時に使用できます。
自動コースが終了するとヒーターも同時に終了します。

※ヒーターのみで使用できません。



自動コースボタン

3つのコースを選択できます。
約15分で自動的に終了します。

停止ボタン

全ての動作が停止します。


エアー強弱ボタン

エアーの強さを3段階で切り替えられます。
自動コースを選ぶと初めは「弱」のランプが点灯します。

ご使用前に

1 マットなどを敷いて本体を設置する

- 本体を安定した場所に置いてください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。また同じコンセントを使用しないでください。AV機器に雑音が入ることがあります。
- マットは敷くことをお勧めします。製品や床面を傷つけたり、跡が残ったりするのを防ぎます。また使用中の動作音を和らげます。

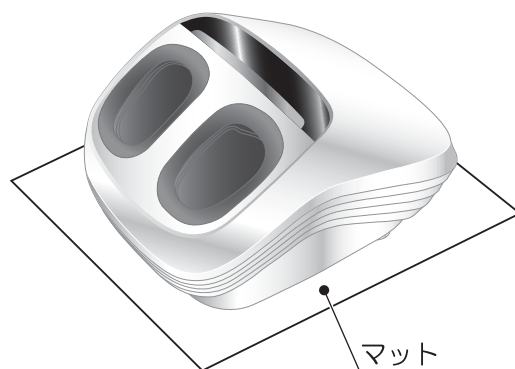

2 本体布カバーや着脱カバーが破れていないか確認する


- 確認後は必ず着脱カバーを本体に取り付けてから使用してください。
- ※取り付け方はP8をご確認ください。

⚠ 警告

どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼する。
事故やけが、低温やけどの原因になります。

3 ACアダプターのDCプラグを本体と接続し、コンセントに差し込む

- 図のように置いた時、本体右側側面の中央付近にACアダプターのDCプラグ差込口があります。

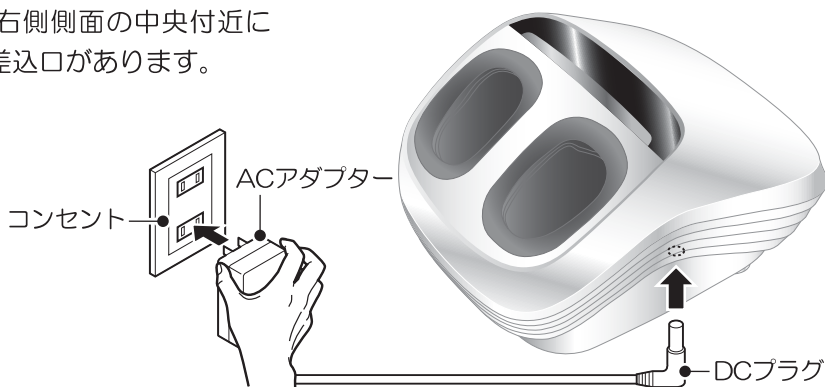

使い方

1 両足を足挿入部に入れる

- 椅子などに座ってイラストのように足を入れます。
- ※ひざの角度が約90度になるように座ります。

⚠ 警告

キャスター付きの椅子に座って使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

動作中には足を入れない。
事故やけがの原因になります。



使い方

マッサージをする

2 「自動」ボタンを押し、マッサージをする

- 自動ボタンを押すと自動ボタンの上にあるランプ（3つ）の左側が点灯し、マッサージが開始します。
- 自動ボタンを押すたびにコースが切り替わります。
- 約15分で自動的にマッサージが終了します。



■コース仕様



⚠ 注意

製品に大きな負荷がかかると安全装置が作動して全てのランプが消灯し、動作が止まる場合があります。

動作を開始してすぐ停止した場合

しばらくしてから「自動」ボタンを押してマッサージを再開してください。

連続で使用していて停止した場合

30分経ってから「自動」ボタンを押してマッサージを再開してください。

各自動コースの特徴(時間:約15分)


- | | |
|------|---|
| コース1 | エアバッグと突起付ローラー・突起付施療部が足全体をマッサージ。疲れた足を突起でぐいぐい揉み上げ、疲れた足の疲労回復を促すマッサージ。 |
| コース2 | 突起付ローラー・突起付施療部が足裏を刺激しながら、エアバッグでかかとを挟み込んだり、足の甲をギュッと締めつけ・開放することで、血行促進を促すマッサージ。 |
| コース3 | エアのみでマッサージをおこないます。突起付エアバッグは、かかとをつまむように挟み込んでもみほぐし。足の甲にあるエアバッグは足を包み込むように動作してリラックスしながらマッサージ。 |

3 「強弱」ボタンを押して、エアの強さを調節する

- 強弱ボタンを押すたびに「弱」・「中」・「強」が切り替わり、ランプで表示します。

⚠ 注意

はじめて使用する場合は「弱」から使用し、慣れてきたら好みのエア強さでマッサージしてください。

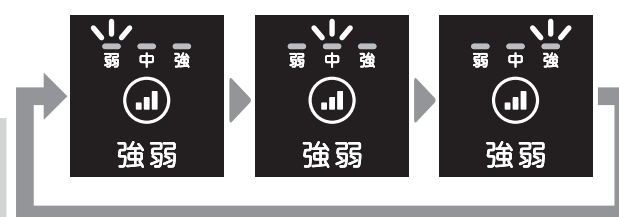

使い方

ヒーターを使用する

△ 注意


ヒーターの単独動作はできません。

必ず自動ボタンを押して自動コースを選択してから、ヒーターボタンを押してヒーターを動作してください。

4 自動ボタンを押して、マッサージを開始し、ヒーターボタンを押してヒーターを入れる

- 自動コース終了と同時にヒーターの電源が切れます。
- ヒーターを途中で切りたい場合は、もう一度「ヒーター」ボタンを押します。


■ヒーター仕様

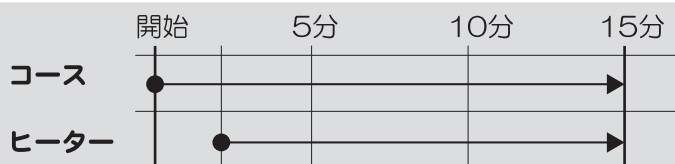

コースが終了すると同時にヒーター動作も終了

- ヒーターは土踏まずからかかと付近にあります。足裏全体が温まるものではありません。

※温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。

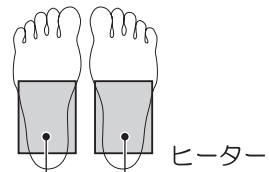

低温やけどについて

比較的低い温度(40℃以上)でも、発熱体を同じ場所に長時間当てていると、紅斑や水泡などの症状がでるやけどのことです。自覚症状がない場合もありますので十分注意してください。

● マッサージやヒーターによる温めを途中でやめるには

● 身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合は

停止ボタンを押してください。

すべての動作が停止します。ACアダプターをコンセントから抜いてください。

△ 注意




必ず守る

本製品の使用時間は1回15分以内にする。また同一箇所への連続使用はしない。続けて使用する場合は、30分以上あけて使用する。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良をおこすおそれがあります。

5 自動コースが終了したら、ACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを抜く

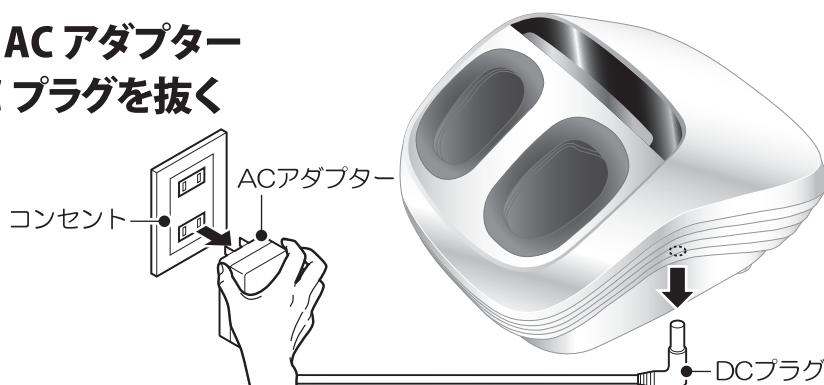

着脱カバーの取り付け・取り外し

△ 注意

必ず着脱カバーを取り付けた状態で使用する。
事故やけが、低温やけどの原因になります。



必ず本体布カバーと着脱カバーが破れていないか確認する。どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼する。
事故やけが、低温やけどの原因になります。

取り付け

1 ACアダプターをコンセントから抜く



2 着脱カバーに手を入れる

- 着脱カバーには左右があります。
- 面ファスナーを外側／下にしてください。

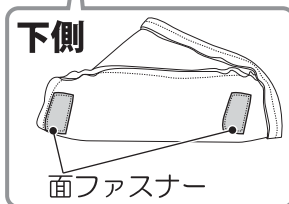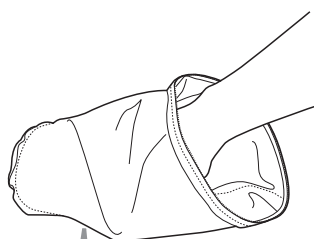

左用


右用

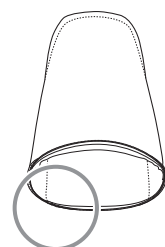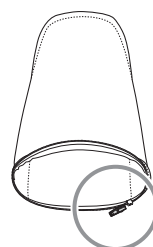

左用…ファスナーの取っ手有り
右用…ファスナーの取っ手無し

3 着脱カバーを本体に取り付ける

- 手を奥まで入れて、つま先／かかと部についている面ファスナーを本体布カバー側の面ファスナーに貼り付けて固定します。


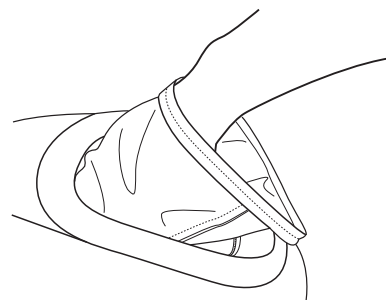


4 ファスナーを閉める

- ファスナーは確実に最後まで閉めてください。

左側

右側

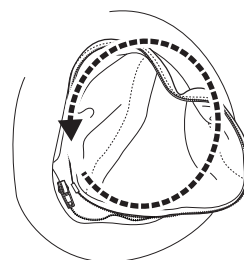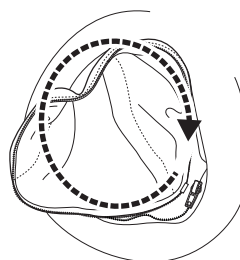

取り外し

1 ファスナーを外し、面ファスナーを外してから着脱カバーを引き抜く

お手入れ

着脱カバー

着脱カバーは取り外すことができますので、着脱カバーが汚れたら取り外して洗濯してください。

※本体布カバーは取り外しできません。

※着脱カバーは色落ちする可能性がありますので、他のものと分けて洗濯してください。

- ①本体から着脱カバーを取り外します。
- ②洗濯ネットに入れ、中性洗剤を入れた洗濯機で洗ってください。
- ③風通しの良い日陰に干し、自然乾燥で乾かしてください。

本体部

乾いたやわらかい布で拭いてください。

汚れのひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませてよくしぼった布で拭き取り、やわらかい布でからぶきしてください。

操作部

乾いたやわらかい布で拭いてください。



警告



ぬれ手禁止

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



分解禁止

絶対に分解・改造・修理をしない。
感電や故障の原因になります。また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

注意



電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
守らないと、感電やけがのおそれがあります。



禁止

お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。
変形・変色・変質のおそれがあります。

保管について

- コンセントから AC アダプターを抜いて、コードに傷がつかないように保管してください。
- 使用後は汚れやホコリを、乾いたやわらかい布などできれいに拭き取ってから保管してください。
- しばらくご使用にならないときは、カバーなどをかけホコリが付かないようにしてください。
- 高温・多湿・直射日光の当たるところ、ホコリの多いところには保管しないでください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめになり、それでも調子が悪いときは直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

こんな時は	考えられる原因と処置
電源ボタンを押してもランプが点灯しない	●AC アダプターと DC プラグが抜けていませんか？ P5 を参照しながら正しく接続してください。
ボタンを押しているのに押せなかったり、誤作動したりする	●手袋などをして操作パネルのボタンを押していませんか？ 必ず素手の状態で操作パネルのボタンを押してください。
使用中に停止し、すべてのランプが消灯している	●製品に足を入れたまま、立ったりしていませんか？ ローラーや突起付施療部に足を押しつけていませんか？ 製品に大きな負荷がかかっています。安全装置が作動し、動作が止まる場合があります。しばらく経ってからマッサージを再開してください。 ●連続して長時間使用していませんか？ モーターの温度が高くなっています。安全装置が作動し、動作が止まる場合があります。30 分以上経ってからマッサージを再開してください。
使用中に停止し、電源ランプのみが点灯している	●タイマー機能が働き、約 15 分で自動停止します。1 日2回を目安に、連続使用は避けてご使用下さい。
ヒーターボタンを押してもランプが点灯しない	●ヒーターのみの動作はできません。 必ず自動コースボタンを押してから、ヒーターボタンを押してください。(P7 参照)
ヒーターがあまり温かにならない	●ヒーター付近の着脱カバーを均一に伸ばしてください。 ●温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。あらかじめご了承ください。
動作中の音が気になる	●構造上やむを得ず発生するもので機能などに影響はありません。

点検後も異常がある


ただちに
使用中止

お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください

愛情点検について

長年ご使用の「マイリラ フットマッサージャー」の点検を！

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 <p>愛情点検</p>	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">●ACアダプターや電源コードが異常に熱い●電源コードに深い傷や変形がある●焦げ臭いにおいがする●操作中に異常な音や振動がする●スイッチを入れても時々動作しないことがある●その他異常や故障がある	<p>使用中止</p> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、「電源」ボタン押しで電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、必ずお買い上げ販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
---	---	---

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体のルールに従ってください。

販売名	マイリラ フットマッサージャー
品番	MRL-F1
類別／一般的名称	機械器具 77 バイブレーター／家庭用電気マッサージ器
医療機器認証番号	228AABZX00106000
電気定格	AC100V 50-60Hz
消費電力	39W(電熱装置 8.5W を含む)
本体定格電圧	DC12V
本体消費電力	30W
定格時間	15分
オートタイマー	約 15分
もみ回転数	約 8～30回／分
エアーマッサージ空気圧	最大約 70～110kPa
寸法	幅 395 × 奥行き 470 × 高さ 275mm
質量	約 5.0kg
専用 AC アダプター	型式：IVP1200-3000P
AC アダプターコード長さ	約 1.8m
材質	本 体：ABS 樹脂 張り地：ポリエステル 85%、ポリウレタン 15%
製造販売元	株式会社 惣田製作所 滋賀県彦根市鳥居本町 492

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

- 保証書（取扱説明書の裏表紙にあります。）
お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

- 補修用性能部品の保有期間
当社はこのマッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

10 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止してください。操作部の「電源」ボタンを押して電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

- 保証期間中に修理を依頼される場合
ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

- その他ご不明な場合
アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

FUJIIRYOKI フットマッサージャー 保証書

持込修理

商品名	マイリラ フットマッサージャー MRL-F1	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間	保証対象	本体（但し、消耗品は除く）
ご購入者	フリガナ	お買い上げ日	年 月 日
	ご芳名		様
	ご住所	〒	ご購入先
	電話 ()		電話 ()

【無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
 - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理のご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の表示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

- ※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-027612

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

0120 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・E-mail での受け付けも行っております。

FAX番号 06-4793-0818

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
フジ医療器ホームページ <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mail での受け付けは24時間行ってはおりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

発売元



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2016年10月(第1版)