

TRADDY LIVING CHAIR

医療機器認証番号：306AHBZX00037000
類別：機械器具 77 バイブレーター
管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器

添付文書

取扱説明書

保証書付
裏表紙にあります

販売名：リビングマッサージチェア T24

品番：TR-Z1

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
ご使用前の準備	8
自動コースの使いかた	12
手動マッサージの使いかた	14
マッサージ動作中の調節のしかた	16
途中でマッサージを変更するとき	17
お手入れと保管のしかた	18
Q&A	19
故障かなと思ったら	20
保証とアフターサービス	21
仕様	22
保証書	裏表紙

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用



疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる
筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用するこ

- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見ることできる場所に必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。



安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

<絵表示の例>

	⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 （左図は、分解禁止）
	● 記号は、強制（必ず守ること）を示します。 （左図は、電源プラグをコンセントから抜く）

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることできる場所に、必ず保存してください。

警告





使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼する。また、カバーを外した状態で使用しないこと。

カバーが破れたり外した状態で使用すると、感電やけが、衣服や髪が巻き込まれるおそれがあります。

次の人は、使用前に医師と相談のうえ、使用する。


- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人
- 体温 38℃以上（有熱期）の人
（例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき。）
- 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、捻挫・肉離れなどの急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人
- 背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
- 椎間板ヘルニア症の人 ● 腱鞘炎の人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人



警告

	<p>動かなくなったり異常がある場合はすぐにマッサージを停止し、ACアダプターを抜いて、ご購入先またはお客様相談窓口にて点検・修理を依頼する。 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。首の前方は避け、過度に強いマッサージとならないように注意する。事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>背もたれ角度を変更するときは、必ず周囲（本体の後部、前部、側部、下部など）に人やペット、物がないことを確認する。事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。</p>
	<p>ACアダプターのプラグやコネクタは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。感電やショート・発火の原因になります。</p>
	<p>この機器で遊ぶことがないように、お子様を監視することが望ましい。事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>次の人は、使用しない。身体に異常が起こる場合があります。 ● 医師からマッサージを禁じられている人 （例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）</p>
	<p>本体（背もたれ部）のカバーを故意に外したり、破いたり、切り取ったりしない。 カバーが外れたり破れた状態で使用すると、衣服や髪が巻き込まれけがのおそれがあります。</p>
	<p>交流 100V 以外の電源は、使用しない。火災や感電の原因になります。</p>
	<p>付属の AC アダプター以外は使用しない。また、付属のアダプターで他の電気製品を使用しない。 事故や故障、やけどのおそれがあります。</p>
	<p>破損している AC アダプターを使用しない。感電やショート、火災のおそれがあります。 破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
	<p>ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人には使用させない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>お子様には使用させない。お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。 また、幼児を近づけない。故障や事故、けがのおそれがあります。</p>
	<p>ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。感電のおそれがあります。</p>
	<p>浴室など湿気が多い場所で使用したり、保管しない。また、水などの液体がかからないようにする。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。</p>
	 <p>絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。</p>

安全上のご注意

注意

	<p>使用時間は1回10分以内にする。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。 長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 ＜お願い＞1日の使用は1人30分以内にしてください。</p>
	<p>健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ● 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人 ● 骨や内臓に起因する腰痛の人 ● 打ち身やねんざしやすい人 ● 乗物酔いの激しい人 ● 過去に心臓や内臓の手術をされた人 守らないと健康をそこなうおそれがあります。</p>
	<p>水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。</p>
	<p>操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本品が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>使用前に、本体に異物がはさまっていないか確認する。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>もみ玉が収納位置にあることを確認してから、ゆっくり座る。事故やけがの原因になります。</p>
	<p>使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや、しばらく使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。</p>
	<p>本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。</p>
	<p>使用後は背もたれ部を完全に起こす。事故やけがの原因になります。</p>
	<p>使用後はACアダプターをコンセントから抜く。 お子様のいたずらなどによる事故のおそれがあります。</p>
	<p>コード類はねじれをほどいて保管する。感電や火災、故障の原因になります。</p>
	<p>使い始めは、弱い刺激でマッサージする。けがのおそれがあります。</p>
	<p>本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理する。 詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。</p>
	<p>定期的にお手入れを行う。 本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。</p>

	<p>停電が起こったときは、直ちにACアダプターをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故のおそれがあります。</p>
	<p>ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜く。また、ACアダプターのコネクタを本体ソケットから抜くときは、コードを持たずにコネクタとソケットを持って引き抜く。感電やショート・発火の原因になります。</p>
	<p>使用後や使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 ほこりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。 感電やけがのおそれがあります。</p>

注意

AC アダプターや電源コードを破損するようなことはしない。

- 傷つけない ● 破損させない ● 加工しない ● 無理に曲げたり、引っ張らない
- ねじらない ● 束ねない ● 重いものを載せない ● 挟み込まない

感電や火災、故障の原因になります。

食後すぐや、飲酒後は使用しない。気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。

ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなど暖房器具の上で使用しない。

また、たばこを吸いながら使用しない。火災の原因になります。

背もたれ部に座らない。また、座部に立たない。

利用者や本体が転倒して、事故やけが、故障のおそれがあります。

背もたれの先端に過度な荷重をかけない。事故やけが、故障のおそれがあります。

付属品以外は使用しない。故障の原因になります。

マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。けがのおそれがあります。

頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。けがのおそれがあります。

もみ玉に素肌をあてない。素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることがあります。

ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をはさまない。体調不良やけがのおそれがあります。

マッサージ動作中に AC アダプターを抜かない。故障やけがのおそれがあります。

使用中は眠らない。無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。

本体に2人以上乗らない。故障やけがのおそれがあります。

ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

マッサージの目的以外には使用しない。故障や事故の原因になります。

他の治療器を同時に使用しない。事故や体調をくずすおそれがあります。

人や物を乗せて移動しない。故障やけがのおそれがあります。


木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずって移動をしない。床面に傷がつくおそれがあります。

本体を倒したり、強い衝撃を与えない。故障やけがのおそれがあります。



各部のなまえとはたらき


本体

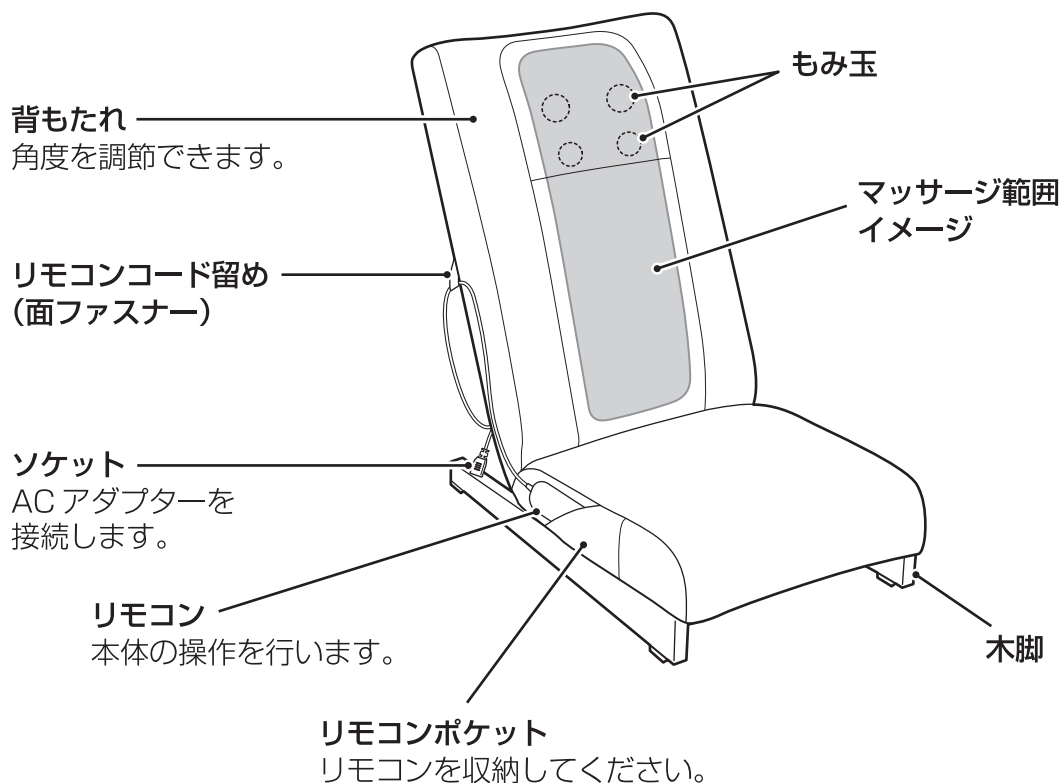


付属品

ACアダプター (MODEL: IVP2400-2000)


※付属のACアダプター以外は
使用しないでください。

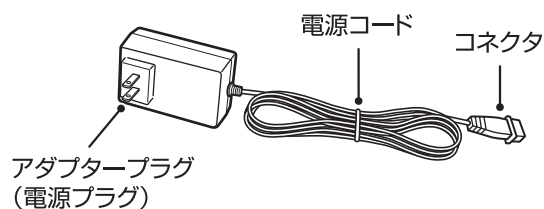

背クッション

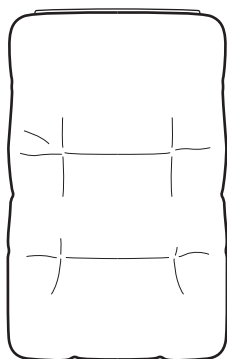


座面クッション

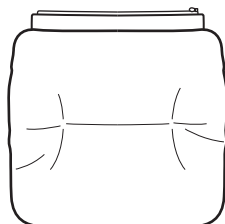

背・座面クッション
取り付け時イメージ

リモコン

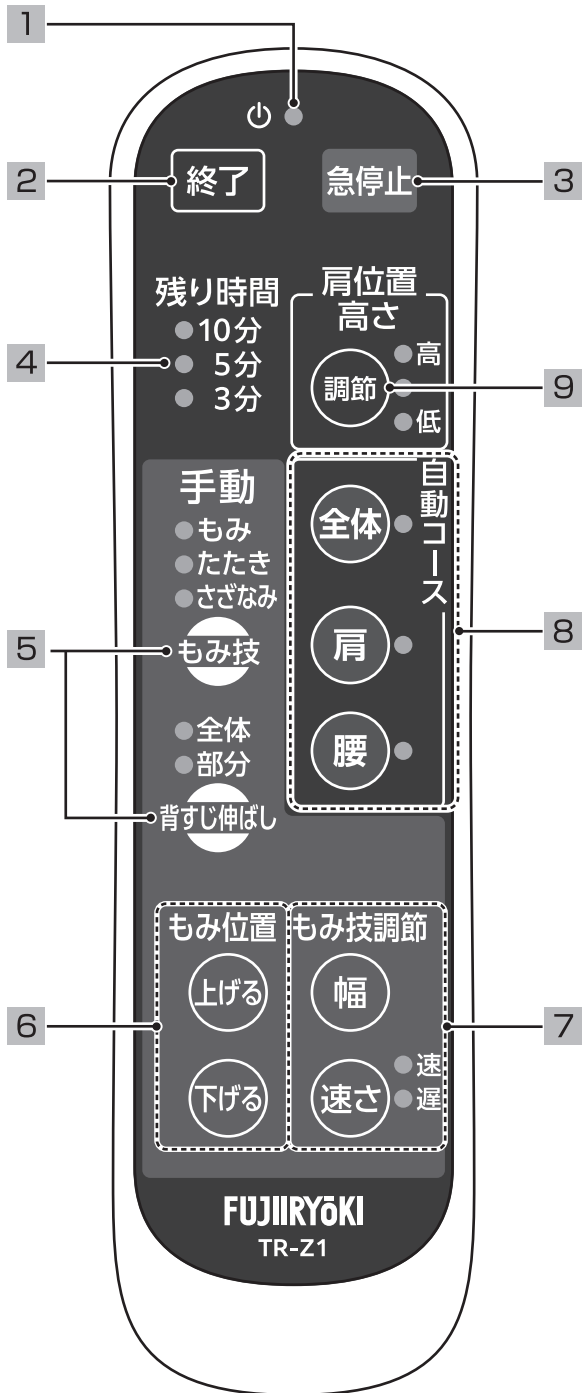

名称	
1	主電源ランプ
2	終了ボタン マッサージが途中で終了し、もみ玉が収納位置へ戻ります。
3	急停止ボタン 全ての動作を停止します。 (すぐにマッサージを停止したいときに押してください。)
4	残り時間表示ランプ タイマーの残り時間を表示します。
5	手動もみ技選択ボタン もみ技:「もみ」「たたき」「さざなみ」 背すじ伸ばし:「全体」「部分」から選択できます。
6	もみ位置調節ボタン 手動もみ技のもみ玉上下位置を調節します。
7	もみ技調節ボタン 手動もみ技のもみ玉幅や、速さを調節します。
8	自動コース選択ボタン 3種類のコースから選択できます。
9	肩位置高さ調節ボタン 肩位置の高さを3段階から調節します。

ご使用前の準備

本体を設置する

⚠ 警告


- 浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

⚠ 注意

- 水平な場所で使用する。
故障や事故の原因になります。
- ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなど暖房器具の上で使用しない。
また、たばこを吸いながら使用しない。
火災の原因になります。

周囲にスペースをあけて、凹凸のない水平なところに設置する。

- 背もたれを倒したときに周囲に当たらないよう、あらかじめ後方向に45cm以上のスペースをあけてください。
- たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。
- 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の近くなど、高温になるところへの設置は避けてください。本体や付属品が変色したり、変質するおそれがあります。

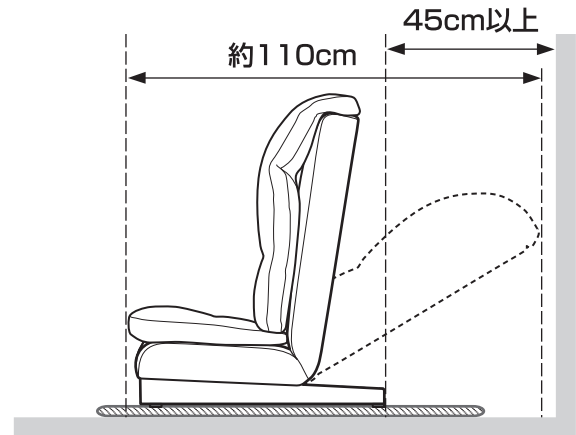


本体を移動する

⚠ 注意

- 人や物を乗せて移動しない。故障やけがのおそれがあります。
- ACアダプターをコンセントに差し込んだまま移動しない。感電や火災、故障の原因になります。
- 木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずったりしない。床面に傷がつくおそれがあります。

持ち上げる場合は、図のように背もたれを前に倒し、本体の下側を抱えるようにして持ち上げ、移動してください。

- 背もたれを持って移動しないでください。背もたれの角度が変わり、事故やけがのおそれがあります。
- ゆっくり慎重に運んでください。
- 搬入中にリモコンを落とさないよう、ご注意ください。
- 足元に十分注意して、ゆっくりと下ろしてください。
- 背もたれはロックがはずれていますので、背もたれに手をそえてゆっくり後ろに倒してから角度調節してください。

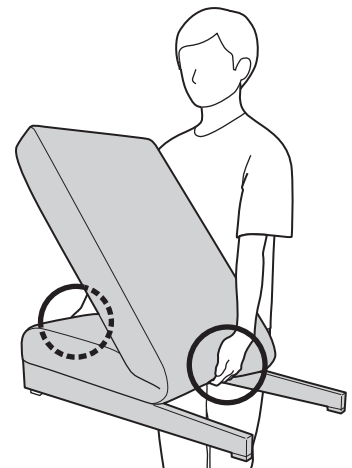


ACアダプターを取り付ける

! 警告

- 交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電の原因になります。
- 付属品の AC アダプター以外は使用しない。 事故や故障、やけどのおそれがあります。
- 破損している AC アダプターを使用しない。
感電やショート、火災のおそれがあります。
破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。 感電のおそれがあります。


1. 本体のソケットと、ACアダプターのコネクタをつなぐ。 コネクタの向きを確認し、しっかり差し込む。

- コードを持って引っ張ったりしないでください。
- 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- AC アダプターやコードが傷んだり、プラグにゴミがついていないか確認してください。

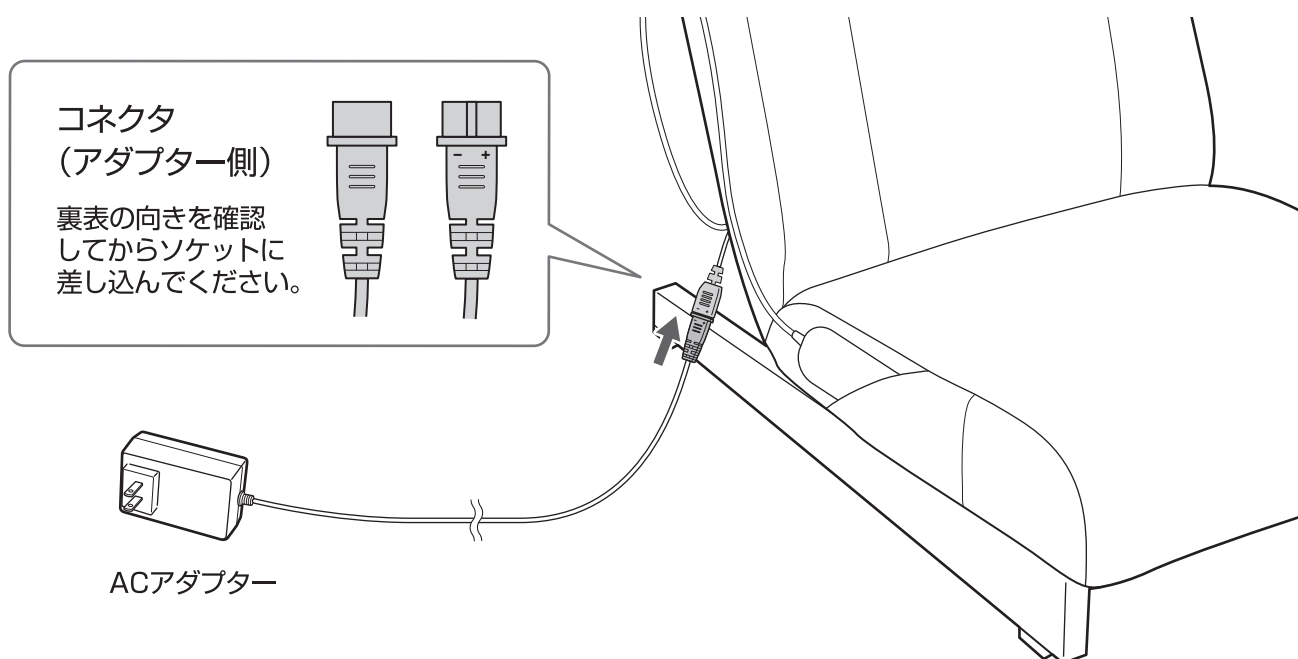

2. ACアダプターをコンセントに差し込む。

- リモコンの「主電源ランプ」が点灯します。

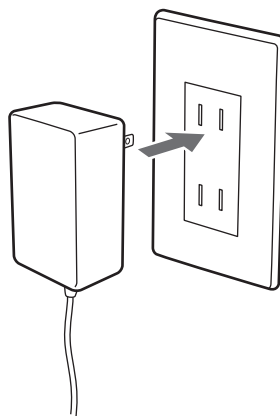


ご使用前の準備

背クッション・座面クッションの取り付けかた

背クッションは背もたれ上部のファスナー (①) に取り付け、
座面クッションは座面下部のファスナー (②) に取り付ける。


- クッションの裏表を確認してから取り付けてください。間違っていると取り付けできません。

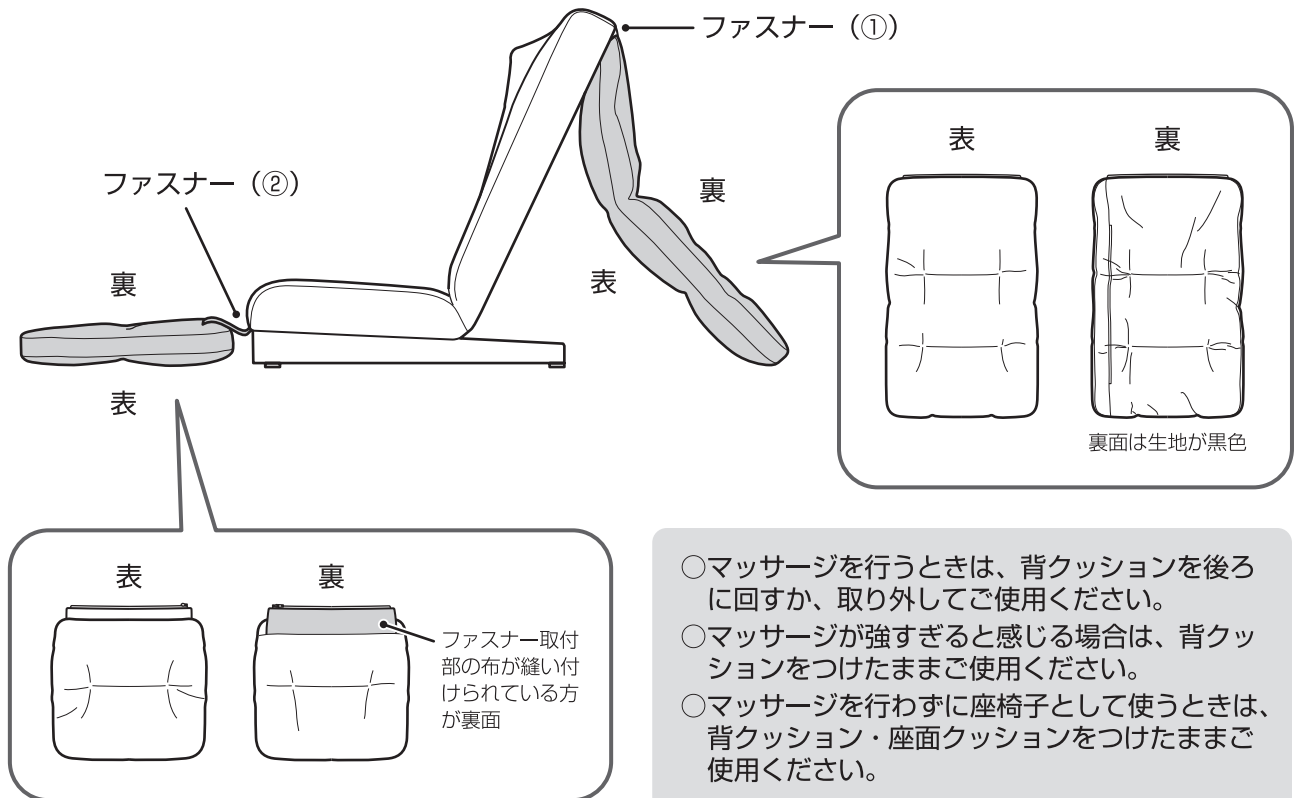

背もたれの角度調節

背もたれはお好みの角度に手動で調節する。

- 本製品はラチェット機構によって、背もたれを4段階に調節できます。(①②③④)
背もたれ上部を手前に引いて調節してください。
「カチ」と音がしたところで止めると固定できます。
- 背もたれを倒したいときは、背もたれ上部をさらに手前に引くと(⑤)、ロックがはずれます。背もたれに手をそえて一番倒れた状態(①)までおろしてください。
- (①)の角度より後ろには倒れませんのでご注意ください。

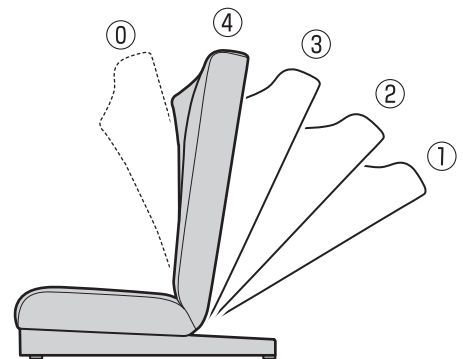


リモコンを収納する

右側面にあるリモコンポケットへリモコンを収納する。

- リモコンポケットには、リモコン以外のものは入れないでください。
リモコンが傷ついたり、布地が破れるおそれがあります。
- リモコンポケットがあるのは右側のみです。

注意


- 電源コードやリモコンコードに足をひっかかない。
故障やけがのおそれがあります。

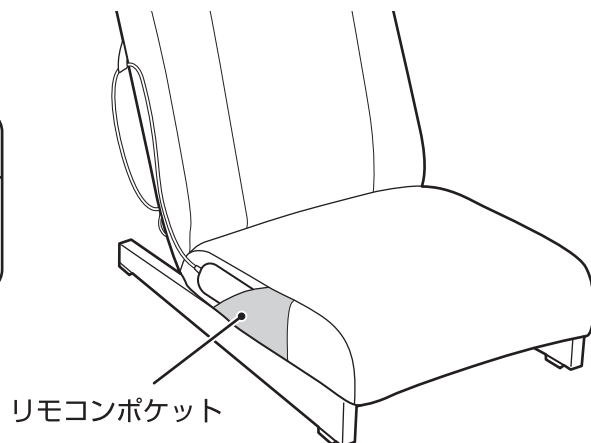

自動コースの使いかた

はじめに

- 背クッションを後ろに回して、椅子に腰をかけて、背もたれ部にゆったりともたれてください。マッサージが強く感じる場合は、背クッションをつけたままご使用ください。
- 背もたれはお好みの角度に調節してください。(▶P10)

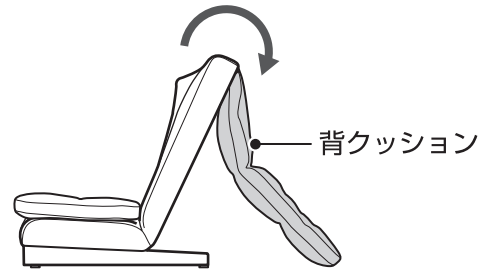

⚠ 注意

- 使用時間は1回10分以内にする。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。
＜お願い＞ 1日の使用は1人30分以内にしてください。
- 使用後や使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。お子様のいたずらなどによる事故の原因になります。

1 全体 肩 腰 から、お好みのコースを選択する。

- 選択したコースのランプが点灯します。


自動コースの種類

全体	背中全体のコリや疲れをやわらげるコース
肩	肩・背部のコリや疲れをやわらげるコース
腰	腰部のコリや疲れをやわらげるコース


2 調節 を押してお好みの高さ調節する。

- 肩位置は、3段階から選択できます。ボタンを押すたびに「中」→「低」→「高」→「中」…と切り替わります。
- 肩位置調節中は、肩位置ランプが点滅します。

肩位置の目安

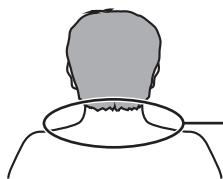

もみ玉の位置
首肩の付け根あたりに
もみ玉を合わせてください。

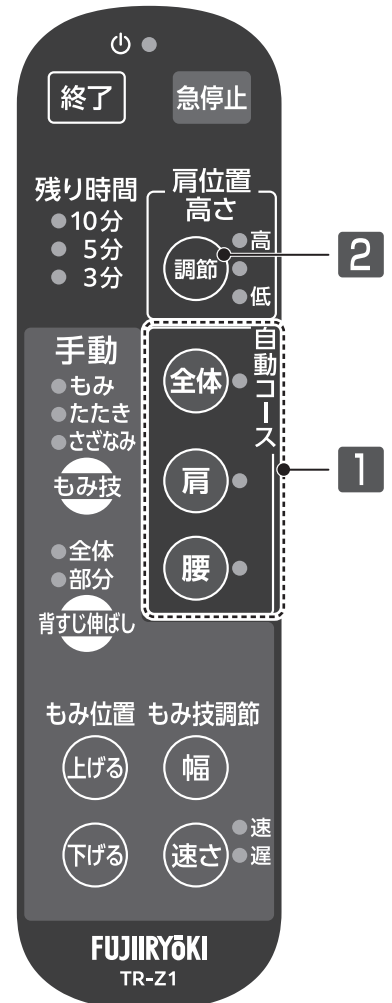

3 マッサージが始まる。

ただちにマッサージを停止する場合：**急停止** を押す。

- もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。

マッサージを途中で終了する場合：**終了** を押す。

- もみ玉が最上部に移動し、収納位置（肩位置「中」の位置）まで戻り、終了します。

4 約10分でマッサージが終了する。

- 自動的にもみ玉が最上部に移動し、収納位置（肩位置「中」の位置）まで戻り、終了します。

5 使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く。

- 誤ってリモコンを操作して、動き出すことを防止します。




手動マッサージの使いかた

マッサージを選択する

1 **もみ技** や **背すじ伸ばし** を押して、お好みのマッサージを選択する。

① **もみ技** を押すたびに、もみ技が切り替わります。

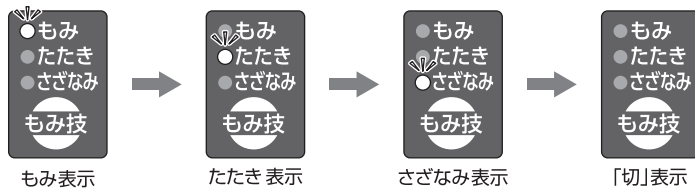

● 背すじ伸ばし動作時は、さざなみを選択できません。

② **背すじ伸ばし** を押すたびに、範囲が切り替わります。




● さざなみ動作時は、背すじ伸ばしを選択できません。

肩位置を調節する

2 **調節** でお好みの高さに調節する。

- 肩位置は、3段階から選択できます。ボタンを押すたびに「中」→「低」→「高」→「中」…と切り替わります。
- 肩位置調節中は、肩位置ランプが点滅します。
- マッサージ中に「肩位置」を選択すると、マッサージが一旦停止し、もみ玉が肩位置に移動します。
- しばらく操作がない場合は、マッサージに戻ります。

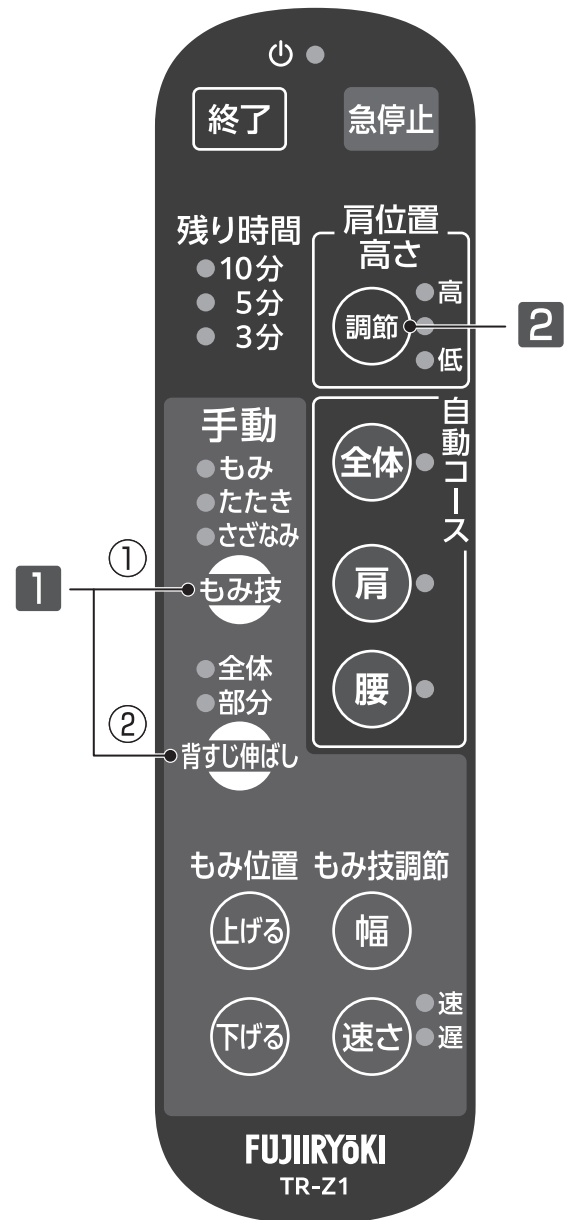

もみ玉幅を調節する

3 幅 でお好みの幅に調節する。

- ボタンを長押ししている間、もみ玉の幅が変わります。お好みの位置でボタンを離すと止まります。
- たたき、背すじ伸ばしの動作中に調節できます。

速さを選択する


4 速さ でお好みの速さに調節する。

- ボタンを押すたびに「速」→「遅」と切り替わります。
- もみ、たたき、さざなみの動作中に調節できます。

もみ位置を調節する

5 上げる 下げる でお好みの位置に調節する。

- ボタンを長押ししている間、もみ玉の位置が変わります。
- もみ、たたき、さざなみ、背すじ伸ばし（部分）の動作中に調節できます。

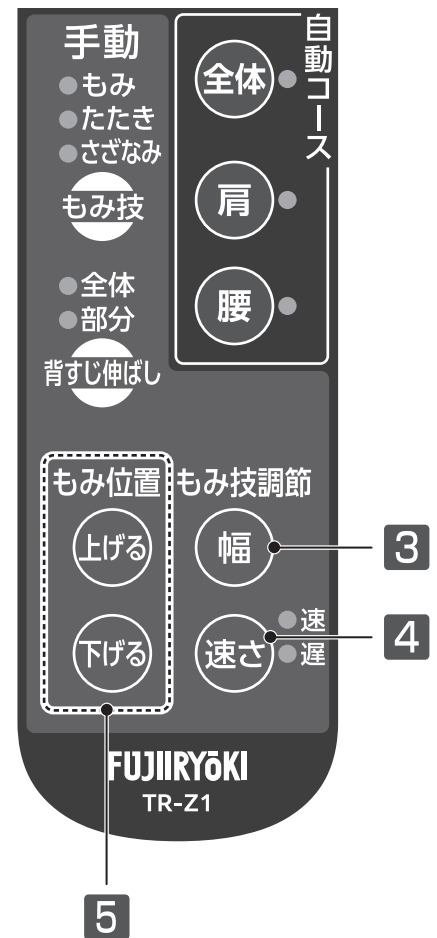

もみ技の種類

もみ 筋肉をもみほぐします。

さざなみ もみながらたたく動きで疲労をやわらげます。

たたき リズミカルな連打で筋肉の疲れをとります。

単独で選択すると、ポイントでマッサージします。

全体 全体：背すじに沿って背中全体を伸ばします。
部分 部分：背中を部分的に伸ばします。

背すじ伸ばし

もみ、たたきと複合すると、マッサージ範囲の調節ができます。

マッサージ動作中の調節のしかた

手動マッサージ機能一覧表

各動作において下表の通りに設定が可能です。

- 「マッサージ速さ」は調節ができる場合のみ、ランプが点灯します。

		肩位置調節	もみ玉幅	速さ	もみ位置調節	マッサージ部位
手動 マッ サー ジ	もみ	●	-	●	●	全体/部分/ポイント
	たたき	●	●	●	●	全体/部分/ポイント
	さざなみ	●	-	●	●	ポイント
	背すじ伸ばし	●	●	-	● (部分のみ)	全体/部分

マッサージを終了する

1 マッサージが始まる。

ただちにマッサージを停止する場合： **急停止** を押す。

- もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。

マッサージを途中で終了する場合： **終了** を押す。

- もみ玉が最上部に移動し、収納位置（肩位置「中」の位置）まで戻り、終了します。



2 約10分でマッサージが終了する。

- 自動的にもみ玉が最上部に移動し、収納位置（肩位置「中」の位置）まで戻り、終了します。

3 使用後は、ACアダプターをコンセントから抜く。

- 誤ってリモコンを操作して、動き出すことを防止します。

途中でマッサージを変更するときは

- マッサージ動作中でも、ほかの動作に切り替えることができます。

自動コース▶他の自動コースへの変更

手動マッサージ▶各自動コースへの変更

1 ●全体 ●肩 ●腰 から、お好みのコースを選択する。


- 選択された自動コースに変更されて動作します。詳細は、「自動コースの使いかた」をご確認ください。(P12 参照)
- 残り時間のカウントは継続されます。

自動コース▶各手動マッサージへの変更

手動マッサージ▶他の手動マッサージへの変更

2 ●もみ技 または ●背すじ伸ばし を押して、お好みのマッサージを選択する。

- 選択された手動マッサージに変更されて動作します。詳細は、「手動マッサージの使いかた」をご確認ください。(P14 参照)
- 残り時間のカウントは継続されます。

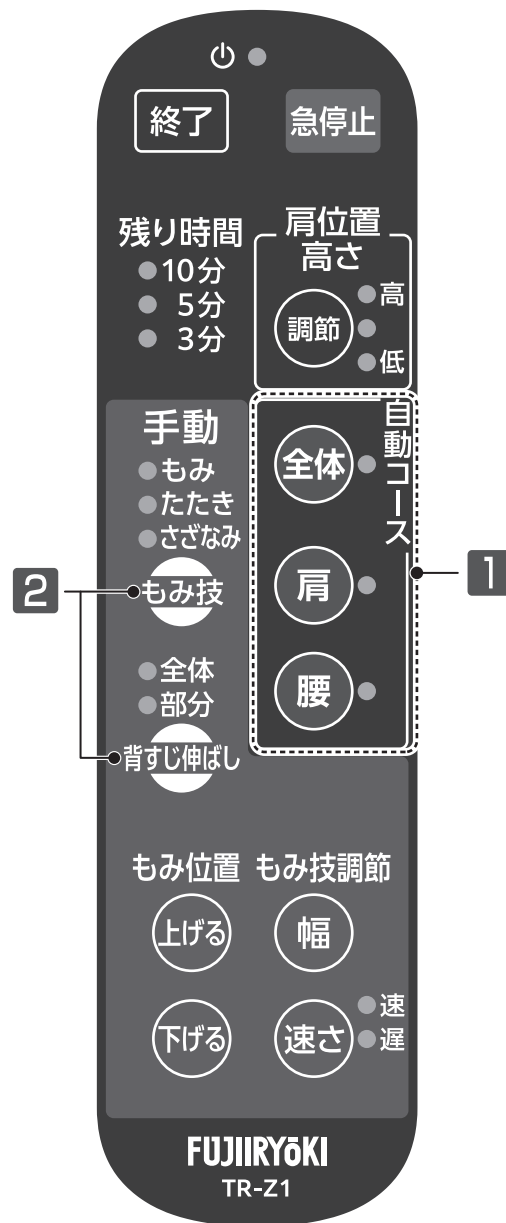

お手入れと保管のしかた

⚠ 警告

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。



⚠ 注意

- お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

お願い 定期的にお手入れを行ってください。

本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

本体・背クッション・座面クッション

1. 乾いたやわらかい布でふく。
2. 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて、固く絞って拭き、最後から拭きする。
 - 張地などに色が移ることがありますので、色落ちしやすい衣類での使用はご注意ください。
 - アイロンをかけないでください。生地を傷めるおそれがあります。

リモコン部分

1. 乾いたやわらかい布でふく。
 - 濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。

木脚

1. 乾いたやわらかい布やハタキ等で軽くはらう。
 - ほこりがあるまま硬い布でこすったりすると、こまかい傷が付く可能性があります。

保管のしかた

⚠ 警告

浴室など湿気が多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。


本体は汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
長い間使用しない場合は、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

- 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。
変色・変質のおそれがあります。

Q&A

Q1 左右の強さが異なる。また、段違いに感じる。

A より気持ちよくマッサージするために、もみ玉が交互にたたく機構を採用しており、やむをえずもみ玉の位置がずれて動作することがあります。そのため左右で強さが異なって感じることはありませんが、故障ではありません。

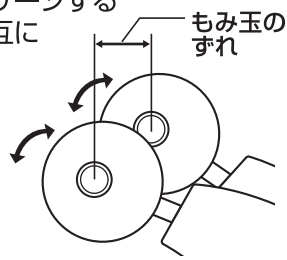

※イラストはイメージです。実際のもみ玉の形状とは異なります。

Q2 マッサージをより強くする方法はありますか？

A 次のことを試してください。

- 背クッションを取り外す。
- 背もたれ部を倒す。
- 深く腰かけ、体をしっかりと背もたれ部に密着させる。



Q3 マッサージを弱くする方法はありますか？

A 次のことを試してください。

- 背クッションをつける。
- 背もたれ部を起こす。
- 背もたれ部にひざ掛けや毛布などを掛ける。

Q8 本体の寸法を教えてください。

A 下図をご参照ください。(①: クッションありの寸法 ②: クッションなしの寸法)

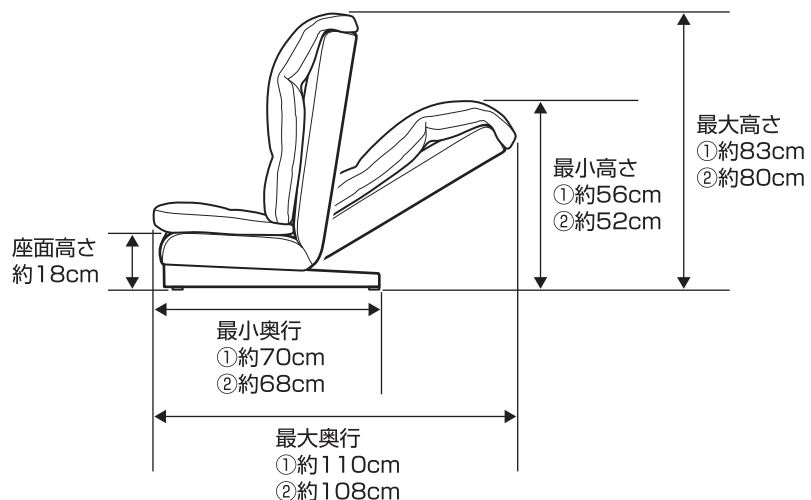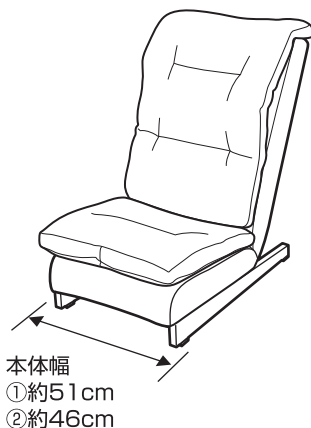

Q4 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日約30分、マッサージを毎日使用した場合、約19円/月です。
※電力料金目安単価 31円/kWh (税込) の場合で算出。(当社調べ)

Q5 ホットカーペットを椅子の下に敷いてもいいですか？

A 火災のおそれがあるので、おやめください。ホットカーペットの発熱体を痛め、そこから火災になるおそれがあります。

Q6 病院に通院しているけど、使っても大丈夫？

A 通院先の医師とご相談のうえ、使用してください。マッサージは、「触圧刺激」といって、筋肉に圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。病気によっては悪化を招く可能性もありますので、必ず医師に相談してください。

Q7 マッサージコースの動作がいつもと異なる。

A 同じコースでも、もみ玉への負荷のかかり方などによってもみ玉の動作のタイミングが変わることがあります。

故障かなと思ったら



警告

絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

- ご使用中に次のような音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではありません。
 - ・ もみ玉上下移動時のカタカタ音
 - ・ もみ玉と布のすれる音（特に、もみ動作時）
 - ・ もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方によっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります
 - ・ 「速さ」調節による音の違い
 - ・ 左右のもみ玉の高さが異なる（交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生します）
 - ・ マッサージ動作時のギア・モーターの音
 - ・ たたき、さざなみ動作時のカタカタ音
 - ・ 負荷をかけた時のモーターのうなり音
- 縫製の特性上、部分的に軽微なしわや弛みが生じる場合がありますが、不良品ではありません。
- 生地特性上、ややにおいが感じられる場合がありますが、異常ではありません。

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
動作しない	ACアダプターが抜けていませんか？	ACアダプターのプラグを本体のソケットに、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。	P9
	タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか？	もう一度リモコンのボタンを操作してください。	P12 P14
リモコンが正常に動作しない	電源の状態等により誤作動している可能性があります。	ACアダプターを差し直してください。	P9
動作が途中で止まる (リモコンを押しても動作しない)	長時間連続して使用していませんか？	モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています。しばらく本体を停止させてください。(1時間程度)	—
	無理な力がかかっていませんか？	もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き止まることがあります。ACアダプターを差し直し、もう一度操作し直してください。	—
動作時の音が気になる	マッサージ動作時のモーター音 もみ玉と布のすれる音	構造上発生するもので、機能などに影響はありません。	—

お願い 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、ACアダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

愛情点検

⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検

長年ご使用の場合は
点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、AC アダプターが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため AC アダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

● 保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

修理を依頼されるとき

P20 に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、AC アダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

- 保証期間中に修理を依頼される場合
ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

- その他ご不明な点がある場合
アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

医療機器の修理に関して

本製品は医療機器です。医療機器の修理には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき修理する商品および修理の方法に応じて厚生労働省令で定める区分に従い、事業所ごとで許可を受けた修理業者による修理が必要です。この為、お客様ご自身の分解・修理のご要望はお受けできませんのでご了承ください。

仕様

販売名	リビングマッサージチェア T24	
品番	TR-Z1	
類別	機械器具 77 バイブレーター	
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード 34662000)	
医療機器認証番号	306AHBZX00037000	
定格	電源 (50/60Hz)	AC100V
	時間	20分
	入力 (消費電力)	40W
アダプター定格	入力: AC100V 50/60Hz 100VA 出力: DC24V 2A	
付属品	AC アダプター (MODEL: IVP2400-2000) 背クッション、座面クッション	
メカ (もみ玉) マッサージ 速さ調節範囲	もみ	遅 約 12.1 回/分 速 約 18.5 回/分
	たたき	遅 約 214 回/分 速 約 319 回/分
	上下移動	約 0.74cm/秒
オートタイマー	約 10分	
背もたれ部調節角度	約 99 度~約 150 度 (4 段階可動)	
寸法 (クッション含む)	リクライニングしていないとき	幅 約 51×奥行 約 70×高さ 約 83cm
	リクライニングしたとき	幅 約 51×奥行 約 110×高さ 約 56cm
質量 (クッション含む)	約 13.4kg	
張地	ポリエステル	
適応体重	100kg 以下	
製造元	蘇州大科健身器材有限公司 SUZHOU DAITEC EXERCISING MACHINE CO.,LTD. (CHINA)	
製造販売元	株式会社フジ医療器	

MEMO

販売名	リビングマッサージチェア T24	品番	TR-Z1	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間		保証対象	本体（但し、消耗品は除く）	
ご購入者	フリガナ			お買い上げ日	年 月 日
	ご芳名	様		ご購入先	電話 ()
ご住所	〒		電話 ()		

※ 製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

【無料修理規程（一部抜粋）】

- 保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申し出ください。
 - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
 - ③ この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を呈示ください。
※離島又は離島に準ずる遠隔地の出張修理/交換作業に伴う費用が発生する場合がございます。

- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の呈示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

お客様相談・サイバーセキュリティ窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル ☎ **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Webでの受付も行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

フジ医療器ホームページ www.fujiiryoki.co.jp

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2024年9月20日(第1版)